

manual do equipamento

TÁBUA PROPRIOCEPTIVA

ORTOPÉDICA

cod.: 00106A

ANVISA Nº.:80345610007



**ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA.**

R. Antônio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II
CEP: 85825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná - Brasil
CNPJ: 01.417.367/0001-78

AFE: 802844-5

Responsável Técnico: Dr. Alex Fernando Zani
Crefito: 8/8409 - F

Sumário

Descrição do equipamento.....	02
Informações técnicas.....	02
Indicações de uso.....	02
Advertências, Precauções e Cuidados especiais.....	02
Armazenamento e transporte.....	03
Formas de apresentação do produto médico.....	04
Instruções de uso.....	04
Termo de garantia.....	05
Certificado de garantia.....	06

Este manual contém informações essenciais para a utilização do seu equipamento. Leia-o atentamente antes de iniciar sua instalação e operação. Preserve e mantenha-o para consultas futuras.

Descrição do equipamento

A **TÁBUA DE QUADRÍCEPS ORTOPÉDICA** foi desenvolvida a partir de conceitos modernos, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na utilização. Sua estrutura foi elaborada dentro dos princípios da ergonomia e testada rigorosamente, objetivando o conforto em seu uso.

Informações Técnicas

Capacidade de Carga: 140 kg

Comprimento: 660 mm

Largura: 110mm

Altura: 200mm

Peso do produto: 1,7 kg

Estrutura: Madeira.



140 kg

Peso máximo suportado.



1,7 kg

Peso do produto.

Indicações de uso

Utilizada para reabilitação de membros inferiores, para ganho de força muscular, flexibilidade e amplitude de movimento. São elaborados pelo fisioterapeuta diversos exercícios evolutivos.

Advertências, Precauções e Cuidados especiais.

Advertências/Precauções:

Este produto não contém contra-indicações para o usuário.

Certifique-se da correta utilização, respeitando o limite de peso (135 Kg).

Após o uso guardar o produto em local seguro, não deixando exposto ao sol e chuva.

Cuidados especiais:

Para sua melhor conservação, o produto deve ter seus parafusos apertados periodicamente. A limpeza deve ser feita apenas com panos limpos levemente umedecidos com sabão neutro, não utilizar produtos químicos, pois o mesmo poderá causar danos ao equipamento.

Armazenamento e transporte

O armazenamento das embalagens deve ser em local fresco e arejado protegido de ações climáticas ofensivas (sol, chuvas, ventos e altas temperaturas), com um empilhamento máximo de cinco caixas idênticas.

SIMBOLOGIA NA EMBALAGEM



ESTE LADO PARA CIMA

Indica a posição correta para transporte da embalagem




FRÁGIL

O conteúdo nesta embalagem é frágil e deve ser transportado com cuidado.



EMPILHAMENTO MÁXIMO.

Número máximo de embalagens idênticas que podem ser empilhadas uma sobre as outras, número limite de 5 unidades.

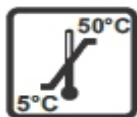

LIMITES DE TEMPERATURA.

Indica as temperaturas limites para transporte e armazenagem da embalagem, sendo o limite inferior de 5°C e o superior de 50°C.




NÃO EXPOR AO SOL.

As embalagens devem ser armazenadas em local fresco e arejado, protegido de ações climáticas ofensivas.



MANTENHA LONGE DA CHUVA

A embalagem não deve ser transportada na chuva.

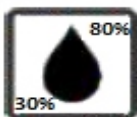

UMIDADE RELATIVA.


Indica a umidade relativa do ambiente para transporte e armazenagem, sendo entre 30% e 80%.

Acima estão os símbolos de indicação de segurança ao produto quanto a armazenagem, ações climáticas e transporte.

Formas de apresentação do produto médico

O produto é enviado montado, embalado em plástico bolha e acomodado em caixa resistente a fim de chegar ao cliente final de forma segura.

Instruções de uso

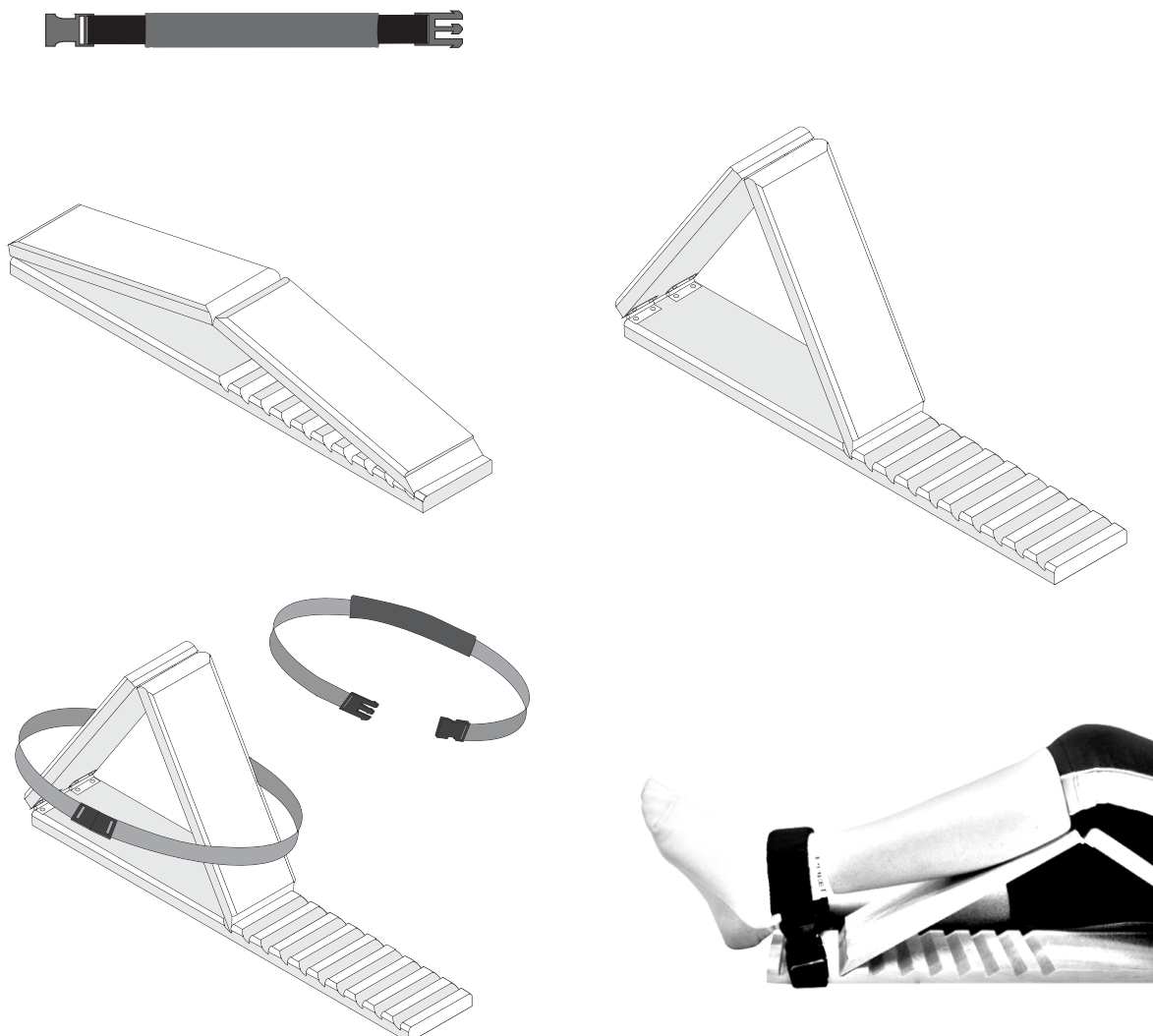

Termo de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelos prazos constantes no Quadro "PRAZOS DE GARANTIA", contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda e limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes do produto, nos termos discriminados nas condições abaixo e cujo exame realizado por profissionais da empresa constate, satisfatoriamente, a existência do alegado defeito de material ou manufatura.

Prazo de garantia				
3 MESES	6 MESES	12 MESES	24 MESES	36 MESES
MOLAS AMORTECEDORES	ACESSÓRIOS PLÁSTICOS CONEXÕES ELÉTRICAS CONEXÕES HIDRAULICAS	COURVIN ESPUMA MOTORES CENTRAIS ELÉTRICAS PARAFUSOS COLAGENS SINTÉTICAS	PINTURA EPÓXI PINTURA PU ACESSÓRIOS GERAIS AGREGÁVEIS	ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA SOLDAS COLAGENS DE MADEIRA

Dependendo da gravidade e extensão do problema, a empresa poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Nos propomos a atender todas as reposições dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A garantia é válida para defeitos de fabricação e não contempla:

- Desgaste no acabamento, partes e/ou peças, ocorrido por uso intenso, falta de lubrificação ou exposição a condições adversas como: intempéries, umidade, maresia, frio e calor intensos;
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto.
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes etc;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
- Danos causados por serviços de conserto realizados por pessoal não autorizado;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição a intempéries, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nessas condições.

Ocasiona a perda da garantia:

- Utilização do produto em ambientes úmidos;
- Utilização do produto sem seguir as orientações constantes no Manual;
- Utilização de acessórios que não sejam originais do aparelho;
- Violação do laque e/ou remoção do número de série, apresentando o número de série ilegível, alterado;
- Submetidos a sobrecarga;
- Envio do aparelho para assistência técnica não autorizada pelo fabricante.

Atenção:

- É recomendável a troca das molas a cada 12 meses devido ao desgaste sofrido pelo material (evitando assim rupturas e possíveis acidentes);
- O conserto ou substituição do produto com defeito não prorroga o prazo de garantia;
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia;
- A recepção dos produtos mediante a transportadora, deve ser acompanhada com seriedade pelo cliente, pois produtos danificados durante o transporte deverão ser questionados ao transportador no ato da entrega.

Reclamações de defeitos observados durante o prazo de garantia deverão ser efetivadas diretamente ao Núcleo de Atendimento e Qualidade, através do telefone 0800 70 70 010 e só serão atendidas mediante:

- Apresentação do respectivo **documento fiscal de venda**;
- Realização de uma **visoria técnica do produto** para constatação do defeito reclamado.

O equipamento deverá ser enviado para o endereço constante na Nota Fiscal e as despesas de frete são de responsabilidade da ARKTUS somente nos primeiros 90 (noventa) dias, após este prazo serão de responsabilidade do cliente.

O fabricante reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos em território brasileiro. Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao documento fiscal em local de fácil acesso.

Em caso de dúvida ou para esclarecimentos adicionais, nosso Núcleo de Atendimento e Qualidade está à sua inteira disposição.

Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do Cliente: _____

Endereço: _____

Complemento: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

UF: _____ CEP: _____

Data da Compra: ___/___/___ Nota Fiscal (n°): _____

N° de Série: _____ N° Lote: _____

Equipamento: _____

Obs.: _____



0800 70 70 010

www.arktus.com.br