

Manual de Operação

Versão 2.0

ELETRODO UROGINECOLÓGICO

Acessório de uso exclusivo para a família dos
Equipamentos Dualpex 961 (Registro ANVISA nº 80079190022)
e PerinaStim (Registro ANVISA nº 80079190021)

Fabricante:

QUARK Produtos Médicos

Razão Social: Mendes e Barbosa

CGC 71.769.673/0001-59

Indústria Brasileira

Rua do Rosário, 1776 Piracicaba - SP CEP 13 400 186

E-mail: quark@quarkmedical.com.br FONE (19) 2105-2800

Número ANVISA: 800.791-9

INTRODUÇÃO

Os eletrodos para tratamento uroginecológico foram desenvolvidos dentro de rigorosos padrões de qualidade, tendo em vista também, a preocupação em proporcionar ao paciente, o mínimo de desconforto com o máximo de eficácia no tratamento.

INDICAÇÃO

Indicado para o tratamento de períneos dolorosos do pós partum ou pós-operatório, instabilidades vesicais, incontinências sobre imperiosidade, incontinência urinárias de esforço e prolapso.

- **Eletrodo Anal:** Indicado para utilização em pacientes virgens (mulheres) ou do sexo masculino.

- **Eletrodo Vaginal:** Indicado para utilização em pacientes do sexo feminino

RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se o uso individual deste produto.

O Eletrodo Anal e/ou Eletrodo Vaginal são partes integrantes dos equipamentos DualPex 961 URO, PerinaStim e opcionais para o equipamento DualPex 961. Tais equipamentos possuem programas desenvolvidos especialmente para o tratamento uroginecológico.

Recomenda-se portanto, o uso dos eletrodos somente com os equipamentos mencionados.

ATENÇÃO


A QUARK Produtos Médicos não se responsabiliza pelo uso indevido, bem como qualquer alteração e/ou adaptação feita no eletrodo para ser usado em outro equipamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Medidas (Cx D):

Eletrodo Vaginal - Comprimento 19 cm x Diâmetro 2 cm

Eletrodo Anal - Comprimento 11 cm x Diâmetro 1,4cm

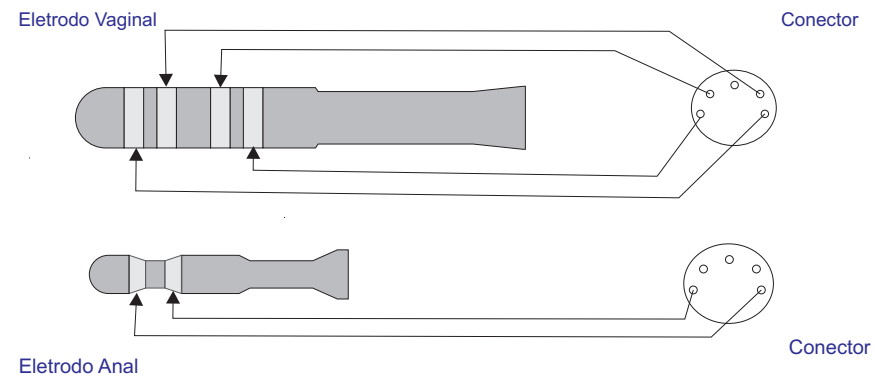


LIMPEZA

Recomenda-se antes e após cada utilização a lavagem do eletrodo com sabonete anti-séptico. Após lavagem, deve ser realizado um esfregaço com uma gaze umedecida com álcool 70% em todo o cabo do eletrodo.

IMPORTANTE: No momento da limpeza, deve-se **desconectar** o eletrodo do equipamento. Produto não esterelizado. Nunca use auto clave.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Para a utilização dos Eletrodos é necessário que seja aplicado um gel lubrificante antes da introdução no paciente que não deve exceder o ponto especificado no desenho da página seguinte.

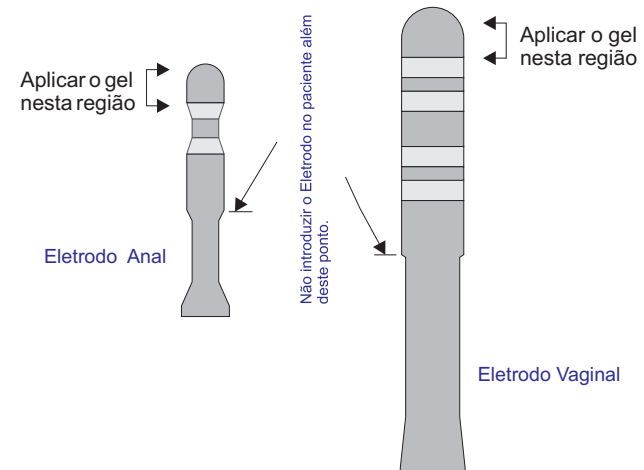


Durante a terapia o Fisioterapeuta deve segurar o Eletrodo introduzido no paciente.

Atenção: A utilização dos eletrodos é exclusiva para o tratamento uroginecológico.

Para utilização do Eletrodo Anal, só poderá ser operado o Canal 01 (branco); para a utilização do Eletrodo Vaginal pode-se operar o Canal 01 (branco) ou Canal 02 (cinza) individualmente, ou mesmo ambos os Canais.

IMPORTANTE: A posição em que se conecta os cabos dos Eletrodos, não influi no seu controle ou seja:

Canal 01 = Controle Branco
Canal 02 = Controle Cinza

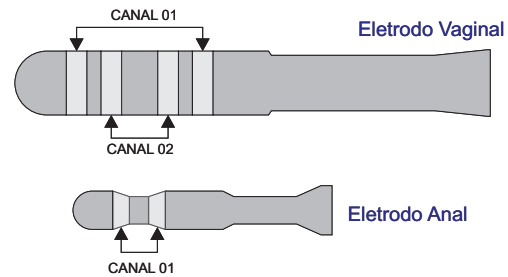

Observação: Devido a melhoria contínua de nossos produtos, a QUARK se reserva ao direito de alterar seus produtos sem incorrer em obrigação alguma de aviso prévio ou atualização em produtos já fabricados.