



Produto: **TIPÓIA ORTOPÉDICA MERCUR**

Identificação			Fiscal		
Tam.	Referência	Código Interno	Classificação Fiscal	IPI	ICMS
P	BC0069-SIA	B060069-SIA	90.21.10.10	0%	Isento
M	BC0069-SIB	B060069-SIB			
G	BC0069-SIC	B060069-SIC			
GG	BC0069-SID	B060069-SID			
Composição:		100% algodão			
Prazo de validade:		5 anos			

Embalagem:			<input type="checkbox"/> Caixa	<input type="checkbox"/> Clamshell
		Embalagem Individual	Máster Caixa	
Comprimento (cm)		5	50	
Largura (cm)		14	50	
Altura (cm)		20,2	39	
Quantidade	P	1	52	
	M	1	52	
	G	1	52	
	GG	1	52	
Peso Médio (kg)	P	0,14	9	
	M	0,15	9,5	
	G	0,16	10	
	GG	0,18	11	

Código de Barras	P	7896342452248	17896342452245
	M	7896342452255	17896342452252
	G	7896342452262	17896342452269
	GG	7896342452279	17896342452276

Características Gerais:	
Registro no MS	Registro na ANVISA / MS nº 10340440041
Cor	Azul
Mode de usar	<p>Solte a alça, retirando-a completamente da fivela de metal. Posicione o braço dentro da tipóia, com o cuidado de encaixar o cotovelo no fundo da mesma. Puxe a alça pelas costas, passando-a por trás do pescoço e apoiando-a sobre o ombro oposto. Prenda a alça na fivela metálica, conforme ilustração. Regule a altura da tipóia através da fivela.</p>  <p>Após a colocação, você deverá ajustar a alça da tipóia de acordo com a orientação médica, para evitar inchaço. Não retire o produto para higiene sem a autorização do seu médico. Quando não estiver em uso, conservar ao abrigo do calor, luz e umidade.</p>
Detalhes	Para braço direito ou esquerdo
	Confeccionada em material resistente e lavável
Indicações	Prático sistema de ajuste que permite que a regulagem seja feita com apenas uma mão
	Seqüelas de AVC
	Uso pós-operatório
	Seqüelas de luxação
	Sustentação do aparelho gessado
	Lesões musculares ou articulares
	Instabilidade de artrite reumatóide