

## ATENÇÃO

Toda vez que for levantar ou sentar-se na cadeira colocar o apoio dos pés na posição vertical, para que a operação seja facilitada e assim evitando danos na peça por uso indevido (Vide fig. 02).



## CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

O tempo de vida útil de uma Cadeira de Rodas, depende muito das condições de uso e cuidados tomados com a mesma, sua manutenção é muito simples:

- Lubrifique os eixos e garfos sempre que houver necessidade;
- Verifique todo mês, possíveis folgas em parafusos e porcas;
- Não deixar a cadeira exposta ao tempo por longos períodos (chuva, sol, etc.);
- Manter os pneus cheios na medida correta (Pneu Inflável);
- A cadeira suporta pacientes com limite máximo de Peso 70 Kg.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente: \_\_\_\_\_

Revendedor: \_\_\_\_\_ Data de saída: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Esta cadeira está garantida pelo período de 06 meses a contar da data da compra.

### Termos de Garantia

- Eventuais defeitos de funcionamento
- Eventuais defeitos de material empregado

### Excluem-se da garantia

- Desgaste natural pelo uso
- Danos causados por falta de manutenção e uso indevido
- Após prazo de validade
- Modificações impróprias realizadas no produto
- Assistência prestada por pessoa não autorizadas.

### Geral

A fábrica não se responsabiliza por danos causados em decorrência de acidentes.

## AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA




Rua São João do Cariri, 387 - Itaquera  
CEP 08240-210 - São Paulo - SP  
Fone: (11) 2052-7895 - Fax: 2052-8656



## CADEIRA DE RODAS

Modelo: **INFANTIL REPAN**

- A - Apoio para braços fixo
- B - Empurrador com Manopla
- C - Encosto
- D - Roda Traseira
- E - Apoio para panturrilha
- F - Freio
- G - Roda Dianteira
- H - Garfo
- I - Pedal
- J - Assento
- L - Apoio para pés com elevação

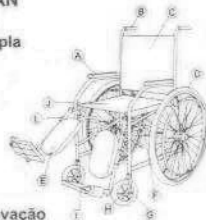

## INSTRUÇÕES DE USO

**Abrindo:** para que a cadeira seja aberta é necessário se posicionar ao lado dela e então empurrar o tubo do assento para baixo até que o mesmo encoste na lateral da cadeira. Mantenha-se atento para quando abrir a cadeira evitar acidentes, para isso é necessário abri-la com a palma da mão aberta (vide fig. 01).



**Fechando:** para fechá-la, o apoio dos pés tem que ser colocado na posição vertical e o assento deve ser puxado pelas extremidades para cima até a cadeira ficar completamente dobrada.

**Utilizando o Freio:** Para utilizar o freio basta empurrar a alavanca para a frente e então o pneu será pressionado e para soltá-lo basta puxar a alavanca para trás.

## MANUAL DE INSTRUÇÕES