

Pt

Discos de Lixa

Indicação: Os discos de lixa são indicados para acabamento e polimento dental.

Uso: Instalar o mandril no contra-ângulo. Encaixar o disco na extremidade do mandril. Aplicar o produto em rotação baixa, exercendo pouca pressão, em movimentos circulares e toques intermitentes. Para se obter melhor resultado utilizar os discos nas 4 granulações, sucessivamente da mais grossa até a mais fina.

Princípio físico de funcionamento: A superfície abrasiva do disco em atrito com o dente proporciona acabamento e polimento da região restaurada.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Não utilizar o produto em rotação superior a 4000RPM. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos componentes, o produto não deve ser utilizado. Os discos devem ser descartados após cada paciente.

Composição: Polietileno tereftalato, resina de borracha sintética, pigmentos base água e óxido de alumínio.

Versão 06 - 06/2012

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60

Caixa Postal 200 | CEP 89107-000

Pomerode/SC - Brasil

Reg. ANVISA 10291220030

Téc. Resp. Dr. Elson J. Costa | CRO/SC 1202

 55 47 3387-6115 | 0800 47 1020

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Susan Eipper
Burgplatz 03
99423 Weimar
Alemanha

