

Importante

O presente documento serve apenas para simplificar e clarificar os passos para o correto funcionamento do equipamento. **No entanto, continua a ser crucial a leitura do manual do usuário.**

Manual Aplicativo

Baixe a versão mais recente do manual diretamente no site da Quark Medical:

quarkmedical.com.br/pdf/FAMILIA_FESVIF_TENSVIF.pdf


OBS: A leitura do manual do usuário é imprescindível para boas práticas de uso.

Atenção

Certifique-se que não há divergências nos acessórios que compõem o equipamento, verificando o checklist (disposto na parte interna da embalagem)

Instruções Gerais para Uso

1- A utilização do equipamento somente deve ser feita pelo Fisioterapeuta ou por profissional treinado e orientado por ele.

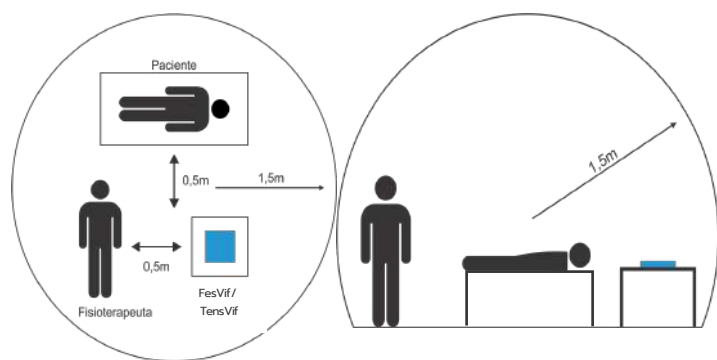


2- Conecte o cabo de força no equipamento e o plug na tomada da rede elétrica. Não há necessidade de verificar a tensão da rede elétrica (117V ou 220V), pois o equipamento fará a seleção da voltagem automaticamente.

3- Ligue o equipamento através da chave Liga/Desliga. A mensagem com o nome do equipamento e revisão do software aparece no display. Durante este processo, ouve-se o som da campainha.



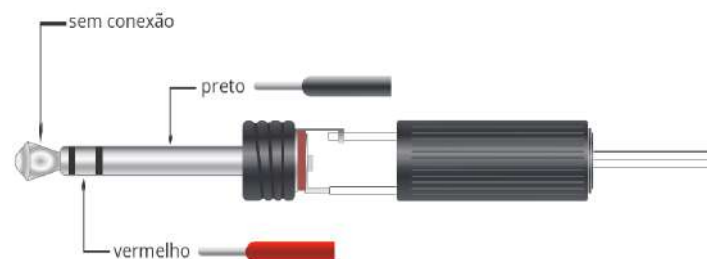

4- Conecte os cabos de terapia nos respectivos conectores de saída do equipamento. Nos modelos **Dual**: cabo branco - canal 1 e cinza - canal 2. Nos modelos **Four**: cabo branco - canal 1 e cinza - canal 2, vermelho - canal 3 e preto - canal 4 e a outra extremidade com os eletrodos ao paciente. No caso do eletrodo de silicone, aplicar uma fina camada de gel na área a ser tratada.



5- Selecione os parâmetros desejados utilizando a tecla **Function** (Function) ou então utilize a tecla **(Prog)** (Prog) para selecionar alguma terapia gravada na memória. As terapias estão disponíveis no manual **página 12**.

6- Inicie a terapia pressionando a tecla **Start Select** (Start/Select).

7- Inicialmente a corrente de saída de todos os canais será zero. Deve-se então elevar gradativamente a intensidade da corrente dos canais utilizando para isto as teclas **▲** **▼** (Incrementa e Decrementa).

*Durante a terapia, deve-se pressionar a tecla **Start Select** para selecionar os canais que deseja modificar o valor da corrente através das teclas incrementa e decrementa  . Os canais que serão ajustados passarão a piscar no display. Pressionando-se repetidamente a tecla **Start Select** alterna-se entre estes 2 conjuntos (canais 1 e 2 ou então canais 3 e 4).

8- Ao final do tempo programado para a terapia, ouve-se o som de finalização e a intensidade de corrente é levada à zero.

9- Para interromper a terapia a qualquer momento antes do tempo programado, pressione a tecla **Stop** (Stop).



FesVif 995 Dual



FesVif 995 Four



TensVif 993 Dual



TensVif 993 Four

Fabricante: Quark Produtos Médicos
Razão Social: Mendes e Barbosa Produtos Médicos
Indústria Brasileira -
CNPJ: 71.769.673/0001-59
Número ANVISA: 80079190023
Rua do Rosário, 1776 - Centro - Piracicaba/SP
CEP: 13.400-186 | Fone: (19) 2105-2800
www.quarkmedical.com.br
quark@quarkmedical.com.br