

ATENÇÃO

Toda vez que for levantar ou sentar-se na cadeira colocar o apoio dos pés na posição vertical, para que a operação seja facilitada e assim evitando danos na peça por uso indevido (Vide fig. 02).



CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

- 1 - Manter lubrificado o eixo e garfo da cadeira de acordo com a necessidade.
- 2 - Observar todo mês, possíveis folgas em parafusos e porcas.
- 3 - Após a utilização da cadeira deixá-la secar em local arejado.
- 4 - Evitar exposição da cadeira por muito tempo ao sol para que não ocorra danos às peças plásticas providas de ressecamento.
- 5 - A cadeira suporta pacientes com limite máximo de Peso 85 Kg.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Cliente: _____

Revendedor: _____ Data de Saída: / /

Esta cadeira está garantida pelo período de 06 meses a contar da data da compra.

Termos de Garantia

- Eventuais defeitos de funcionamento
 - Eventuais defeitos de material empregado
- Excluem-se da garantia
- Desgastes naturais pelo uso
 - Danos causados por falta de manutenção e uso indevido
 - Após prazo de validade
 - Modificações impróprias realizadas no produto
 - Assistência prestada por pessoa não autorizada

Geral

A fábrica não se responsabiliza por danos causados em decorrência de acidentes.

Agradecemos a Preferência



Rua São João do Cariri, 387 - Itaquera
CEP 08240-210 - São Paulo - SP
Fone: (11) 2052-7895 - Fax: 2052-8656



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CADEIRAS DE BANHO
modelo 202 Escamoteável / modelo 202



- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| A - Assento Sanitário | G - Garfo |
| B - Apoio para Braços em plástico | H - Apoio para os pés escamoteável |
| C - Encosto | I - Empurrador com Manopla |
| D - Roda Dianteira | J ¹ - Braços Escamoteáveis |
| E - Roda Traseira | |
| F - Freio | |

OBSERVAÇÃO* apenas nas cadeiras do modelo 202 Escamoteável. Item J existente

INSTRUÇÕES DE USO

Abrindo: Para que a cadeira seja aberta é necessário se posicionar ao lado dela e então empurrar o tubo do assento para baixo até que o mesmo encaixe na lateral da cadeira. Mantenha-se atento para quando abrir a cadeira evitar acidentes, para isso é necessário abri-la com a palma da mão aberta (vide fig. 01).

Figura 01



Fechando: Para fechá-la, o apoio dos pés tem que ser colocado na posição vertical e o assento deve ser puxado pelas extremidades para cima até a cadeira ficar completamente dobrada.

Utilizando o Freio: Para utilizar o freio basta empurrar a alavanca para a frente e então o pneu será pressionado e para soltá-lo basta puxar a alavanca para trás.