

Importante

O presente documento serve apenas para simplificar e clarificar os passos para o correto funcionamento do equipamento. **No entanto, continua a ser crucial a leitura do manual do usuário.**

Manual Aplicativo

Baixe a versão mais recente do manual diretamente no site da Quark Medical:


quarkmedical.com.br/pdf/PERINA.pdf

Atenção

Certifique-se que não há divergências nos acessórios que compõem o equipamento, verificando a checklist (disposta na parte interna da embalagem)


Instruções de Operação

1- A utilização do equipamento somente deve ser feita pelo Fisioterapeuta ou por profissional treinado e orientado por ele.

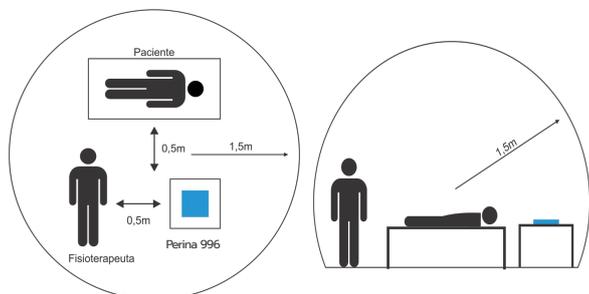

2- Conecte o cabo de força no equipamento e o plugue na tomada da rede elétrica. (Não há a necessidade de verificação da tensão da rede elétrica, pois o equipamento fará a seleção automaticamente).

3- Ligue o Perina através da chave liga/desliga localizada na parte traseira do equipamento.

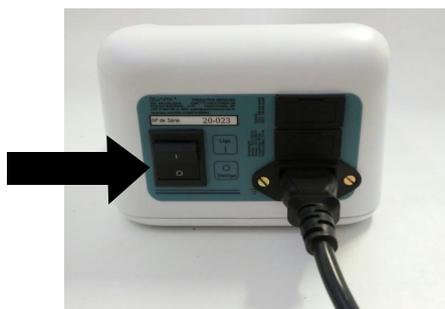


4- Conecte a torneira 3 vias no conector da saída de ar do painel superior do equipamento, conforme

a imagem, e certifique-se que esta esteja firmemente presa. Em seguida, conecte a mangueira da sonda na saída lateral de ar da torneira 3-vias rosqueando-a firmemente e conecte a sonda na extremidade da mangueira.




5- A sonda intracavitária, deve ser recoberta por um preservativo lubrificado externamente pelo gel e introduzida no paciente.

6- Antes de iniciar a terapia, infle um pouco a sonda para a introdução. Após a inserção da sonda, feche a válvula do insuflador (pera) e infle a sonda suavemente, até que o paciente sinta o contato contra a parede anal/vaginal, é importante uma ligeira distensão desta parede, sempre monitorando o paciente, atento a menor reação de dor, afim de parar a insuflação bem antes do umbral da primeira sensação de dor.

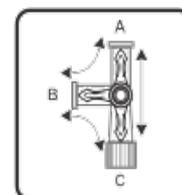

7- Gire a torneira 3-vias até que essa fique na posição indicada. A torneira deve estar nessa posição para que o equipamento realize leituras de pressão corretamente.

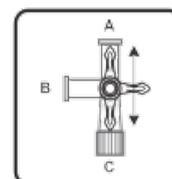

8- Utilizando a tecla Function  conforme instruções do manual (pág. 06 e 07), selecione os parâmetros desejados na sequência: **Obj**, **Work**, **Rest**, **Time** e a **Escala de Pressão**.

*Quando estiver em cada um dos parâmetros, seu LED correspondente irá acender, se atentar a eles na escala, e se orientar pelas páginas **06** e **07** do manual.

9- Pressione agora a tecla  **Start/Stop** para executar a terapia programada. Para se interromper a terapia à qualquer instante, deve-se pressionar novamente a tecla **Start/Stop**. Se escolhido um **Objetivo**, este começará a piscar num ritmo constante.

10- Deve-se agora pressionar a tecla **Zero**  para que somente o primeiro LED da escala de pressão permaneça aceso (algumas vezes pode ser necessário pressionar a tecla **Zero** novamente para certificar o ajuste de tara).

11- Solicite ao paciente que execute uma contração nos músculos do períneo até que os LEDs da escala atinjam o LED escolhido como **Objetivo** (o qual passará a piscar intensamente neste instante). O Perina registrará o atingido pelo paciente.

12- No instante que o LED **Rest** começar a piscar, deve-se instruir o paciente a relaxar a musculatura. O LED **Rest** cessará e novamente o paciente deverá produzir a força necessária para atingir o **Objetivo**. Este ciclo se repete até que o tempo de terapia programado (**TIME**) se esgote.

13- Ao final da sessão, desligar o equipamento no botão **Liga/Desliga**, esvaziar a sonda e, em seguida,

extraí-la com cuidado do paciente, evitando puxá-la diretamente pela mangueira.


Sondas: Deve ser usado lubrificante na introdução. Recomenda-se o uso de **Gel Lubrificante Certificado**. **Atenção:** Antes da primeira utilização, verifique se a sonda está apta para uso:

- Acople a sonda na mangueira do insuflador.
- Aperte a pêra apenas uma vez deixando a sonda como na foto 01 (Anal/Vaginal) ou 04 (Anal), sendo o formato recomendado para uso.
- Se a sonda for demasiadamente inflada, como nas fotos 02, 03 e 05, a mesma apresentará deformidades por estar excessivamente inflada.
- Deve-se, então, esvaziar a sonda até que a mesma fique como na foto 01 ou 04.


A Sonda deve ser inflada de maneira que fique rígida para ter contato com a parede anal/vaginal. Se for muito inflada, ela vai se deformar.

Pequenas deformações são toleráveis, pois a mesma se adapta a parede anal/vaginal.

Sonda Anal/Vaginal

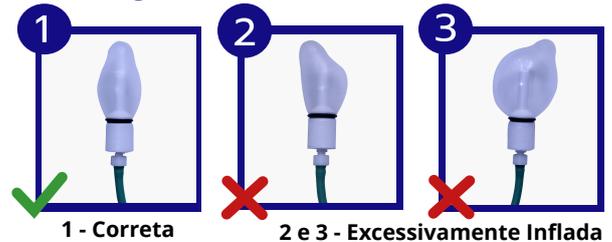

Sonda Anal

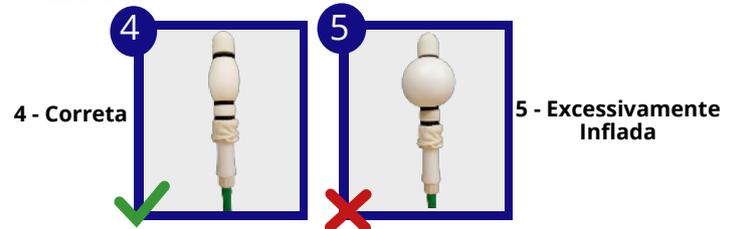

Fabricante: Quark Produtos Médicos
Razão Social: Mendes e Barbosa Produtos Médicos

Indústria Brasileira -
CNPJ: 71.769.673/0001-59
Número ANVISA: 80079190005

Rua do Rosário, 1776 - Centro - Piracicaba/SP
CEP: 13.400-186 | Fone: (19) 2105-2800

www.quarkmedical.com.br
quark@quarkmedical.com.br