



Tornozeleira Longa

A Tornozeleira Longa Hidrolight oferece compressão em torno do tornozelo, melhorando a sensação de estabilidade da articulação. Retém o calor devido ao material neoprene, mantendo a região aquecida auxiliando no alívio da dor.

Indicações

Prevenção de entorses e contusões, instabilidade articular e ligamentar, tornozelo fraco ou lesionado. Indicado após retirada do gesso. Indicada para a prática de atividades físicas, pois melhora a estabilidade e firmeza do pé, evitando torções.

Precauções

O produto não apresenta contra-indicação, desde que sejam obedecidas as instruções de utilização e finalidade ao qual o mesmo se destina. Caso haja algum malefício físico causado pelo uso do produto, suspenda-o e contate imediatamente seu médico.

Não utilize o produto durante o sono. Evite o uso sobre a pele lesionada, ferida ou alérgica. Antes de utilizar o produto, ler atentamente as precauções e instruções de uso.

Composição

Borracha de cloropreno revestida com tecido 100% poliamida.

Instruções de lavagem

Lavagem normal até 30°C. Não alvejar. Não secar em tambor rotativo. Não passar a ferro e/ou não vaporizar. Não limpar a seco. É recomendado que o produto seja lavado pelo menos uma vez ao dia. Quando não estiver em uso, conservar ao abrigo do calor, luz e umidade.

Como ajustar

Puxe a Tornozeleira pelo pé até a junção do tornozelo, mantendo o calcanhar encaixado na abertura. Posicione de modo que fique confortável e permita a movimentação.

Tamanho e referência do produto

Vide código de barras.

Garantia contra defeito de fabricação

3 meses após a compra, com apresentação da nota fiscal de venda ao consumidor. Excluindo-se os casos de uso inadequado do produto.

Apresentação comercial

Os PROTETORES DA LINHA ORTOPÉDICA, são fornecidos NÃO-ESTÉREIS, em uma embalagem de PVC.

Prazo de validade

Indeterminado.

Responsável técnico

Nicolly S. Rodrigues
CREFITO: 122326-F

Autorização ANVISA

8.07.582-1

Registro ANVISA do produto

1 80758210002

Nº de Lote

Conheça também



Protetor para
Punho



Joelheira
Articulada

Hidrolight do Brasil

CNPJ: 08.762.826/0001-08
Indústria Brasileira

Rodovia dos Açores, 1150
Garopaba/SC - Brasil
Fone: 055 48 3254.3337
www.hidrolight.com.br
hidrolight@hidrolight.com.br