


Manual do equipamento

Mesa de RPG

cod.: PA00392A

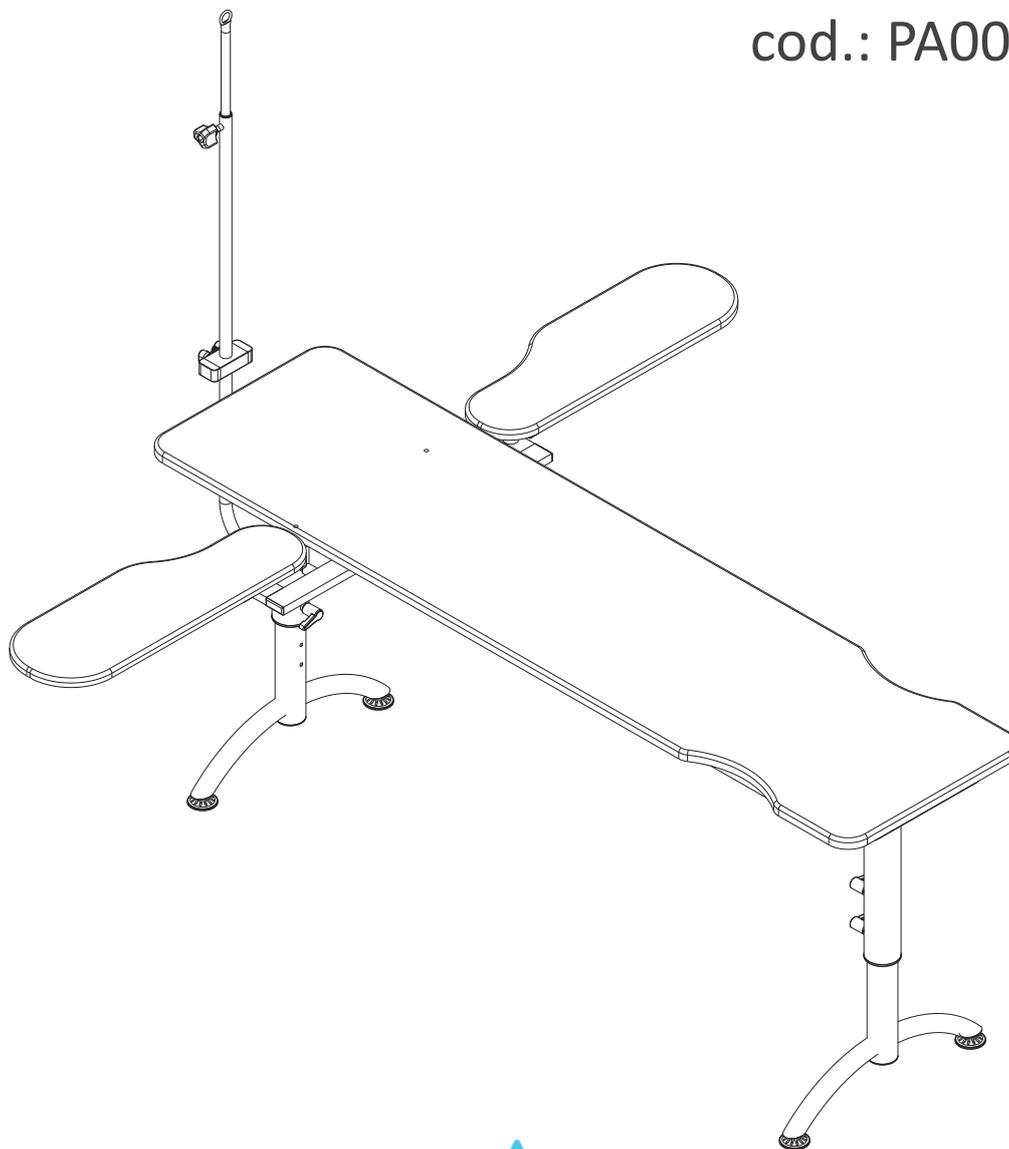

**ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA.**

R. Antônio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II
CEP: 85825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná - Brasil
CNPJ: 01.417.367/0001-78

AFE: 802844-5

Responsável Técnico: Dr. Alex Fernando Zani
Crefito: 8/8409 - F

Sumário

Descrição do equipamento.....	02
Informações técnicas.....	02
Indicações de uso.....	02
Advertências, Precauções e Cuidados especiais.....	03
Armazenamento e Transporte.....	04
Formas de apresentação do produto médico.....	05
Preparação para montagem.....	05
Kit Cliente.....	06
Componentes.....	06
Montagem.....	07
Regulagem.....	10
Termo de garantia.....	11
Certificado de garantia.....	12

Este manual contém informações essenciais para a utilização do seu equipamento. Leia-o atentamente antes de iniciar sua instalação e operação. Preserve e mantenha-o para consultas futuras.

Descrição do equipamento

A **Mesa de RPG Simples** foi desenvolvido a partir de conceitos modernos, fabricado em aço carbono, possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização.

Informações Técnicas

Comprimento: 2012mm

Largura braços fechados: 1044 mm

Largura braços abertos: 2007 mm

Altura mínima do estofado :670mm

Altura máxima do estofado: 885mm

Comprimento da embalagem: 2060 mm

Largura da embalagem: 605 mm

Altura da embalagem: 210 mm

Peso do produto: 41kg

Peso da embalagem: 49,95

Peso máximo suportado: 135 kg

Estrutura: Aço carbono 1020

Pintura da estrutura: Epóxi.



135 Kg

Peso máximo suportado.



41 kg

Peso do produto.

Indicações de uso

Mesa utilizada para execução de técnicas de reeducação postural global. Acompanha duas braçadeiras para posições com os braços abertos estimulando cadeia muscular anterior, haste removível com sistema de polias para posicionar paciente em posição de alongamento da cadeia posterior, um par de alça de pés. A altura desta mesa pode ser regulada manualmente de acordo com a necessidade do profissional.

Advertências, Precauções e Cuidados especiais.

Advertências/Precauções

- Não deve ser molhado ou exposto em lugares úmidos
- Antes do uso colocar em uma superfície nivelada


Cuidados especiais

Não exceder a carga máxima permitida (135 Kg).

Limpeza:

A sua limpeza deve ser feita diariamente apenas com panos levemente umedecido com água.

Para melhor conservação, o produto deve ter seus fixadores (parafusos) apertados periodicamente, sobre a metodologia de manutenção preventiva de equipamentos, é recomendado avaliar a estrutura do equipamento mensalmente.

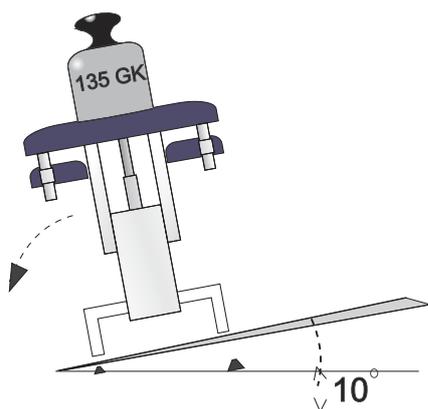

AVISO

Este equipamento possui estabilidade mecânica restrita, condicionando-o um ângulo de inclinação não superior a 10 graus.

Armazenamento e transporte

O armazenamento das embalagens deve ser em local fresco e arejado protegido de ações climáticas ofensivas (sol, chuvas, ventos e altas temperaturas), com um empilhamento máximo de cinco caixas idênticas.

SIMBOLOGIA NA EMBALAGEM



ESTE LADO PARA CIMA

Indica a posição correta para transporte da embalagem



FRÁGIL

O conteúdo nesta embalagem é frágil e deve ser transportado com cuidado.



EMPILHAMENTO MÁXIMO.

Número máximo de embalagens idênticas que podem ser empilhadas uma sobre as outras, número limite de 5 unidades.



LIMITES DE TEMPERATURA.

Indica as temperaturas limites para transporte e armazenagem da embalagem, sendo o limite inferior de 5°C e o superior de 50°C.




NÃO EXPOR AO SOL.

As embalagens devem ser armazenadas em local fresco e arejado, protegido de ações climáticas ofensivas.



MANTENHA LONGE DA CHUVA

A embalagem não deve ser transportada na chuva.

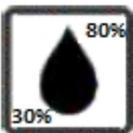

UMIDADE RELATIVA.



Indica a umidade relativa do ambiente para transporte e armazenagem, sendo entre 30% e 80%.

Acima estão os símbolos de indicação de segurança ao produto quanto a armazenagem, ações climáticas e transporte.

Formas de apresentação do produto médico

O produto é enviado embalado em plástico bolha e acomodado em caixa resistente a fim de chegar ao cliente final de forma segura. Dentro de sua embalagem acompanha o manual do equipamento e ferramentas para montagem.

Preparação para Montagem

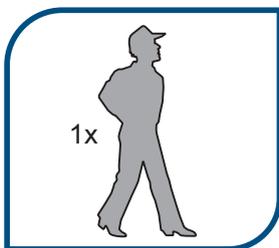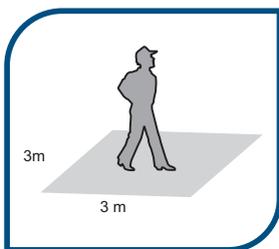

FERRAMENTAS

A ARKTUS disponibiliza as principais ferramentas necessárias para realizar a montagem do seu equipamento. Certifique-se de tê-las à mão antes de iniciar a montagem

PESSOAS

ATENÇÃO: É necessário uma pessoa para realizar a montagem do equipamento.

CUIDADOS

Durante a montagem deve-se seguir corretamente as orientações neste manual. O equipamento está sujeito a danos durante este processo, portanto, tenha cautela ao lidar com componentes e ferramentas.

O equipamento deverá ser instalado e utilizado em ambiente apropriado, devem ser respeitadas as seguintes características na área de instalação do equipamento:

- Nivelamento adequado e estabilidade na superfície de uso;
- Baixa umidade;
- Proteção contra incidência de raios solares;

Em caso de dúvidas ou dificuldades entre em contato com a nossa Assistência Técnica Arktus.

TEMPO DE MONTAGEM

Seguindo as orientações contidas neste manual estima-se um tempo de 3 minutos para a montagem.


Kit cliente

Parafuso sextavado interno 1/4"x43mm
cab. 13
Qtd.: 04




A

Corda para tração
Qtd.: 01

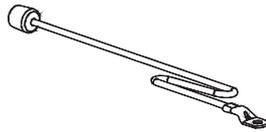


B

Cinta para os pés
Qtd.: 02

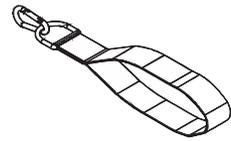


C

Parafuso sext. aço carb. 3/8"x5/8"
Qtd.: 08

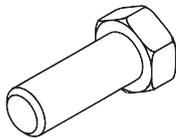


D

Manipulo Easy lock
Qtd.: 04

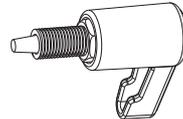


E

Chave de boca estrela
9/16" x 1/2"
Qtd.: 01

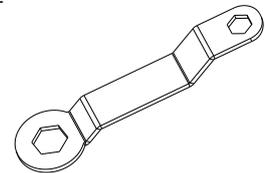

F

Velcro para os braços
Qtd.: 04

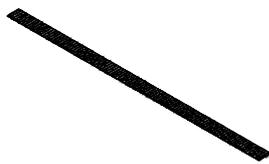

G


Chave allen
Qtd.: 01



H


Componentes

Braço direito
Qtd.: 01

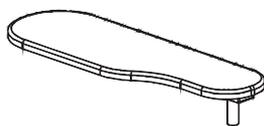

01

Braço Esquerdo
Qtd.: 01

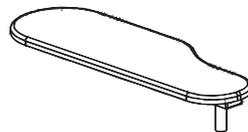


02

Estofado
Qtd.: 01




03

Barra inóx
Qtd.: 01

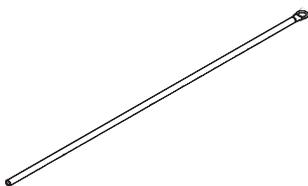


04

Haste de fixação
Qtd.: 01

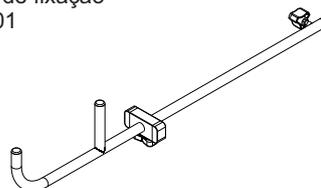

05


Carrinho de exercícios
Qtd.: 01

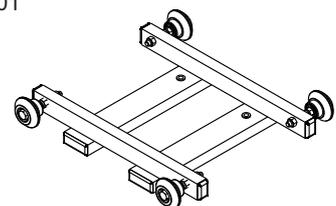

06


Componentes

Suporte para os braços
Qtd.: 01

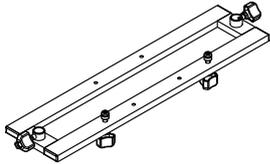


07

Pé com regulagens
Qtd.: 01

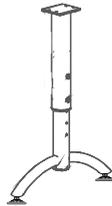

08


Pé com regulagens e suporte
Qtd.: 01

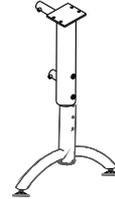


09

Montagem

01

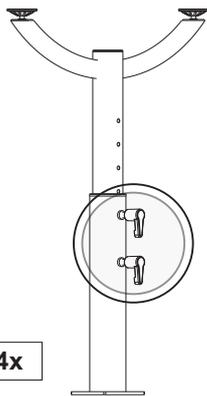


E - 04x

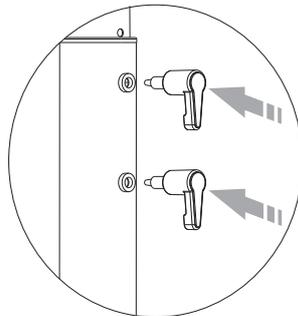


01 - Afrouxe o manipulador, e puxe-o
02 - Regule o pé na altura desejada
03 - Aperte o manipulador novamente

Antes de iniciar a montagem regular os pés na altura desejada (01) e regule as sapatas com rosca (02).
- Proporciona ao profissional ajustar na altura ideal a ser utilizada, pois possui cinco alturas diferentes de 5 em 5cm.
- Composta com 4 manipuladores proporcionando uma estabilização perfeita dos pés

02

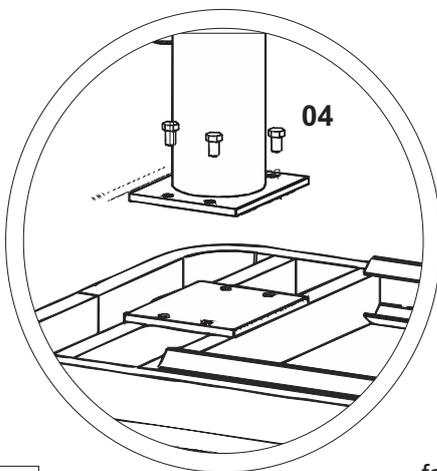


D - 08x

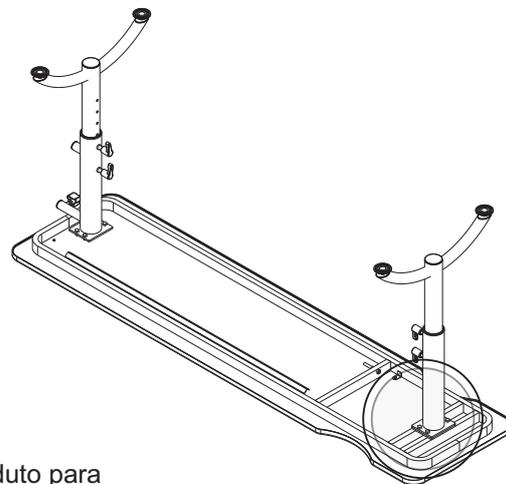


Virar o produto para facilitar a montagem da base

Montagem



03

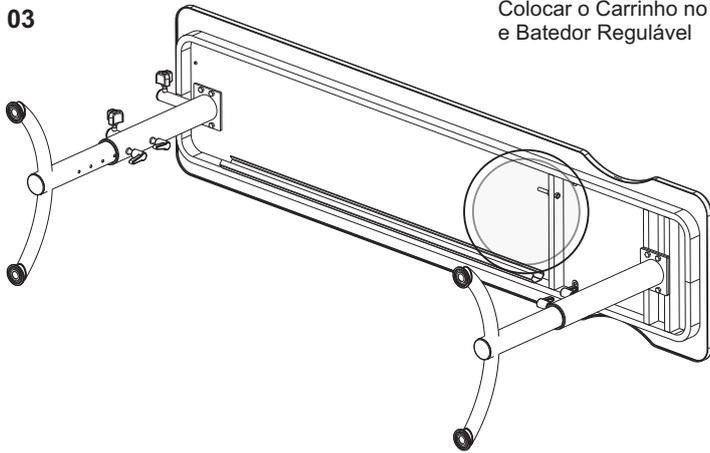



Colocar o Carrinho no trilho e Batedor Regulável

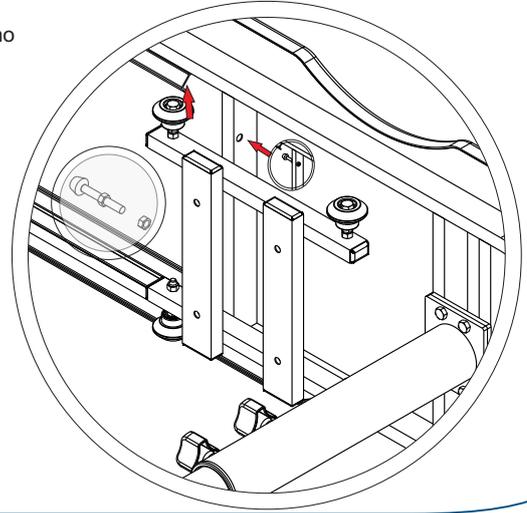

04

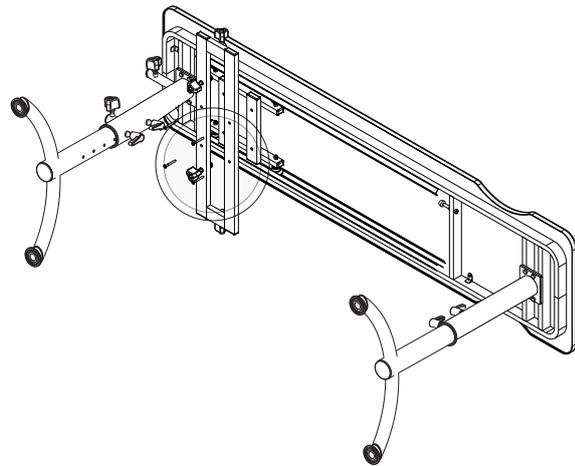
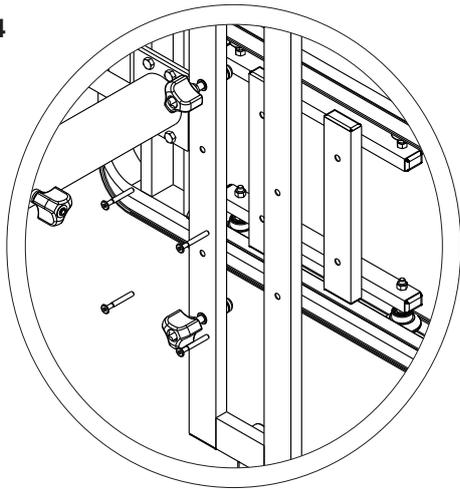


05

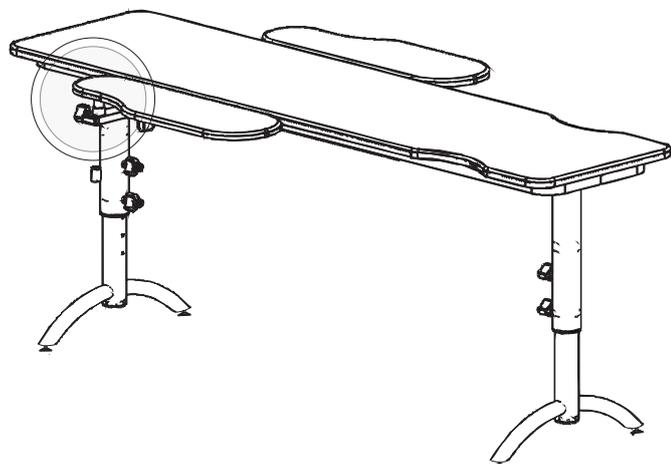
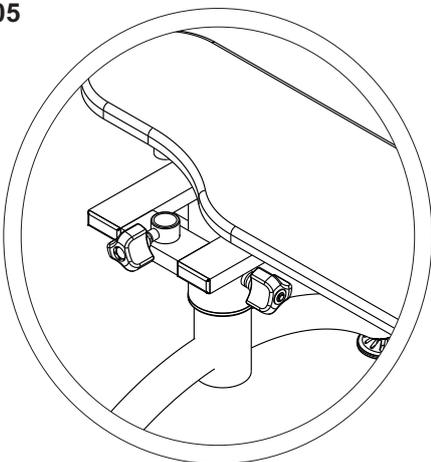


Montagem






06

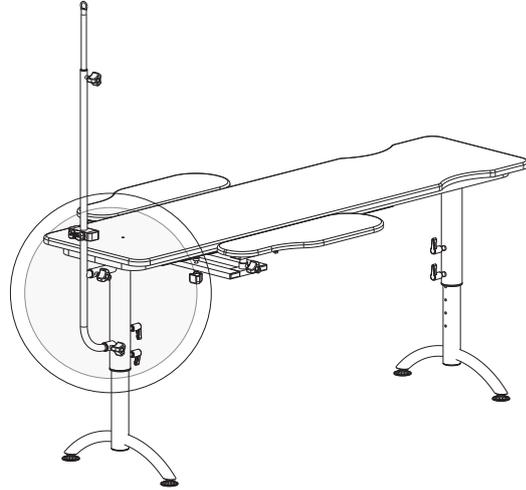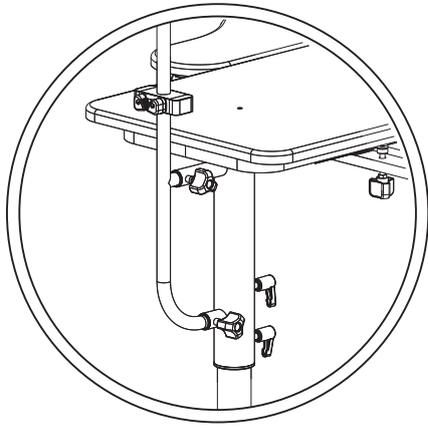

07

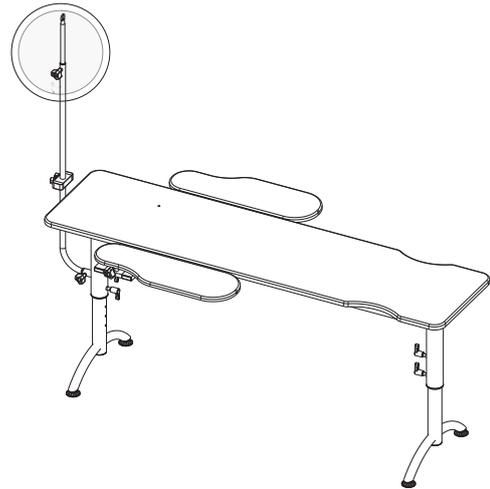
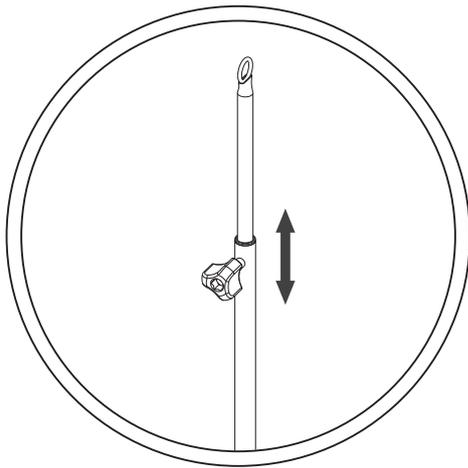


08

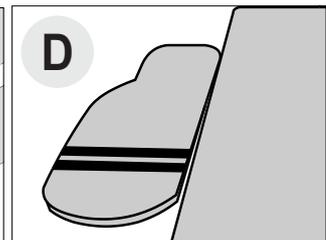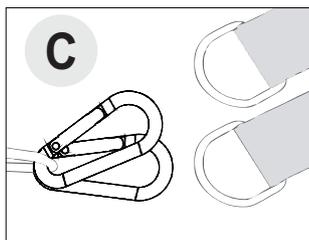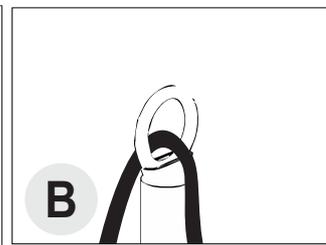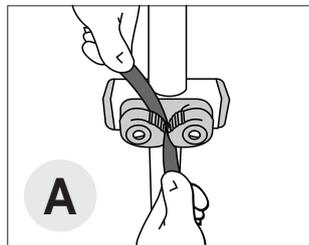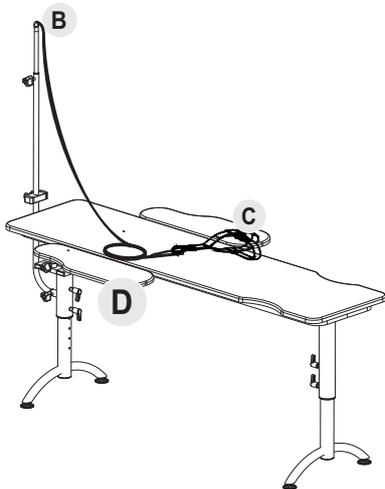

Regulagem

09

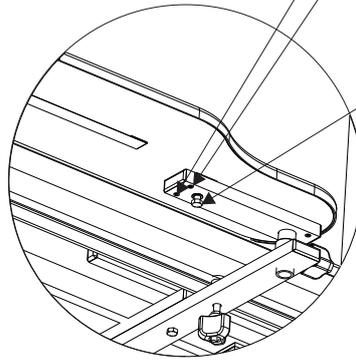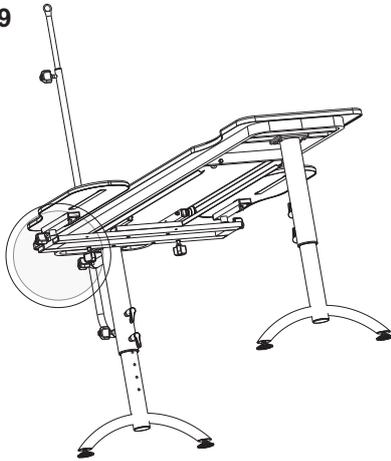

Soltar os parafusos philips e em seguida efetuar a regulagem utilizando o Parafuso de Regulagem.

Parafuso de Regulagem.

F





*




*chave fenda não inclusa

Regulagem dos Braços

10

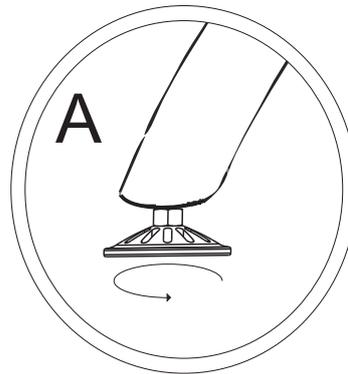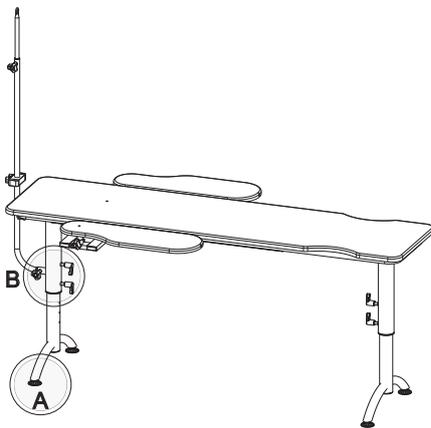


Sapata com regulagem

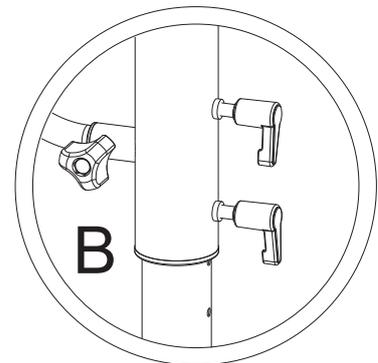

Regulagem de Altura

11

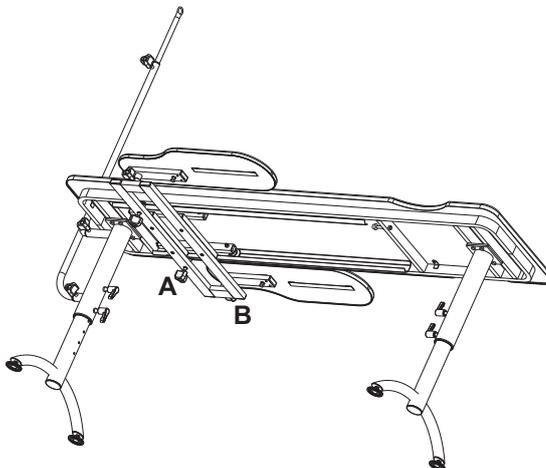

A - Regulagem do freio do carrinho
B - Regulagem de trava dos braços

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelos prazos constantes no Quadro “PRAZOS DE GARANTIA”, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda e limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes do produto, nos termos discriminados nas condições abaixo e cujo exame realizado por profissionais da empresa constate, satisfatoriamente, a existência do alegado defeito de material ou manufatura.

PRAZO DE GARANTIA		
03 (três) MESES	06 (seis) MESES	12 (doze) MESES
Cordas; Courvin; Acessórios; Adesivos; Borracha.	Peças e partes plásticas; Espumas; Colagens sintéticas (Emborrachados).	Pintura epóxi (não cobre danos provocados por impactos, atritos e/ou arranhões); Parafusos e elementos de fixação; Estrutura metálica.

A garantia é válida somente para defeitos de fabricação e não contempla:

- ☒ Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto através do Manual do produto, ou seja, uso inadequado do equipamento que não seja a prática de exercícios por pessoas habilitadas.
- ☒ Desgaste no acabamento, partes e/ou peças, ocorrido por uso intenso, lubrificação inadequada, uso de substâncias (lubrificantes, produtos de limpeza, etc.) não indicadas no Manual, oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza e/ou a exposição a condições adversas como intempéries, umidade, maresia, frio e calor intensos.
- ☒ Danos causados durante o transporte e montagem em desacordo com o Manual ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto ou uso de peças e ferramentas não especificadas no Manual.
- ☒ Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, etc.
- ☒ Danos causados por serviços de conserto realizados por terceiros não autorizado pela *Arktus*.
- ☒ Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza.
- ☒ Caso não seja seguida as orientações, recomendações, cuidados e especificações apresentadas no Manual quanto à sua utilização, inspeções antes de cada uso e manutenções preventivas do produto, não sendo estes custos cobertos pela *Arktus*.
- ☒ Despesas com a instalação do equipamento, peças e/ou acessórios por pessoas ou empresas não autorizadas pela *Arktus*. Despesas e/ou serviços de limpeza e manutenção do equipamento não autorizadas pela *Arktus*.
- ☒ Taxa de visita técnica (inspeção e diagnóstico) determinando que a falha tenha sido causada por motivo não coberto por esta garantia.

Ocasiona a perda da garantia:

- ☒ Utilização do produto em ambiente úmido e/ou expostos à maresia;
- ☒ Montagem e utilização do produto sem seguir as orientações contidas no Manual;
- ☒ Utilização de acessórios que não sejam originais do equipamento;
- ☒ Uso de peças por outras não originais ou não autorizadas pela *Arktus*;
- ☒ Adulteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

ATENÇÃO:

- ☒ O conserto e/ou substituição do produto com defeito não prorroga o prazo de garantia.
- ☒ A recepção dos produtos mediante a transportadora deve ser acompanhada com seriedade pelo cliente, pois produtos danificados durante o transporte deverão ser questionados ao transportador no ato da entrega.
- ☒ Em caso de dúvidas, para esclarecimentos adicionais e/ou reclamações de defeitos observados durante o prazo de garantia referente ao equipamento deverão ser efetivadas diretamente ao Núcleo de Atendimento e Qualidade (NAQ), através do telefone 0800 200 8022 ou e-mail qualidade@arktus.com.br e serão atendidas mediante:
 - ✓ Identificação do cliente (CPF) e/ou empresa (CNPJ);
 - ✓ Número de identificação do respectivo documento fiscal de venda caso seja referente algum defeito reclamado. (Sugerimos o envio de fotos e/ou vídeos relativos ao defeito reclamado para facilitar a emissão do laudo, o que tornará o seu atendimento ainda mais rápido.)
- ☒ As despesas de frete são de responsabilidade do fabricante somente nos primeiros 90 (noventa) dias, após este prazo serão de responsabilidade do solicitante.
- ☒ A *Arktus* reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.
- ☒ Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados em território brasileiro, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra. Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao documento fiscal e Manual em local de fácil acesso.

Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do Cliente: _____

Endereço: _____

Complemento: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

UF: _____ CEP: _____

Data da Compra: ____/____/____ Nota Fiscal (n°): _____

N° de Série: _____ N° Lote: _____

Equipamento: _____

Obs.: _____



 0800 70 70 010

www.arktus.com.br