

# CIRCUITO DE CPAP MAKE LINE

## Respiração com Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas

### INDICAÇÕES

Pacientes em respiração espontânea em UTI, Pronto Atendimento e Ambulatórios, tendo como finalidade geral alto fluxo contínuo de FiO<sub>2</sub>, com resistência na fase expiratória. É amplamente usado para saturação de oxigênio arterial baixa e na prevenção de atelectasias. O CPAP também é efetivo para desmame de ventilação mecânica e tratamento da Síndrome da Angústia Respiratória Aguda - SARA.

### INSTRUÇÕES DE USO

1. Certifique-se de que o paciente esteja em respiração espontânea e orientado.
2. Escolha a máscara mais adequada para o paciente. Dependendo das características faciais, uma máscara menor ou maior pode proporcionar um melhor encaixe.
3. Infele a máscara.
4. Fixe a máscara à face do paciente com o auxílio do fixador cefálico.
5. Conecte a traqueia ao orifício superior da máscara. Em alguns modelos é necessário utilizar o conector de adaptação.
6. Conecte a válvula de PEEP ao orifício inferior da máscara.
7. Conecte a traqueia ao gerador de fluxo e este à rede de Oxigênio.
8. Um Fisioterapeuta deve monitorar toda a terapia.

### PRECAUÇÕES

- Observe se as peças estão em perfeitas condições e verifique seu correto funcionamento.
- Não deve haver escape entre a máscara e a face do paciente.
- Mantenha sempre o produto limpo e em bom estado de conservação.
- Não utilize produtos químicos para limpeza.
- O uso seguro e eficaz desse produto depende do correto cumprimento das instruções de uso e do conhecimento do profissional de saúde.

### CONTRA-INDICAÇÕES

Não administrar em paciente com fratura facial extensa, trauma laríngeo, anastomose esofageal ou traqueal extensa, sangramento gastrointestinal, fratura da base do crânio ou risco de vômito.

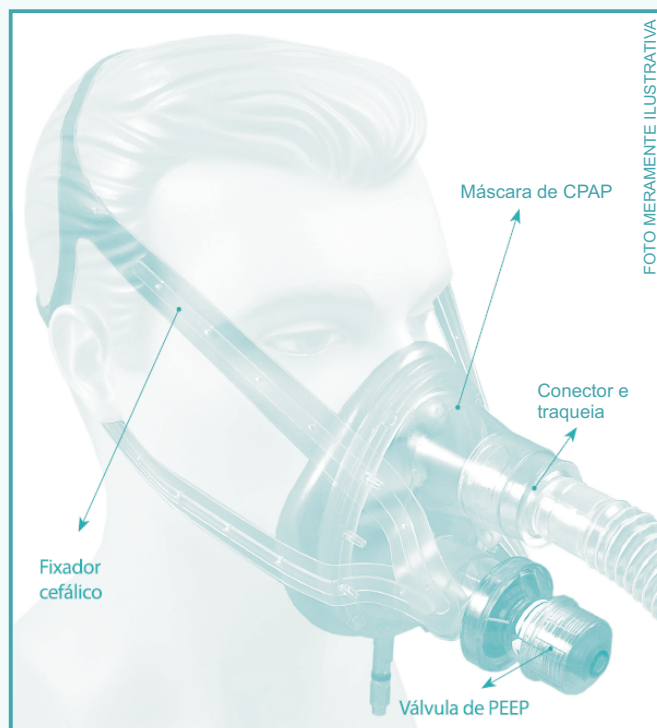


FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA

VERSÃO 6

Fabricante: Make Line Comercial Ltda

Av. Nova Independência, 755 - São Paulo/SP - 04570-001  
qualidade@makeline.com.br - www.makeline.com.br

Resp. Técnica: Márcia Barros de Moura - CREFITO 3/173008-F

REGISTRO ANVISA: 80171530026

Comercializado com exclusividade por



Newmed Produtos para Saúde Ltda  
Rua Santa Cruz, 2209 - São Paulo / SP - 04121-002  
Tel.: (11) 5060 3030 - Fax: (11) 5062 8283  
www.newmed.com.br - newmed@newmed.com.br

Validade Indeterminada  
**CONTÉM 1 UNIDADE**

**ARMAZENAR EM LOCAL SECO E AO ABRIGO DO SOL**  
**FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO**  
**PRODUTO NÃO ESTÉRIL - ADVERTÊNCIA: NÃO ESTERILIZAR**