


Parabéns por ter adquirido o estetoscópio Bioland, um produto de alta qualidade e confiabilidade. Leia as instruções abaixo para ter o máximo proveito deste produto.

### Componentes do Produto

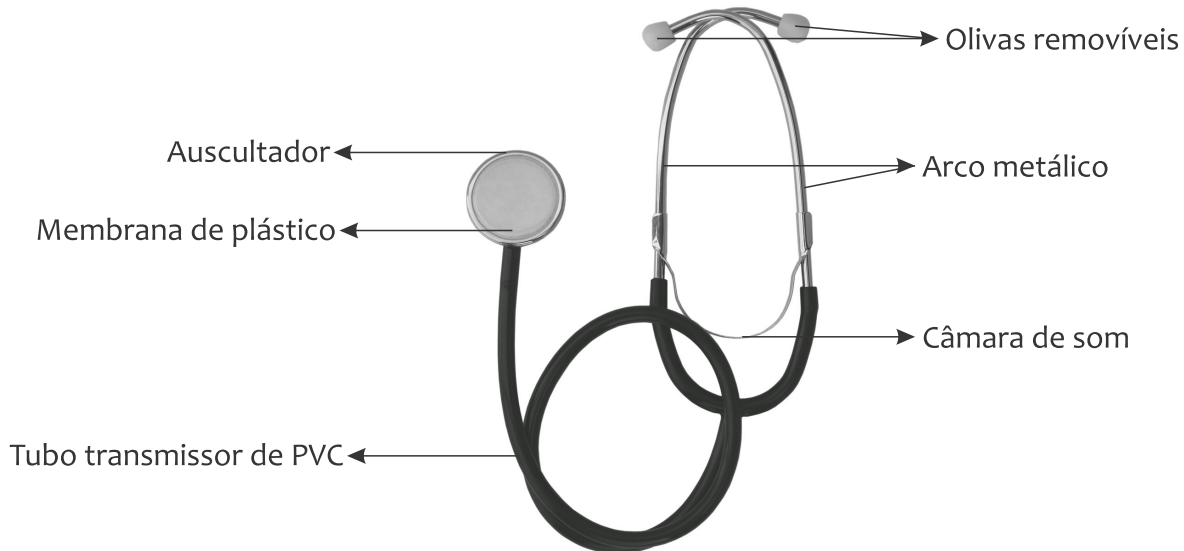

### Indicação de Uso

O estetoscópio Bioland é recomendado para a ausculta não invasiva dos ruídos cardíacos, respiratórios, pulmonares, arteriais, articulares, entre outros. Este produto é ideal para uso clínico.

### Modo de Utilização

- Posicione as olivas nos condutos auditivos, isolando qualquer ruído externo;
- Coloque em contato o diafragma na área ao qual será analisada;

**Atenção:** Caso o estetoscópio não esteja emitindo nenhum som, gire o auscultador em 180° para ativar o diafragma.

Quando o diafragma é exposto à vibrações, ele transmite as ondas acústicas pelo tubo de PVC (material que isola estas ondas de influência externa). Estes sons chegam aos tubos metálicos que fixam as olivas auriculares.

### Limpeza

Após a utilização deste produto, recomenda-se a limpeza das olivas com um líquido anti-séptico ou desinfetante neutro. **Importante:** Não utilize nenhuma forma de esterilização térmica. Produtos como álcool, benzina, tiner danificará o diafragma.

### Armazenamento e Transporte

Mantenha o estetoscópio em local arejado e seco. Não exponha ao sol e verifique as faixas de temperatura recomendadas.

Temperatura: 0°C à 50°C

Umidade relativa do ar máxima: 95%

**Versões do Produto**

Este produto possui as seguintes apresentações: Estetoscópio simples adulto (Modelo E100), estetoscópio simples pediátrico (Modelo E101), estetoscópio neo-natal (Modelo E102) e estetoscópio duplo (Modelo E100D - este produto é oferecido em diversas cores).

**Termo de Garantia**

- 1) A Controller Comércio e Serviços Ltda. garante um ano a partir da data da compra original contra defeitos de fabricação, com a comprovação da nota fiscal de compra. Falhas no estetoscópio devido a utilização inadequada ou em desacordo com as instruções de uso não estão cobertas por esta garantia.
- 2) Peças sujeitas a desgaste por utilização (olivas e diafragma) possuem garantia de 90 (noventa) dias. A garantia de 1 ano não se aplica para estas partes.
- 3) Não desmonte o aparelho de pressão digital de pulso, pois isso cancelará a garantia e fará com que o produto possa exibir falsos resultados.
- 4) Se a Controller Comércio e Serviços Ltda. receber notificação de algum defeito durante o período de garantia, ela poderá, a seu critério, consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente.
- 5) Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da Controller Comércio e Serviços Ltda. para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago a Controller Comércio e Serviços Ltda. ou ao canal de venda autorizado.

**Importador:****Controller Comércio e Serviços Ltda**

Av. das Universidades, 325 - Pedra Branca - Palhoça - SC - CEP 88137-315

CNPJ: 78.515.210/0001-00

Telefones: (11) 4063-0023 - (31) 4063-9244 - (48) 3248-2828

**E-mail:** [sac@controller-sc.com.br](mailto:sac@controller-sc.com.br)

**Site:** [www.biolandbrasil.com.br](http://www.biolandbrasil.com.br)

**Fabricante:** WENZHOU KANGSHUN MEDICAL DEVICE CO.,LTD

**País de Fabricação:** República Popular da China

**Responsável Técnico:** Diógenes Borges - CRF: SC 1.117

**Registro da ANVISA:** 10410130021