


manual do equipamento

INFRAVERMELHO COM PEDESTAL SEM LÂMPADA

cod.: PA00662A

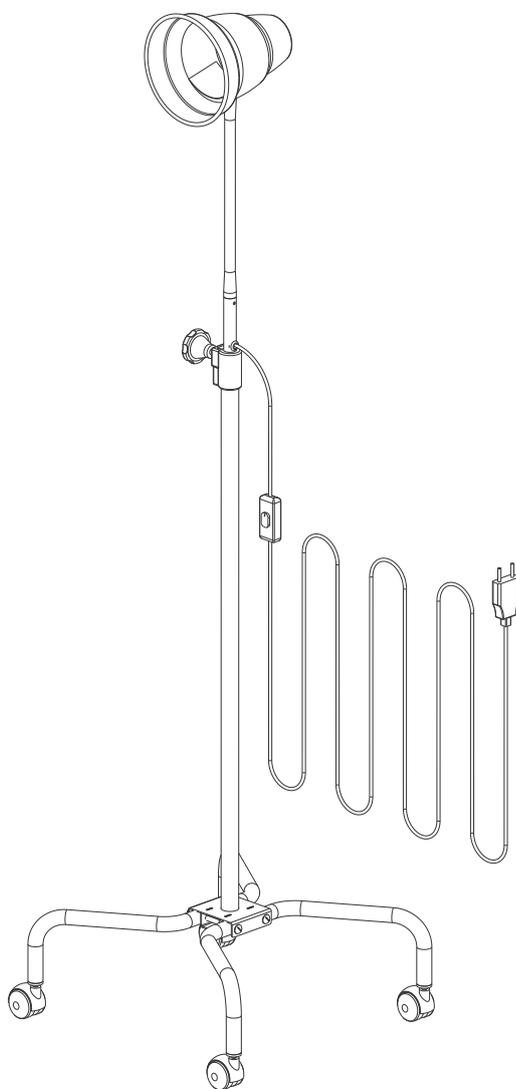

**ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA.**

R. Antônio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II
CEP: 85825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná - Brasil
CNPJ: 01.417.367/0001-78

AFE: 802844-5

Responsável Técnico: Dr. Alex Fernando Zani
Crefito: 8/8409 - F

Sumário

| | |
|--|----------|
| Descrição do equipamento..... | 02 |
| Informações técnicas..... | 02 |
| Indicações de uso..... | 02 |
| Advertências, Precauções e Cuidados especiais..... | 03 |
| Armazenamento e transporte..... | 03 |
| Formas de apresentação do produto médico..... | 04 |
| Preparação para montagem..... | 04 |
| Lista de componentes..... | 05 |
| Montagem..... | 06/07/08 |
| Termo de garantia..... | 09 |
| Certificado de garantia..... | 10 |

Este manual contém informações essenciais para a utilização do seu equipamento. Leia-o atentamente antes de iniciar sua instalação e operação. Preserve e mantenha-o para consultas futuras.

Descrição do equipamento

O suporte pedestal de Infravermelho foi desenvolvido à partir de conceitos modernos, fabricado em aço carbono. Possui alta resistência e estabilidade, garantindo assim um produto de excelente qualidade e durabilidade, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na sua utilização. As lâmpadas de infravermelho, incandescentes são às vezes chamadas de geradores de “calor radiante”, indicando que o aquecimento é realizado por radiação infravermelha e visível. É ideal para termoterapia e fototerapia, auxiliando no alívio da dor, aumento da irrigação sanguínea, promovendo a flexibilidade do tecido, dentre outros efeitos terapêuticos. Lâmpada não acompanha o suporte.

Informações Técnicas

| | |
|-------------------------|--|
| Largura: | 0,45 m |
| Comprimento: | 0,40 m |
| Altura máx.: | 1,8 m |
| Altura min.: | 1,4 m |
| Peso do produto: | xxxxkg |
| Estrutura: | Aço carbono, alumínio, rodas de plástico e aço inox. |



xxxxKg
Peso do produto.

Tensão: 110 ou 220V (Definido pela lâmpada)
Regime de trabalho: 40 min lig. 10 min deslig.
Consumo de KW/H: 0,150 KW/h

Indicações de uso

Alívio de dor;
Redução do espasmo muscular;
Aumento da irrigação sanguínea;
Auxilia na melhora da amplitude de movimento articular;
Auxiliar a cinesioterapia;

Advertências, Precauções e Cuidados especiais.

Advertências/Precauções:

- Não deve ser molhado ou exposto em lugares úmidos.
- Antes do uso colocar em uma superfície nivelada.

ATENÇÃO
Não toque na Cúpula com Infra Vermelho ligado
Risco de queimadura

Cuidados especiais:

A sua limpeza deve ser feita diariamente apenas com panos levemente umedecido com água.

Para melhor conservação, o produto deve ter seus fixadores (parafusos) apertados periodicamente, sobre a metodologia de manutenção preventiva de equipamentos, é recomendado avaliar a estrutura do equipamento mensalmente.

Armazenamento e transporte

O armazenamento das embalagens deve ser em local fresco e arejado protegido de ações climáticas ofensivas (sol, chuvas, ventos e altas temperaturas), com um empilhamento máximo de cinco caixas idênticas.

SIMBOLOGIA NA EMBALAGEM



ESTE LADO PARA CIMA
Indica a posição correta para transporte da embalagem



FRÁGIL
O conteúdo nesta embalagem é frágil e deve ser transportado com cuidado.



EMPILHAMENTO MÁXIMO.
Número máximo de embalagens idênticas que podem ser empilhadas uma sobre as outras, número limite de 5 unidades.



LIMITES DE TEMPERATURA.
Indica as temperaturas limites para transporte e armazenagem da embalagem, sendo o limite inferior de 5°C e o superior de 50°C.



NÃO EXPOR AO SOL.
As embalagens devem ser armazenadas em local fresco e arejado, protegido de ações climáticas ofensivas.



MANTENHA LONGE DA CHUVA
A embalagem não deve ser transportada na chuva.






UMIDADE RELATIVA.
Indica a umidade relativa do ambiente para transporte e armazenagem, sendo entre 30% e 80%.

Acima estão os símbolos de indicação de segurança ao produto quanto a armazenagem, ações climáticas e transporte.

Formas de apresentação do produto médico

O produto é enviado desmontado, embalado em plástico bolha e acomodado em caixa resistente a fim de chegar ao cliente final de forma segura. Dentro de sua embalagem acompanha o manual do equipamento.

Preparação para Montagem

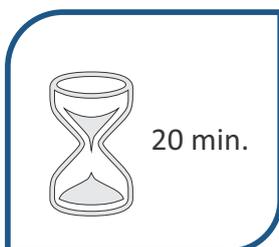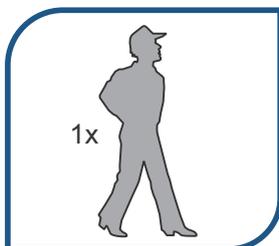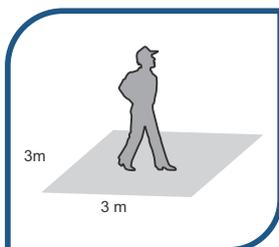

FERRAMENTAS

A ARKTUS disponibiliza todas as ferramentas necessárias para realizar a montagem do seu equipamento. Certifique-se de tê-las à mão antes de iniciar a montagem

PESSOAS

ATENÇÃO: É necessário uma pessoa para realizar a montagem do equipamento.

CUIDADOS

Durante a montagem deve-se seguir corretamente as orientações neste manual. O equipamento está sujeito a danos durante este processo, portanto, tenha cautela ao lidar com componentes e ferramentas.

O equipamento deverá ser instalado e utilizado em ambiente apropriado, devem ser respeitadas as seguintes características na área de instalação do equipamento:

- Nivelamento adequado e estabilidade na superfície de uso;
- Baixa umidade;
- Proteção contra incidência de raios solares;


Em caso de dúvidas ou dificuldades entre em contato com a nossa Assistência Técnica Arktus.

TEMPO DE MONTAGEM

Seguindo as orientações contidas neste manual estima-se um tempo de 10 minutos para a montagem.


Lista de componentes

Haste superior
Qtde: 1

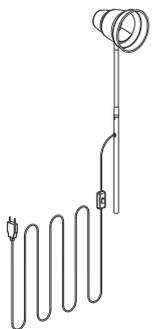


01

Haste inferior
Qtde: 1

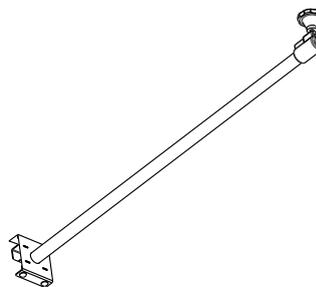

02


Base com rodízio
Qtde: 2

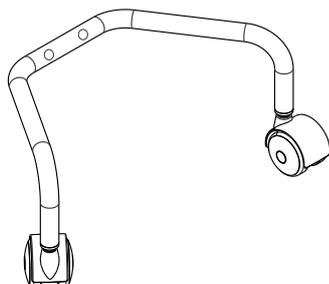

03


KIT PARA MONTAGEM

Porca auto travante rosca 1/4'
Qtde: 2

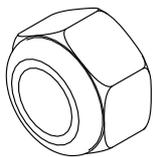


A

Parafuso fenda rosca 1/4
Qtde: 2

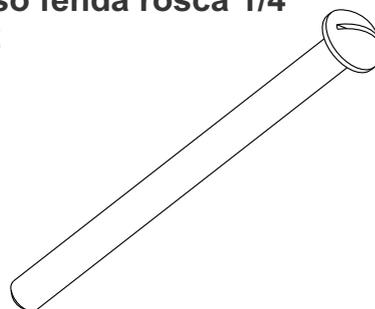

B

Vista explodida do produto

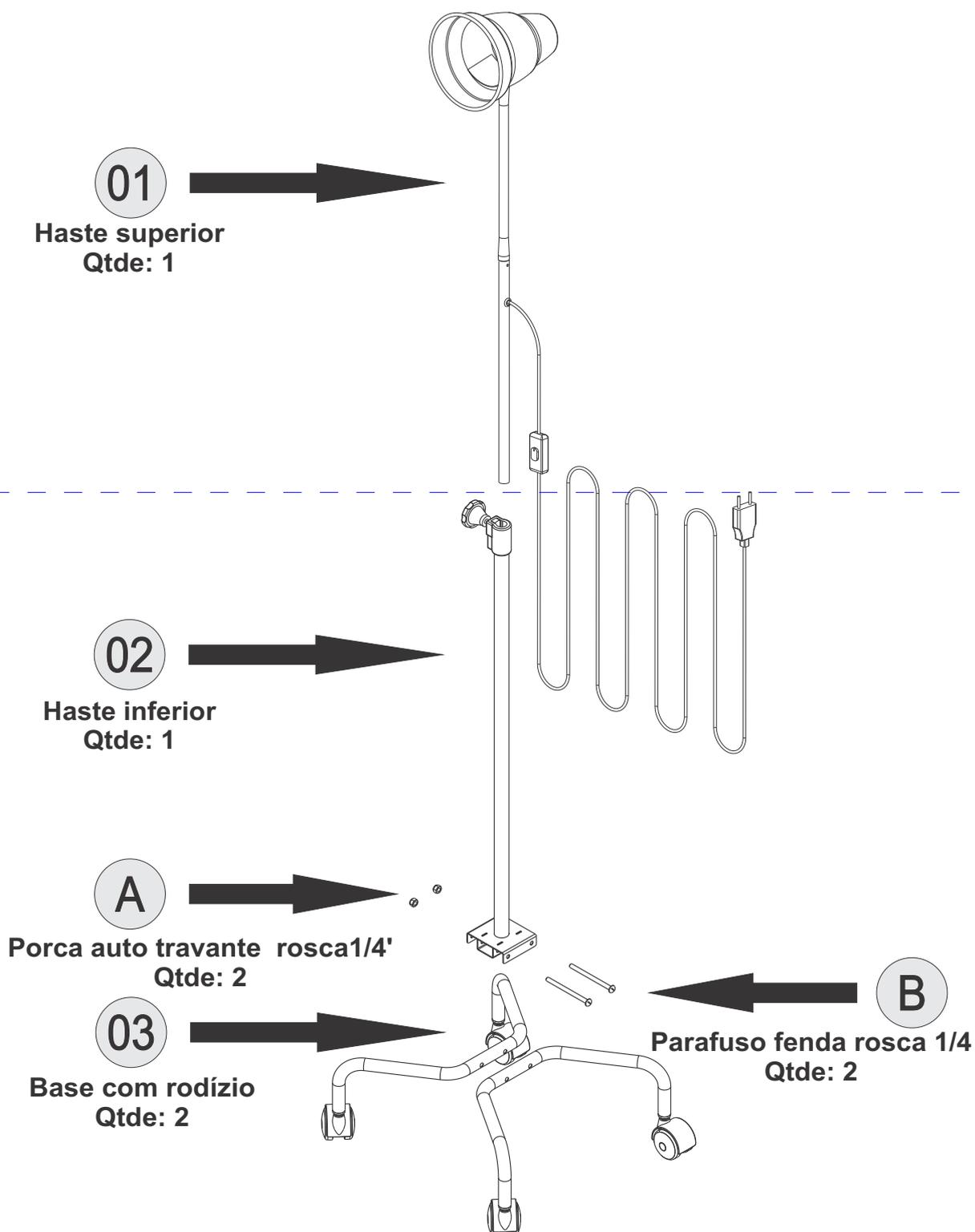


Montagem

Montagem da haste inferior.

Nesta etapa vamos montar a haste inferior utilizando os componentes 02 e 03 junto com os itens A e B do kit para montagem.


Observe na imagem abaixo como deve ser a disposição dos itens.

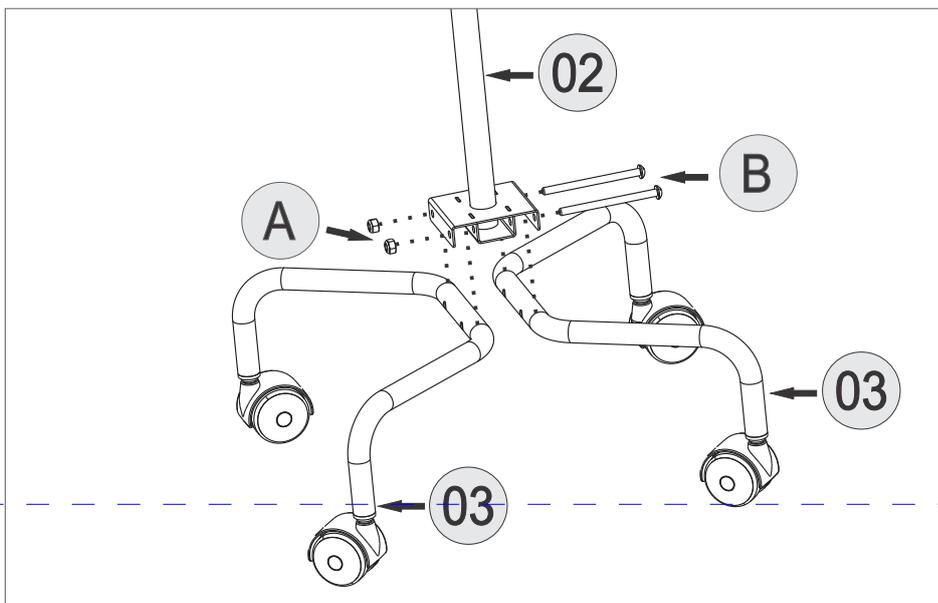

Montagem da haste inferior.

Após a montagem do conjunto certifique-se que os itens A e B estejam bem apertados.





Abaixo uma imagem ilustrativa do conjunto montado.

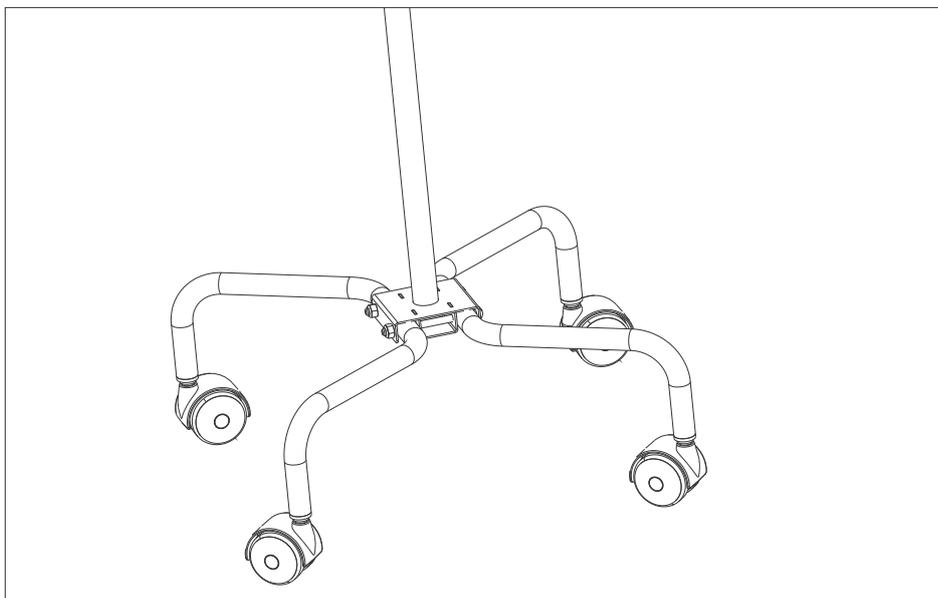

Montagem

Montagem da haste superior.

Nesta etapa vamos montar o conjunto superior utilizando a montagem anterior descrito na pag. 07. Introduza a haste superior através do dispositivo de regulagem conforme demonstrado na imagem abaixo.

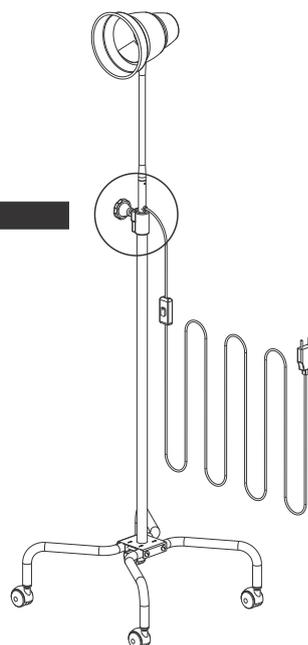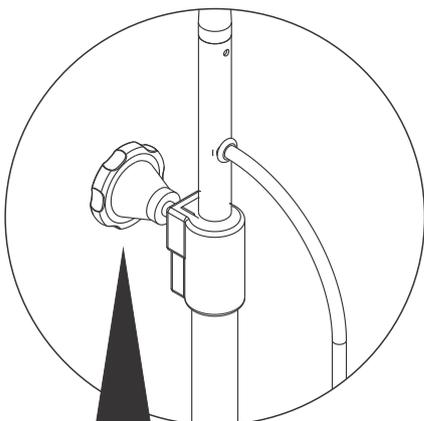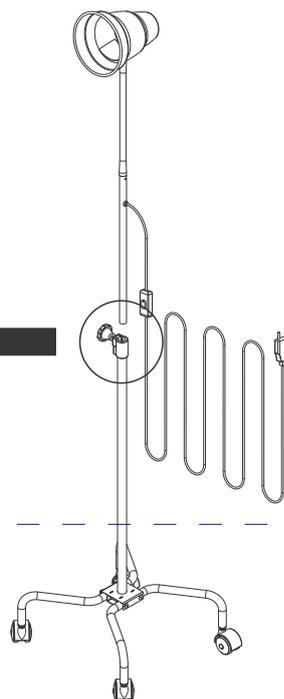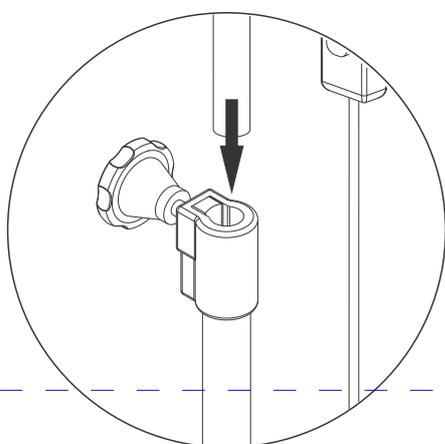

OBS: Após a montagem gire o manipulô e aperte o conjunto.

Termo de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelos prazos constantes no Quadro "PRAZOS DE GARANTIA", contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda e limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes do produto, nos termos discriminados nas condições abaixo e cujo exame realizado por profissionais da empresa constate, satisfatoriamente, a existência do alegado defeito de material ou manufatura.

| Prazo de garantia | | | | |
|------------------------|--|--|--|---|
| 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES |
| MOLAS AMORTECEDORES | ACESSÓRIOS PLÁSTICOS CONEXÕES ELÉTRICAS CONEXÕES HIDRAULICAS | COURVIN ESPUMA MOTORES CENTRAIS ELÉTRICAS PARAFUSOS COLAGENS SINTÉTICAS | PINTURA EPÓXI PINTURA PU ACESSÓRIOS GERAIS AGREGÁVEIS | ESTRUTURAS METÁLICAS E DE MADEIRA SOLDAS COLAGENS DE MADEIRA |

Dependendo da gravidade e extensão do problema, a empresa poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Nos propomos a atender todas as reposições dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A garantia é válida para defeitos de fabricação e não contempla:

- Desgaste no acabamento, partes e/ou peças, ocorrido por uso intenso, falta de lubrificação ou exposição a condições adversas como: intempéries, umidade, maresia, frio e calor intensos;
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto.
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes etc;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
- Danos causados por serviços de conserto realizados por pessoal não autorizado;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição a intempéries, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nessas condições.

Ocasiona a perda da garantia:

- Utilização do produto em ambientes úmidos;
- Utilização do produto sem seguir as orientações constantes no Manual;
- Utilização de acessórios que não sejam originais do aparelho;
- Violação do lacre e/ou remoção do número de série, apresentando o número de série ilegível, alterado;
- Submetidos a sobrecarga;
- Envio do aparelho para assistência técnica não autorizada pelo fabricante.

Atenção:

- É recomendável a troca das molas a cada 12 meses devido ao desgaste sofrido pelo material (evitando assim rupturas e possíveis acidentes);
- O conserto ou substituição do produto com defeito não prorroga o prazo de garantia;
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia;
- A recepção dos produtos mediante a transportadora, deve ser acompanhada com seriedade pelo cliente, pois produtos danificados durante o transporte deverão ser questionados ao transportador no ato da entrega.

Reclamações de defeitos observados durante o prazo de garantia deverão ser efetivadas diretamente ao Núcleo de Atendimento e Qualidade, através do telefone 0800 70 70 010 e só serão atendidas mediante:

- Apresentação do respectivo **documento fiscal de venda**;
- Realização de uma **vistoria técnica do produto** para constatação do defeito reclamado.

O equipamento deverá ser enviado para o endereço constante na Nota Fiscal e as despesas de frete são de responsabilidade da ARKTUS somente nos primeiros 90 (noventa) dias, após este prazo serão de responsabilidade do cliente.

O fabricante reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos em território brasileiro. Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao documento fiscal em local de fácil acesso.

Em caso de dúvida ou para esclarecimentos adicionais, nosso Núcleo de Atendimento e Qualidade está à sua inteira disposição.

Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do Cliente: _____

Endereço: _____

Complemento: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

UF: _____ CEP: _____

Data da Compra: ___/___/___ Nota Fiscal (n°): _____

N° de Série: _____ N° Lote: _____

Equipamento: _____

Obs.: _____



www.arktus.com.br