

LUPA ARTICULADA 5D, COM LUZ DE LED E APOIO PARA MESA

MANUAL DO USUÁRIO

Querido cliente, agradecemos pela preferência e por confiar em nossa marca. Você acaba de receber o que há de melhor no mercado nacional e internacional de lupas. Este produto é ideal para profissionais que desejam obter uma maior visualização e precisão em seus atendimentos. Pedimos a gentileza de **ler as instruções antes de usar o equipamento**.

1. Parâmetros:

- Tamanho da lente: 5" (127mm)
- Voltagem: AC 100-240V; 50/60Hz (bivolt)
- Força: 14W (60 pcs smd LED)

2. Itens Inclusos

- Lupa com arco de led
- Braço para fixação
- Dimmer para controle de luminosidade e ON/OFF
- Grampo de fixação para mesa

2. Instalação e Uso

- a) Prenda o suporte de mesa na superfície plana a sua escolha (antes de encaixar a lupa no suporte);
- b) Depois, insira a haste inferior do braço da lupa no orifício do suporte.
- c) Encaixe a lupa e o plugue na tomada.
- d) Agora, o produto está pronto para ser utilizado.

3. Avisos Importantes

- Temperatura ambiente: -5°C~40°C;
- Umidade ambiente: ≤95%;
- Nunca desmonte a lâmpada da lupa. Isso só pode ser feito por uma assistência autorizada da Arktus.

Em caso de dúvidas ou problemas relacionados ao seu produto, por favor entre em contato gratuitamente com nossa central de atendimento:

0800-200-8022.

ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
R. Antônio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II
CEP: 85825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná - Brasil
CNPJ: 01.417.367/0001-78

