

Assessórios compatíveis


Para a utilização da Caneta **SKN1601** disponibilizamos uma seleta coleção de agulhas que devem ser adquiridas à parte, para um perfeito funcionamento deste equipamento, e que não constam nessa embalagem:




SKN1602
Micro agulha
Descartável
1 ponta



SKN1603
Micro agulha
Descartável
4 pontas

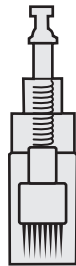

SKN1604
Micro agulha
Descartável
12 pontas

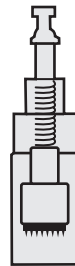

SKN1605
Nano agulha
Descartável
42 pontas

Garantia

Este equipamento **SKN1601** possui 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação. Esta garantia não cobre mau uso do equipamento, danos por queda, danos se o equipamento for molhado, imerso em líquidos ou danos realizados por curto circuito da rede elétrica do proprietário.



www.meuskinup.com.br

sac@meuskinup.com.br

Segurança



Compulsório INMETRO



Micro-agulhamento SkinUp

Caneta para Nano e
Micro Agulhamento Estético.

SKN 1601

Equipamento profissional para aplicações em nano e micro agulhamento estético e micro pigmentação estética



Agradecemos por adquirir nosso equipamento.
A **SkinUp Beauty Devices** oferece sempre as melhores soluções aos profissionais da dermatologia e estética.

SKN1601 Nanopen


A Caneta SKN 1601 da SkinUp Beauty Devices para Nanoagulhamento e Microagulhamento estético de uso profissional, foi desenvolvida especialmente para a realização da terapia de microagulhamento, potencializando a absorção de ativos pela pele, atenuando e suavizando a pele, oferecendo a oportunidade de melhorar a aparência da pele.

Esta Embalagem contém

- 1 caneta Microagulhamento
- 1 controle manual de velocidade
- 2 baterias
- 1 carregador de bateria
- 1 fonte de alimentação 110v/220v com ajuste automático, (funciona em ambas as correntes automaticamente), saída 4,2v


Como utilizar seu equipamento

- 1- Conecte a fonte de alimentação na tomada e em seguida o cabo no equipamento
- 2- Encaixe a agulha compatível da **Skinup** na ponta da **Caneta SKN1601** girando até ficar bem firme e seguro
- 3- Pressione o botão ligar, o anel de controle da velocidade deverá estar na velocidade mais alta, no máximo (35.000rpm)

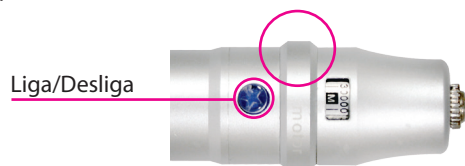

- 4- Gire o anel de velocidade para escolher a velocidade de trabalho, entre 22.000rpm e 35.000rpm

- 5- Gire o anel de controle da profundidade da agulha e escolha entre 0,1mm e 3mm de profundidade para realizar o procedimento

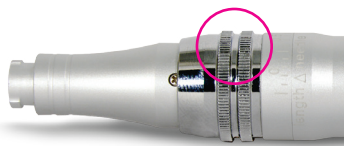

- 6- Para carregar a bateria, rosqueie a bateria no carregador, conecte a fonte de alimentação na tomada e em seguida o cabo no carregador, aperte o botão branco na bateria para ativar a luz verde na fonte de alimentação, quando a luz ficar vermelha a bateria está carregada.



Higienização

Para higienizar a sua caneta **SKN1601** utilize apenas álcool 70°GL em um algodão levemente umedecido, sempre antes e após cada procedimento, cuidado para não exagerar na quantidade do líquido pois o motor pode ser molhado e isto vai danificar seu equipamento, anulando a garantia. Não reutilize as agulhas, elas são descartáveis

IMPORTANTE

Observe nossas recomendações para o produto **SKN1601 Nanopen** – caneta para micro e nanoagulhamento estético

- 1- Evite a queda do equipamento, isto poderá danificá-lo
- 2- Nunca reutilize as agulhas, em hipótese alguma
- 3- Descarte as agulhas em lixo apropriado
- 4- Danos físicos e molhar o equipamento anulam a garantia do produto
- 5- Leia o manual do produto antes de utilizá-lo
- 6- Perguntas adicionais sobre o produto devem ser encaminhadas a sac@meuskinup.com.br
- 7- O equipamento deverá ser enviado à nossa empresa para avaliar os danos causados e considerações sobre a garantia do produto, em caso de problemas.