


manual do equipamento

MESA AUXILIAR PARA TERAPIA

cod.: PA00675A/PA00715A/PA00711A

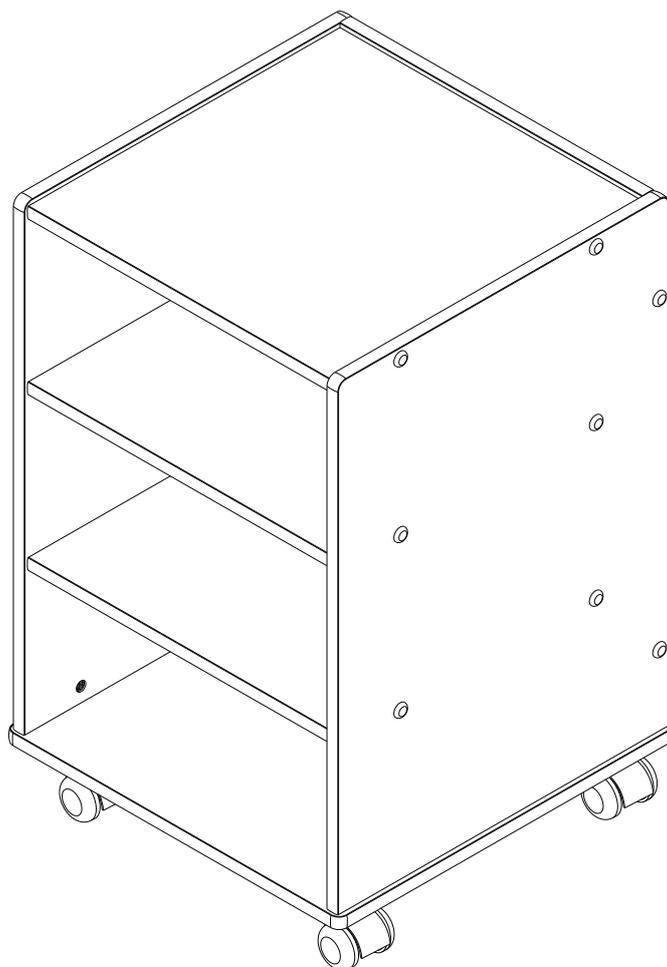

**ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA.**

R. Antônio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II
CEP: 85825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná - Brasil
CNPJ: 01.417.367/0001-78

AFE: 802844-5

Responsável Técnico: Dr. Alex Fernando Zani
Crefito: 8/8409 - F

Sumário

Descrição do equipamento.....	02
Informações técnicas.....	02
Indicações de uso.....	02
Advertências, Precauções e Cuidados especiais.....	02
Armazenamento e transporte.....	03
Formas de apresentação do produto médico.....	04
Preparação para montagem.....	04
Lista de componentes.....	05
Kit cliente	05
Montagem.....	06/11
Termo de garantia.....	12
Certificado de garantia.....	13

Este manual contém informações essenciais para a utilização do seu equipamento. Leia-o atentamente antes de iniciar sua instalação e operação. Preserve e mantenha-o para consultas futuras.

Descrição do equipamento

A **MESA AUXILIAR** é fabricada em **MDF**, possui quatro rodízios para facilitar o transporte do mesmo. Cada divisório tem capacidade de carga de até **10kg**.

Informações Técnicas

Capacidade de Carga: 10 kg (Por prateleira)

Profundidade: 468 mm

Largura: 460 mm

Altura: 726 mm

Peso do produto: 18,3 kg

Peso do produto embalado: 19,2Kg

Estrutura: MDF



10 kg

Peso máximo suportado.



18,3 kg

Peso do produto.

Indicações de uso

Equipamento utilizado para auxiliar no armazenamento de produtos utilizados no dia a dia.

Advertências, Precauções e Cuidados especiais.

Advertências/Precauções:

- Este produto não contém contra-indicações para o usuário.
- Não deve ser molhado ou exposto em lugares úmidos.
- Não colocar em área elevada, utilizar ao nível do chão.
- Antes do uso colocar em uma superfície nivelada.

Cuidados especiais:

A sua limpeza deve ser feita diariamente apenas com panos levemente umedecido com água. Para melhor conservação, o produto deve ter seus fixadores (parafusos) apertados mensalmente. É recomendado avaliar a estrutura do equipamento mensalmente.

Armazenamento e transporte

O armazenamento das embalagens deve ser em local fresco e arejado protegido de ações climáticas ofensivas (sol, chuvas, ventos e altas temperaturas), com um empilhamento máximo de cinco caixas idênticas.

SIMBOLOGIA NA EMBALAGEM



ESTE LADO PARA CIMA

Indica a posição correta para transporte da embalagem



FRÁGIL

O conteúdo nesta embalagem é frágil e deve ser transportado com cuidado.



EMPILHAMENTO MÁXIMO.

Número máximo de embalagens idênticas que podem ser empilhadas uma sobre as outras, número limite de 5 unidades.



LIMITES DE TEMPERATURA.

Indica as temperaturas limites para transporte e armazenagem da embalagem, sendo o limite inferior de 5°C e o superior de 50°C.




NÃO EXPOR AO SOL.

As embalagens devem ser armazenadas em local fresco e arejado, protegido de ações climáticas ofensivas.



MANTENHA LONGE DA CHUVA

A embalagem não deve ser transportada na chuva.

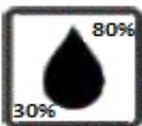

UMIDADE RELATIVA.



Indica a umidade relativa do ambiente para transporte e armazenagem, sendo entre 30% e 80%.

Acima estão os símbolos de indicação de segurança ao produto quanto a armazenagem, ações climáticas e transporte.

Formas de apresentação do produto médico

O produto é enviado desmontado, embalado em plástico e acomodado em caixa resistente a fim de chegar ao cliente final de forma segura. Dentro de sua embalagem acompanha o manual do equipamento, acessórios e material de apoio para sua montagem.

Preparação para Montagem

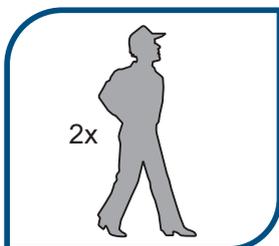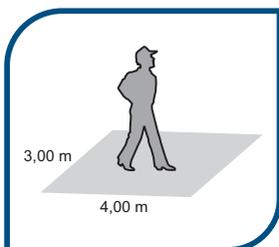

FERRAMENTAS

A ARKTUS disponibiliza todas as ferramentas necessárias para realizar a montagem do seu equipamento. Certifique-se de tê-las à mão antes de iniciar a montagem

PESSOAS

ATENÇÃO: são necessárias duas pessoas para realizar a montagem do equipamento.

CUIDADOS

Durante a montagem deve-se seguir corretamente as orientações neste manual. O equipamento está sujeito a danos durante este processo, portanto, tenha cautela ao lidar com componentes e ferramentas.

O equipamento deverá ser instalado e utilizado em ambiente apropriado, devem ser respeitadas as seguintes características na área de instalação do equipamento:

- Nivelamento adequado e estabilidade na superfície de uso;
- Baixa umidade;
- Proteção contra incidência de raios solares;

Em caso de dúvidas ou dificuldades entre em contato com a nossa Assistência Técnica ARKTUS.

TEMPO DE MONTAGEM

Seguindo as orientações contidas neste manual estima-se um tempo de 20 minutos para a montagem.


Lista de componentes

Lateral Esquerda
Qtde: 1



01

Lateral Direita
Qtde: 1

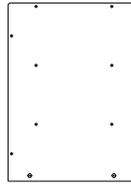


02

Tampa Traseira
Qtde: 1



03

Prateleira
Qtde: 3

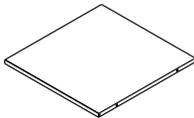

04

Base Rodizio
Qtde: 1



05

Kit Cliente

Parafuso mec. sextavado interno
cab. 13 Ø1/4" x 40mm
Qtde: 21



A

Cavilha Ø40 x 80 mm
Qtd. 03



B

Porca cilíndrica
Qtde: 21



C

CHAVE ALLEN 4mm
Qtde: 01



D

PARAFUSO PHILIPS 4,5x16mm
Qtde: 16



E

Rodizio 50mm chato
Qtd. 04



F

Tampa Parafuso Cab 13
Qtd. 16





G

Montagem

MONTAGEM

1° PASSO: Montagem da Base.



Efetue a união da Base Rodízio (**componente 05**) com os Rodízio (**componente F**) utilizar os parafusos (**componente E**), realize o aperto do parafuso para ter uma fixação segura.

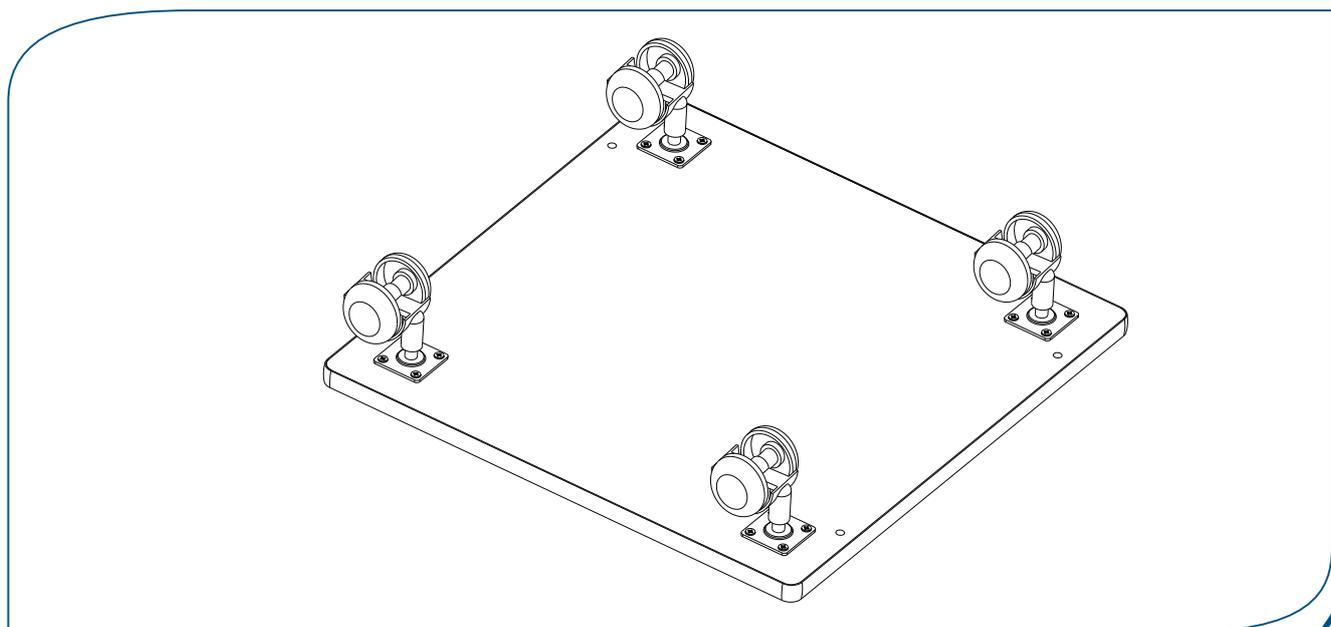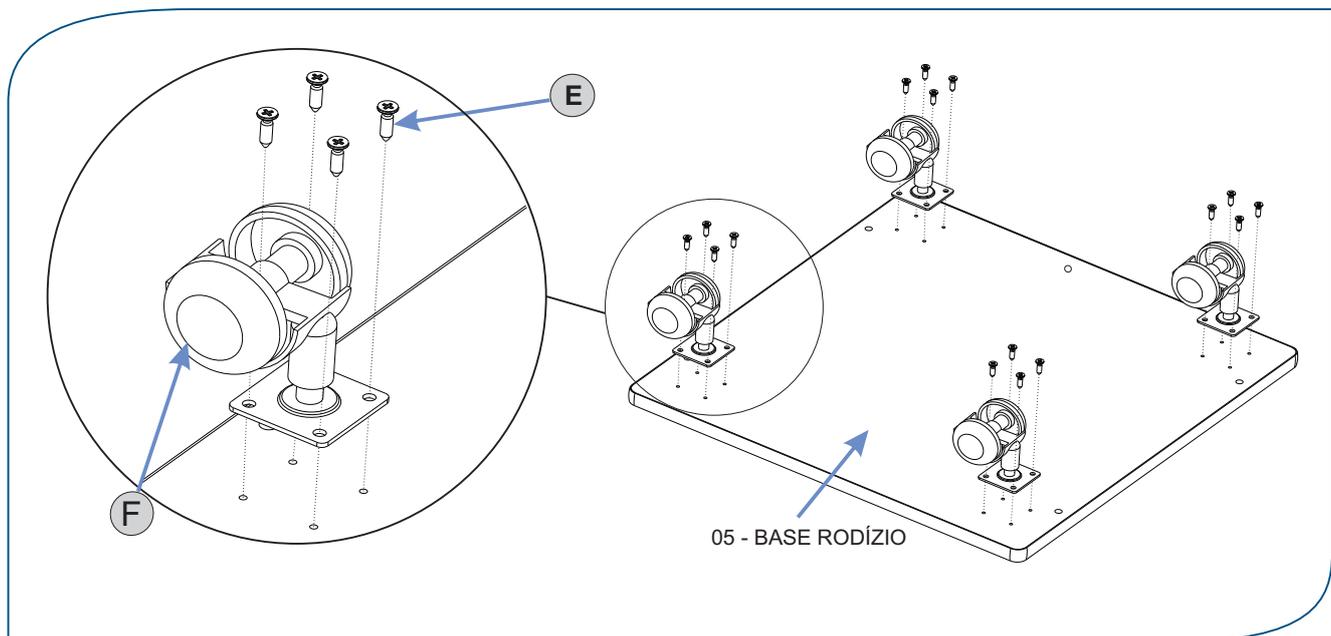

Montagem

MONTAGEM



2° PASSO: Montagem Lateral direita (**componente 01**) utilizar a montagem do **passo 1°**.
Utilizando os parafusos (**A**) e as porcas cilíndrica (**C**), utilize a chave (**D**) para efetuar o aperto.

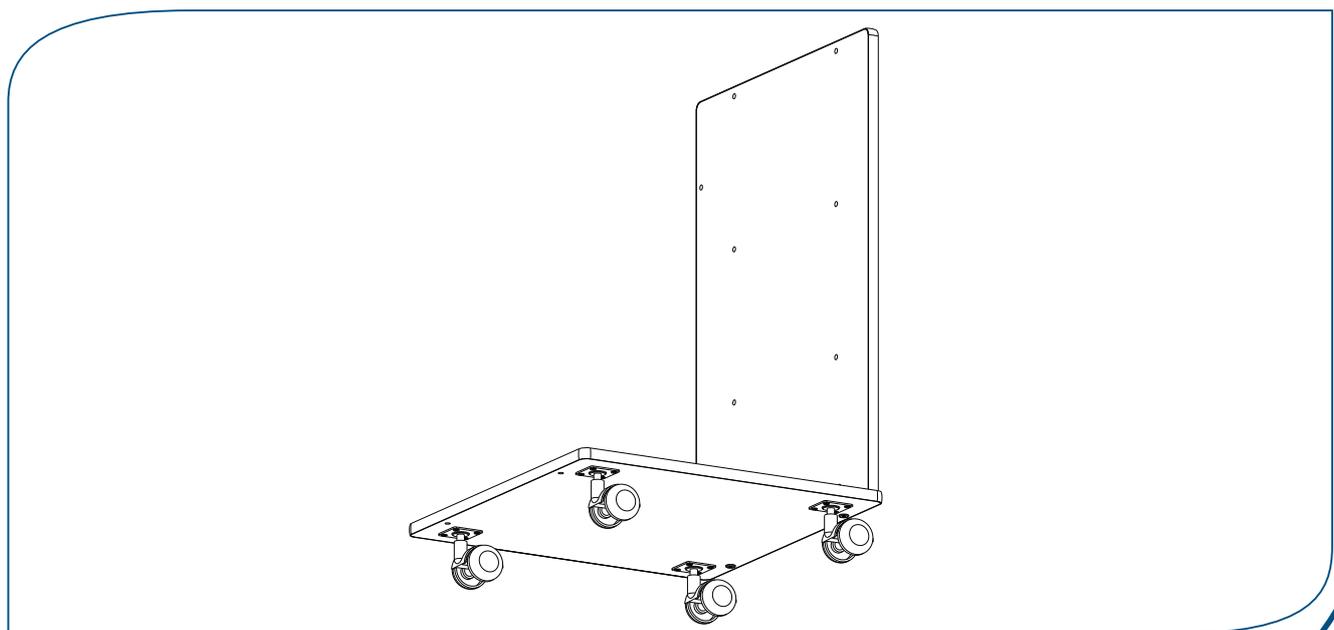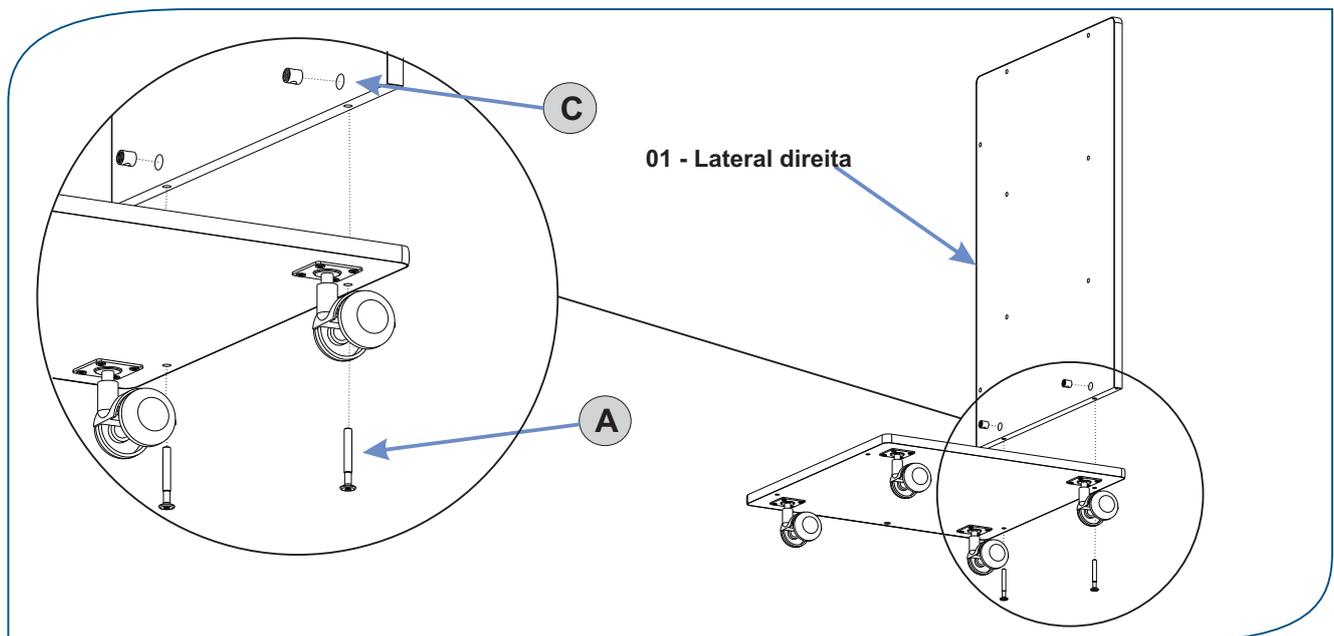

Montagem

MONTAGEM

3ºPASSO: Montagem Tampa Traseira (**componente 03**) utilizar a montagem do **passo 2º**.
Utilizando os parafusos (**A**) e as porcas cilíndrica (**C**), utilize a chave (**D**) para efetuar o aperto.

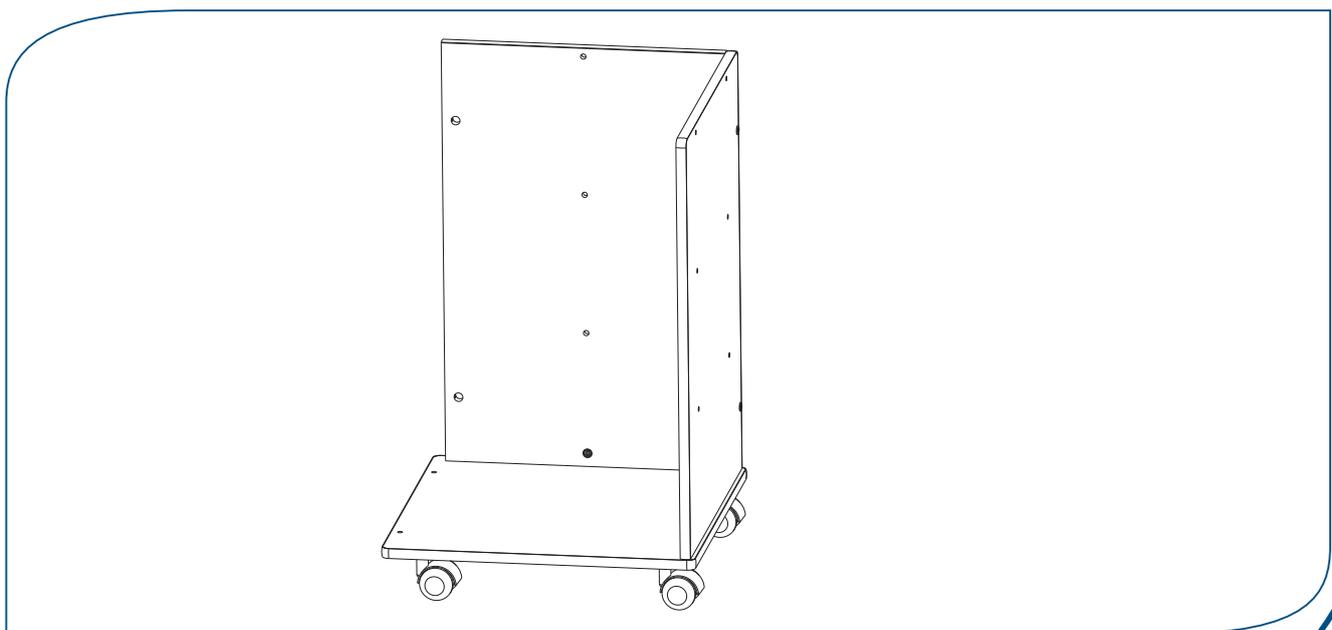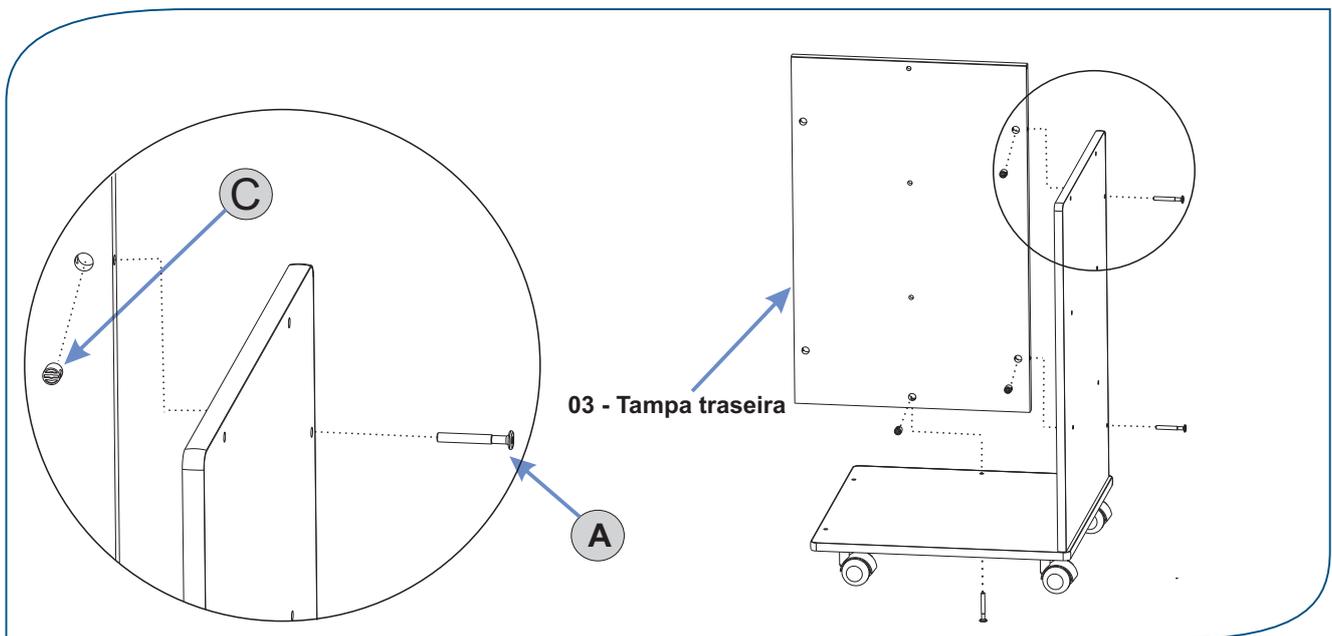


Montagem

MONTAGEM

4° PASSO: Montagem Prateleira (**componente 04**) utilizar a montagem **passo 3°**.

Utilizando os parafuso (**A**) e as porcas cilíndrica (**C**) e a cavilha (**B**), utilize a chave (**D**) para efetuar o aperto.


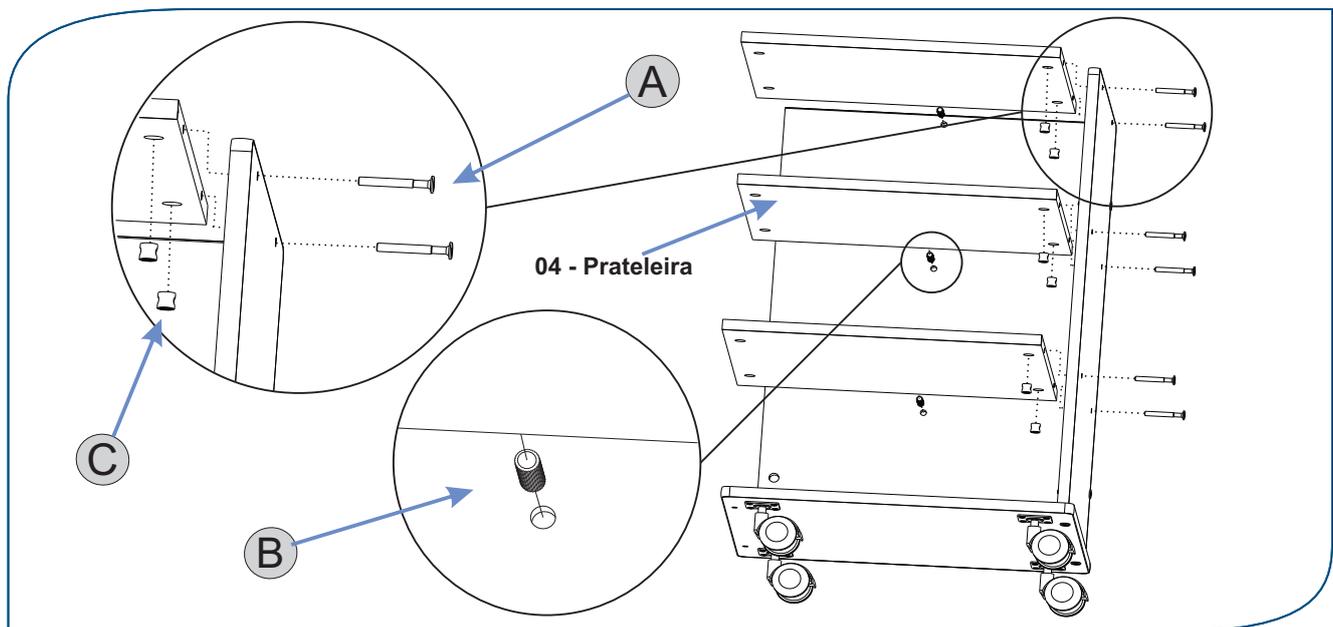


Montagem

MONTAGEM

5ºPASSO: Montagem Lateral esquerda (**componente 02**) utilizar a montagem **passo 4º**.

Utilizando os parafusos (**A**) e as porcas cilíndrica (**C**), utilizar chave (**D**) para realizar o aperto.

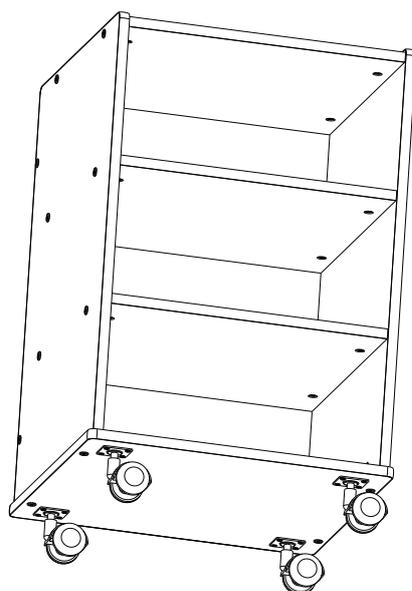
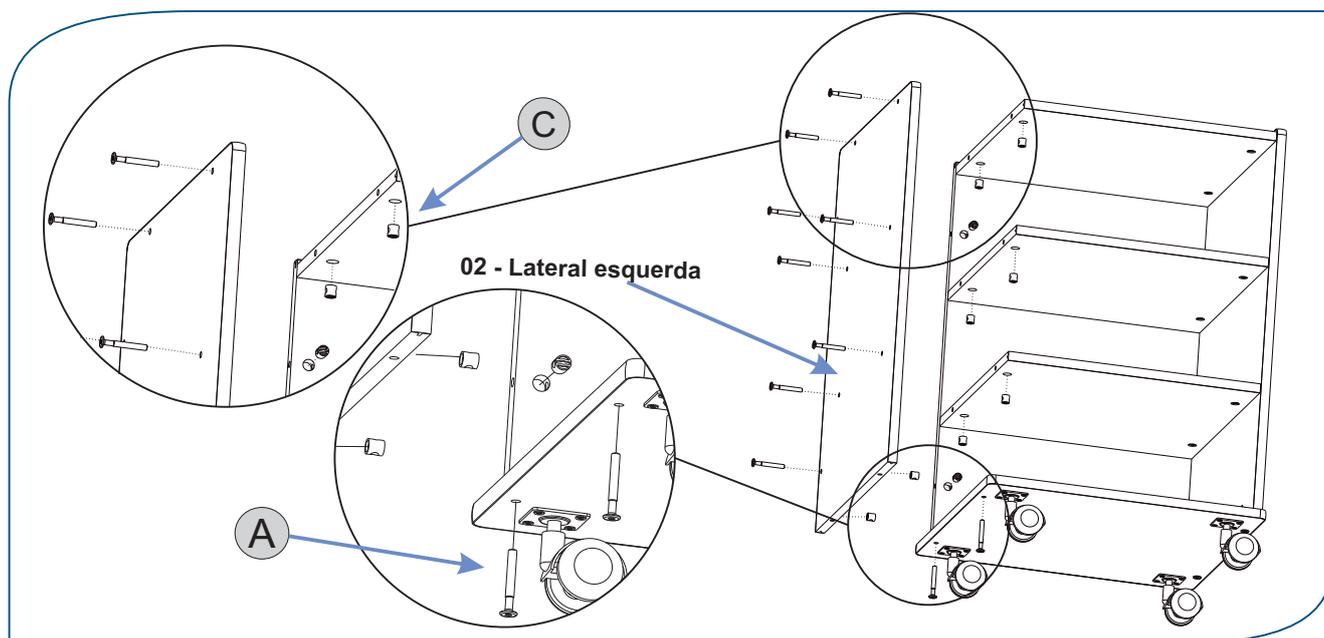


Montagem

MONTAGEM

6º PASSO: Montagem Tampa Parafuso Cabeça 13 (componente G).

Posicionar a Tampa em todos os parafusos na lateral direita, em seguida repetir o processo novamente na lateral esquerda.

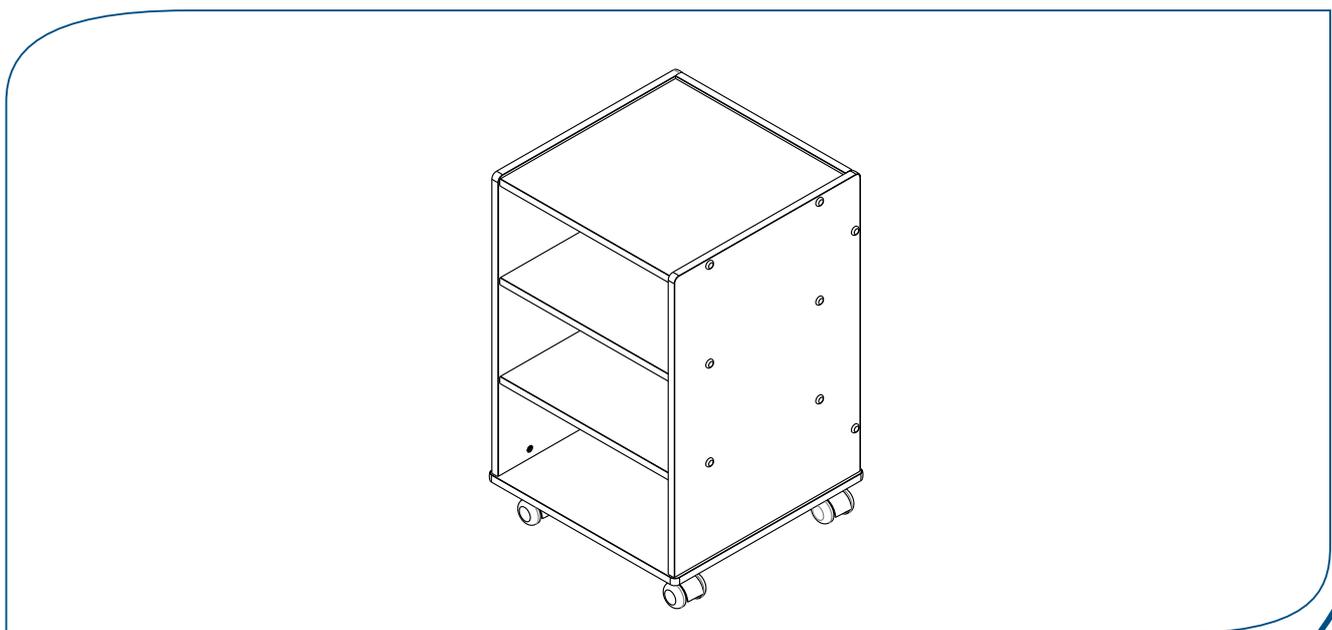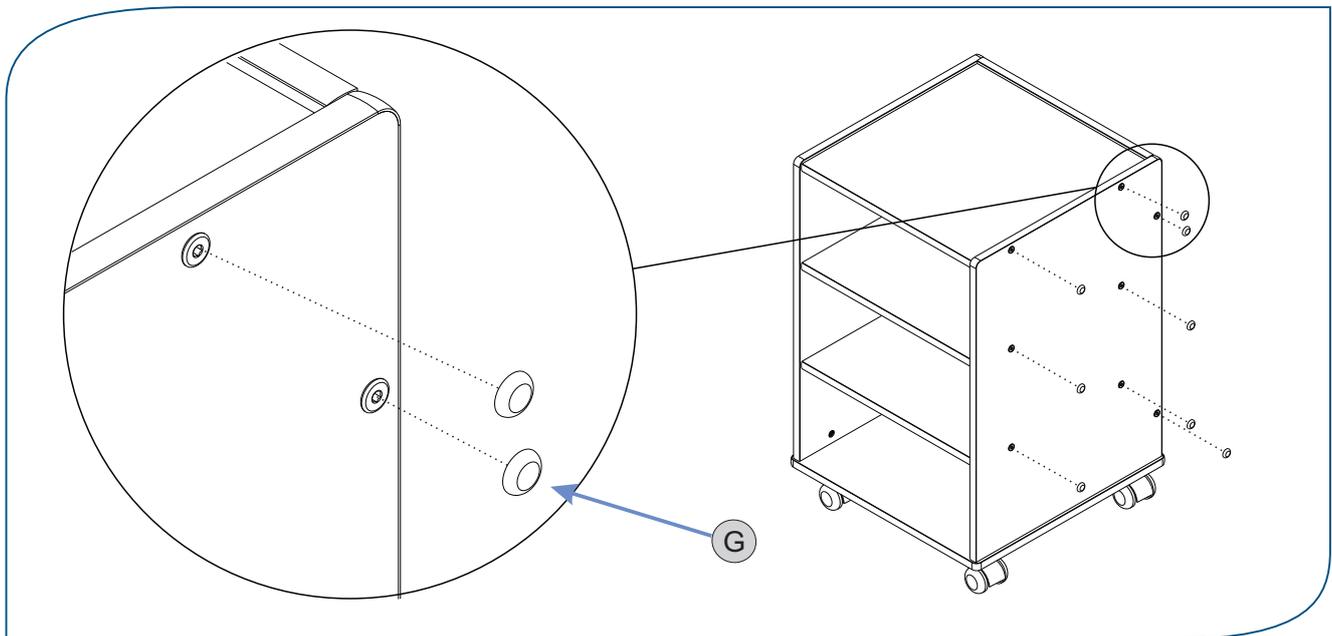

Termo de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelos prazos constantes no Quadro "PRAZOS DE GARANTIA", contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda e limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes do produto, nos termos discriminados nas condições abaixo e cujo exame realizado por profissionais da empresa constate, satisfatoriamente, a existência do alegado defeito de material ou manufatura.

Prazo de garantia
4 MESES
Estrutura de madeira Rodizio

Dependendo da gravidade e extensão do problema, a empresa poderá optar pela substituição do produto danificado por um novo. Propomos a atender todas as reposições dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A garantia é válida para defeitos de fabricação e não contempla:

- Desgaste no acabamento, partes e/ ou peças, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como: intempéries, umidade, maresia, frio e calor intensos;
- Danos causados durante o transporte ou montagem do produto;
- Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto.
- Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto;
- Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, etc;
- Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
- Danos causados por serviços de conserto realizados por pessoal não autorizado;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
- Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição a intempéries, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nessas condições.

Ocasiona a perda da garantia:

- Exposição a condições extrema ao sol;
- Utilização do produto em ambientes úmidos;
- Utilização do produto sem seguir as orientações constantes no Manual;
- Violação do lacre e/ou remoção do número de série, apresentando o número de série ilegível, alterado;
- Submetidos a sobrecarga;
- Envio do aparelho para assistência técnica não autorizada pelo fabricante.

Atenção:

- O conserto ou substituição do produto com defeito não prorroga o prazo de garantia;
- A recepção dos produtos mediante a transportadora, deve ser acompanhada com seriedade pelo cliente, pois produtos danificados durante o transporte deverão ser questionados ao transportador no ato da entrega.

Reclamações de defeitos observados durante o prazo de garantia deverão ser efetivadas diretamente ao Núcleo de Atendimento e Qualidade, através do telefone 0800 70 70 010 e só serão atendidas mediante:

- Apresentação do respectivo **documento fiscal de venda**;
- Realização de uma **vistoria técnica do produto** para constatação do defeito reclamado.

O equipamento deverá ser enviado para o endereço constante na Nota Fiscal e as despesas de frete são de responsabilidade da ARKTUS somente nos primeiros 90 (noventa) dias, após este prazo serão de responsabilidade do cliente.

O fabricante reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.

Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos em território brasileiro. Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao documento fiscal em local de fácil acesso.

Em caso de dúvida ou para esclarecimentos adicionais, nosso Núcleo de Atendimento e Qualidade está à sua inteira disposição.

Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do Cliente: _____

Endereço: _____

Complemento: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

UF: _____ CEP: _____

Data da Compra: ___/___/___ Nota Fiscal (n°): _____

N° de Série: _____ N° Lote: _____

Equipamento: _____

Obs.: _____



0800 70 70 010

www.arktus.com.br