

Produto: Medix Brasil – Máscara Tripla Descartável com elástico ou com tiras

Registro ANVISA: 80495510076

Certificado de Aprovação (CA) MTE: isento, não considerado EPI.

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>Máscara com três camadas Medix Brasil, com fechamento em tiras ou elástico, não estéril, feita em polipropileno não tecido, hipoalergênico, uso único. Uso único, ecologicamente sustentável, biodegradável, respirável e macio, sem látex e fibra de vidro, possui clipe de nariz ajustável. Anti poeira, antibacteriano, antivírus, anti pólen, antipoluição atmosférica, anti gotículas, etc.</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>As Máscaras Triplas Descartáveis com elástico ou com tiras Medix Brasil, são destinadas a exames e procedimentos gerais, para a proteção de pacientes e profissionais de saúde, como também é destinada para o auxílio da garantia de qualidade e proteção contra contaminação durante procedimentos estéticos, gastronômicos e industriais em geral ou outras áreas, utilizada para o conforto e higiene das vias respiratórias em trabalhos que requeiram barreiras filtrantes, de uso único, sendo proibido reprocessar e necessário descartar após o uso.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricada em 100% polipropileno (não tecido) e papel filtro melt blown BFE: ≥95%. ✓ Possui 03 camadas: <ul style="list-style-type: none"> 1ª Camada: polipropileno não tecido de 25gr±2gr 2ª Camada: papel filtro melt blown (BFE: ≥95%) de 25gr±2gr 3ª Camada: polipropileno não tecido de 25gr±2gr ✓ Soldada eletronicamente por ultrassom ✓ Contém clipe nasal ajustável de arame plastificado com PVC ✓ Elástico de tecido de poliuretano elástico (látex free) ✓ Cores: Branca ou Preta ou Rosa ou Azul ✓ Disponível nos modelos: com elástico e com tiras ✓ Comprimento: 17,5cm ✓ Largura: 9,5cm ✓ Validade 5 anos ✓ Descartável e de uso único
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 50 unidades. Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 40 cartuchos.</p>

ORIENTAÇÕES DE USO	Para o uso colocar o produto na região da face, com o lado branco para dentro e azul para fora, cobrindo boca e nariz, adaptando com o clipe nasal e fixá-la utilizando os elásticos ou tiras, após executar o procedimento; retirar e descartar em local apropriado.
PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS	<i>“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”</i> O fabricante indica não ultrapassar 3 horas de uso, quando uso contínuo. Ler atentamente as Instruções de Uso; Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	As Máscaras Triplas Descartáveis com elásticos ou tiras Medix Brasil, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Evelyn Aline Pante Mantovani

CRF-PR Nº 19619

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR Nº 25368

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

