


manual do equipamento

ESCADA DE CANTO COM RAMPA PA00641B

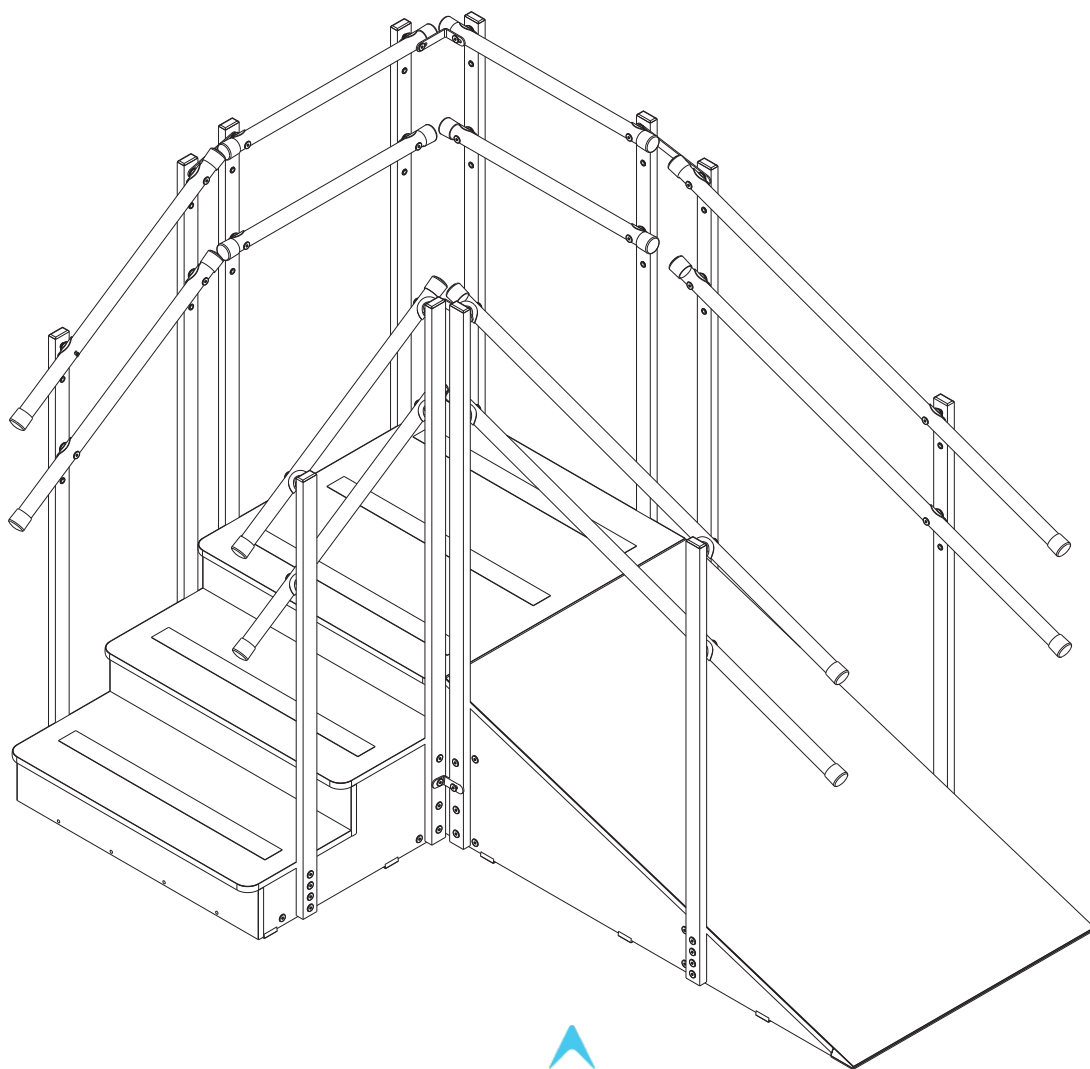

**ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA
SAÚDE LTDA.**

R. Antônio Victor Maximiano, 107 Bloco A, Parque Industrial II
CEP: 85825-000 - Santa Tereza do Oeste - Paraná - Brasil
CNPJ: 01.417.367/0001-78

AFE: 802844-5

Responsável Técnico: Dr. Alex Fernando Zani
Crefito: 8/8409 - F

Sumário

Descrição do equipamento.....	02
Informações técnicas.....	02
Indicações de uso.....	02
Riscos, Restrições, Advertências e Cuidados especiais.....	03
Armazenamento e transporte.....	04
Formas de apresentação do produto médico.....	04
Preparação para montagem.....	05
Lista de componentes.....	06
Opções de montagem.....	09
Montagem.....	10 a 32
Termo de garantia.....	33
Certificado de garantia.....	34

Este manual contém informações essenciais para a utilização do seu equipamento. Leia-o atentamente antes de iniciar sua instalação e operação. Preserve e mantenha-o para consultas futuras

Descrição do equipamento

A Escada de Canto com Rampa - Arktus é produzida em madeira natural de eucalipto e revestida por uma película de selador. As devidas junções são fixadas através de parafusos, porcas. Quatro corrimões equipados com dispositivos de regulagem de altura e degraus revestidos por uma camada de lixa antiderrapante e rampa lateral revestida com uma camada antiderrapante de ravena preta.

Informações Técnicas

Capacidade de Carga: 140 kg

Comprimento total linear: 2436mm

Altura máxima: 1390mm

Largura em linha reta: 740mm

Peso do produto: 73,2Kg

Peso do produto embalado: 75,8kg

Estrutura: Madeira natural eucalipto e MDF



140 kg



Peso máximo suportado





73,2Kg

Peso do produto.

Medidas lineares

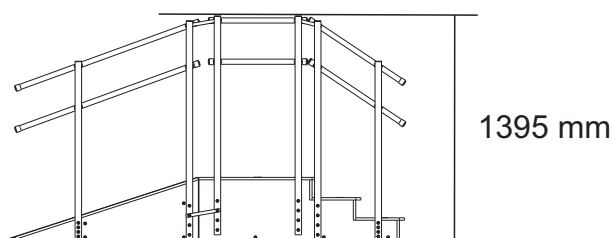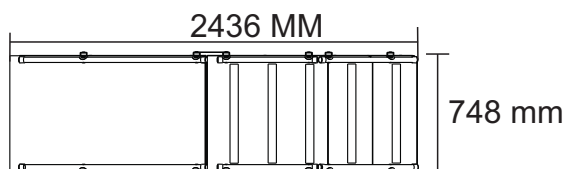

Medidas 90°C

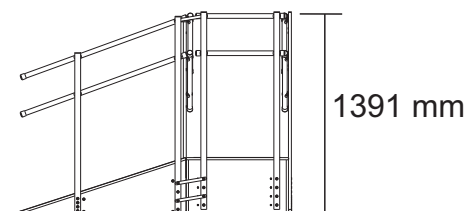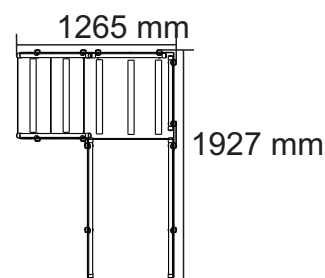

Indicações de uso

Todo exercício realizado neste equipamento deve ser feito sob a orientação e supervisão de um profissional devidamente habilitado, que poderá prescrever o exercício adequado para a necessidade de cada paciente.

-São utilizados para treino de marcha (caminhada) em pacientes de todas as idades;

-Indicados para pacientes com déficit neuromuscular e dificuldade motora.

-Podem ser utilizados pelos fisioterapeutas em seus pacientes com exercícios de grau variado, auxiliando no fortalecimento de membros inferiores, equilíbrio estático e dinâmico, auxílio na coordenação motora, propriocepção e treino de AVD (Atividade de Vida Diária).

Riscos, Restrições, Advertências e Cuidados especiais.

Riscos:

Os produtos não apresentam riscos para a saúde e devem ser usados em clínicas de reabilitação ou em ambientes domiciliares sob os cuidados e orientação de um profissional especializado. Por se tratar de equipamentos de auxílio a procedimentos clínicos, estes produtos não causam danos ou dor ao paciente.

Restrições:

Estes produtos não devem ser usados sem a supervisão de um profissional da área de saúde, apto a tal procedimento, assim como não devem ser utilizados como ferramenta ou utensílio para demais atividades não terapêuticas.

O Produto apresenta uma pequena instabilidade no começo dos corrimões da rampa, isso acontece devido as limitações estruturais do produto, que em sua essência opta por mobilidade e versatilidade, sacrificando minimamente a robustez

Advertências:

- Estes produtos não contém contra-indicações para o usuário.
- Não devem ser molhados ou expostos a lugares úmidos.
- Não colocar em áreas elevadas, utilizar ao nível do chão.
- Antes do uso, colocar em uma superfície nivelada.
- Não exceder a carga máxima permitida (140 Kg).

Cuidados especiais:

A limpeza deve ser feita diariamente, apenas com panos levemente umedecidos. Para melhor conservação, os produtos devem ter seus fixadores (parafusos) apertados periodicamente, sobre a metodologia de manutenção preventiva de equipamentos, o recomendado é avaliar a estrutura do equipamento mensalmente.

Armazenamento e transporte:

O armazenamento das embalagens deve ser em local fresco e arejado protegido de ações climáticas ofensivas (sol, chuvas, ventos e altas temperaturas), com um empilhamento máximo de cinco caixas idênticas.



ESTE LADO PARA CIMA

Indica a correta posição para transporte da embalagem



FRÁGIL

O conteúdo nesta embalagem é frágil e deve ser transportado com cuidado



EMPILHAMENTO MÁXIMO

Número máximo de embalagens idênticas que podem ser empilhadas umas sobre as outras. Neste equipamento, o número limite de empilhamento é 5 unidades.



LIMITES DE TEMPERATURA

Indica as temperaturas limites para transporte e armazenagem da embalagem, sendo o limite inferior de 5° C e o superior de 50° C.



NÃO EXPOR AO SOL

As embalagens devem ser armazenadas em lugar fresco e arejado protegido de ações climáticas ofensivas.



MANTENHA LONGE DA CHUVA

A embalagem não deve ser transportada na chuva.



UMIDADE RELATIVA


Indica a umidade relativa do ambiente para transporte e armazenagem sendo até umidade relativa até 80%

Acima estão os símbolos de indicação de segurança ao produto quanto a armazenagem, ações climáticas e transporte.

Formas de apresentação do produto médico.

O produto é enviado desmontado, embalado em plástico bolha e acomodado em caixa resistente a fim de chegar ao cliente final de forma segura. Dentro de sua embalagem acompanha o manual do equipamento, acessórios e material de apoio para sua montagem.

Preparação para Montagem

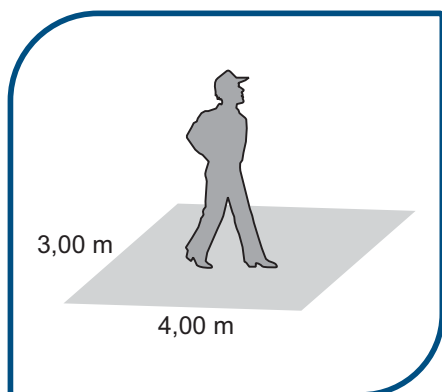

FERRAMENTAS

A ARKTUS disponibiliza as principais ferramentas necessárias para realizar a montagem do seu equipamento. Certifique-se de tê-las à mão antes de iniciar a montagem

PESSOAS

ATENÇÃO: são necessárias duas pessoas para realizar a montagem do equipamento.

CUIDADOS

Durante a montagem deve-se seguir corretamente as orientações neste manual. O equipamento está sujeito a danos durante este processo, portanto, tenha cautela ao lidar com componentes e ferramentas.



O equipamento deverá ser instalado e utilizado em ambiente apropriado, devem ser respeitadas as seguintes características na área de instalação do equipamento:

- Nivelamento adequado e estabilidade na superfície de uso;
- Baixa umidade;
- Proteção contra incidência de raios solares;

Em caso de dúvidas ou dificuldades entre em contato com a nossa Assistência Técnica ARKTUS.

TEMPO DE MONTAGEM


Seguindo as orientações contidas neste manual estima-se um tempo de 2 horas para a montagem.

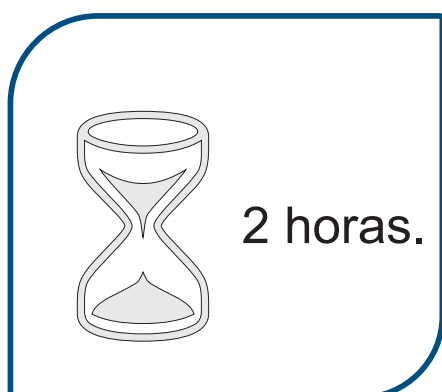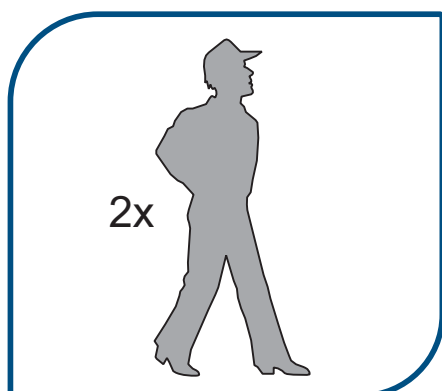


Lista de componentes

Peças para montagem da escada


PEÇA 1
Lateral ESQUERDA da escada
Qtde: 01

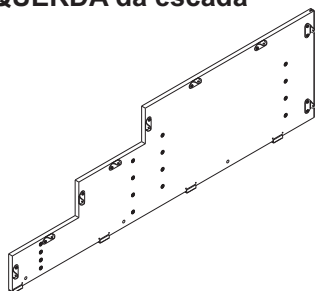


PEÇA 2
Lateral DIREITA da escada
Qtde: 01

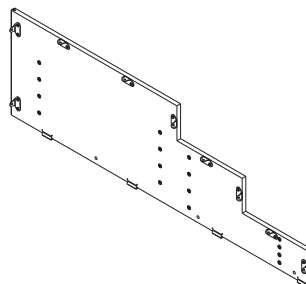


PEÇA 3
Degrau Maior
Qtde: 01

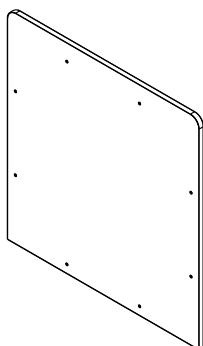


PEÇA 4
Degrau Menor
Qtde: 02

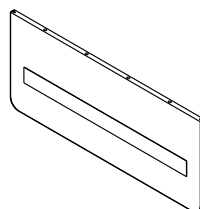

PEÇA 5
Fundo da escada
Qtde: 01

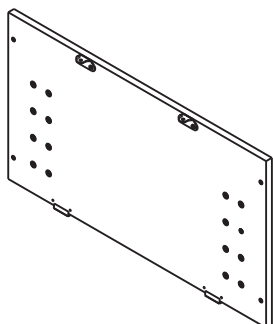

PEÇA 6
Espelho da escada
Qtde: 03

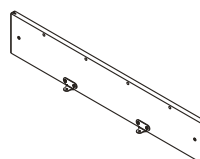


PEÇA 7
Reforço da escada
Qtde: 3




Lista de componentes

Peças para montagem da rampa


PEÇA 8
Lateral DIREITA da rampa
Qtde: 01

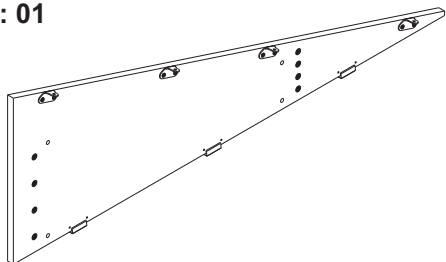


PEÇA 9
Lateral ESQUERDA da rampa
Qtde: 01

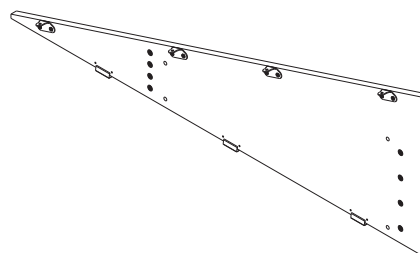


PEÇA 10
Apoio maior interno da rampa
Qtde: 01

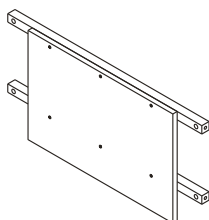


PEÇA 11
Apoio menor interno da rampa
Qtde: 01

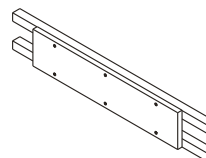


PEÇA 12
Apoio maior para corrimão
Qtde: 8

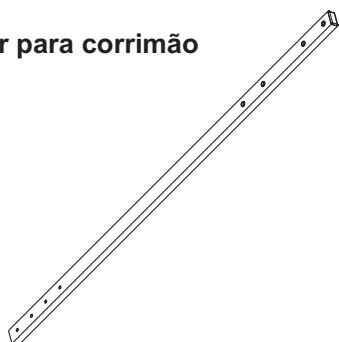

PEÇA 13
Apoio menor para corrimão
Qtde: 4

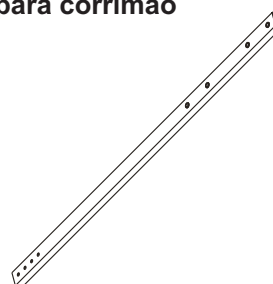


PEÇA 14
Rampa
Qtde: 01

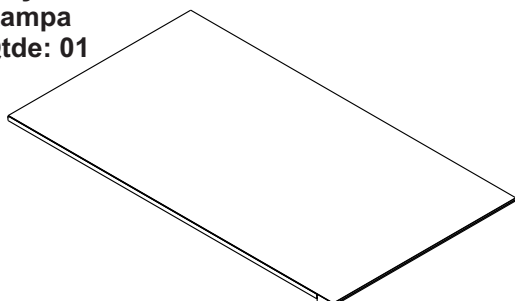


Lista de componentes

Peças para montagem do produto


PEÇA 15
Bastão degraus Ø32x700mm
Qtde: 04

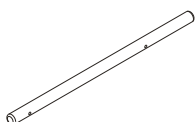

PEÇA 16
Bastão maior Ø32x1200mm
Qtde: 04

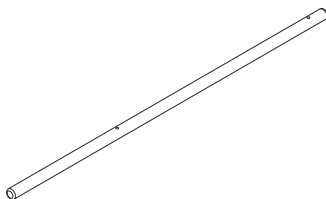


PEÇA 17
Bastão meio Ø32x600mm
Qtde: 04

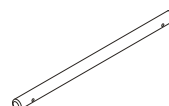


Kit Cliente


PEÇA 19
Cavilha Ø8x40mm
Qtde: 08

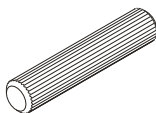

PEÇA 20
Parafuso Allen M4
Qtde: 34

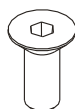


PEÇA 21
Porca cilíndrica Ø1/4"
Qtde: 14

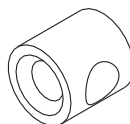

PEÇA 22
Arruela estampada 1 1/4"
Qtde: 24




PEÇA 23
Parafuso Mec. Allen
Ø1/4 x 50mm
Qtde: 62

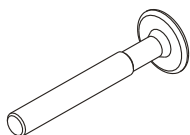


PEÇA 24
Chave Allen 4mm
Qtde: 01




PEÇA 25
Chave Allen 2,5mm
Qtde: 01

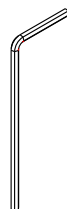


PEÇA 26
Trava 01
Qtde: 04

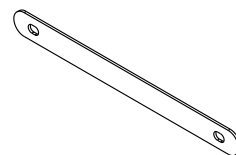


PEÇA 27
Trava 02
Qtde: 01

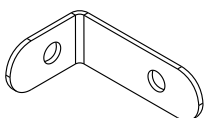


PEÇA 28
Trava 03
Qtde: 02

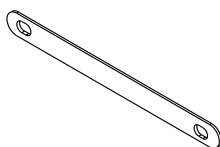

PEÇA 29
Trava 04
Qtde: 02

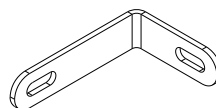


PEÇA 30
Parafuso Allen 1/4x60mm
Qtde: 24

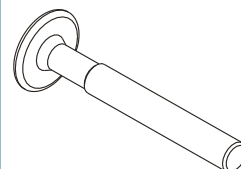


Opções de montagem



Este modelo da escada nos proporciona duas opções de montagem, sendo elas em linha reta ou 90°, para esquerda ou direita, logo abaixo temos imagens do produto já montado nas duas posições para melhor esclarecimento.

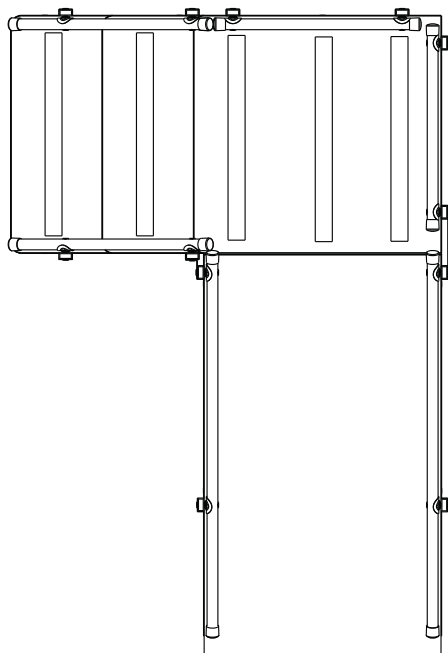

Montagem 90°

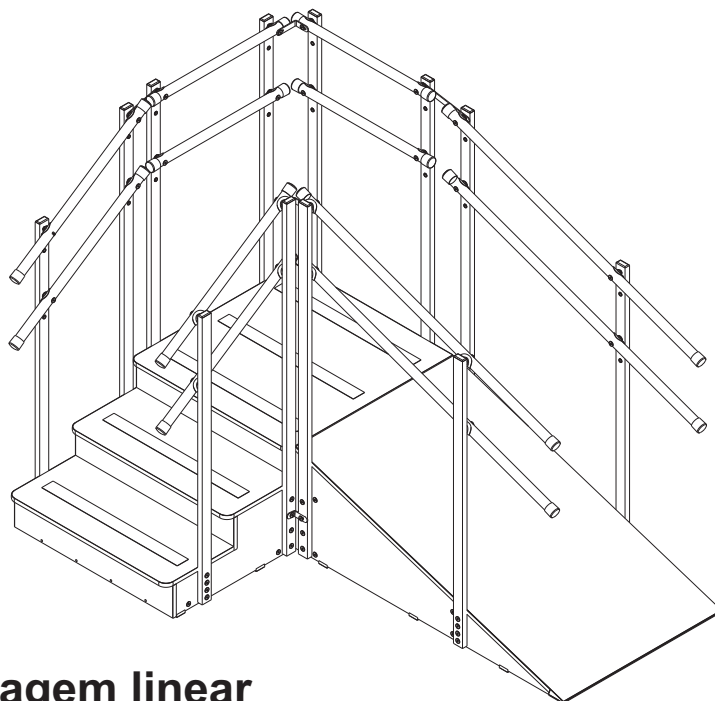

Montagem linear

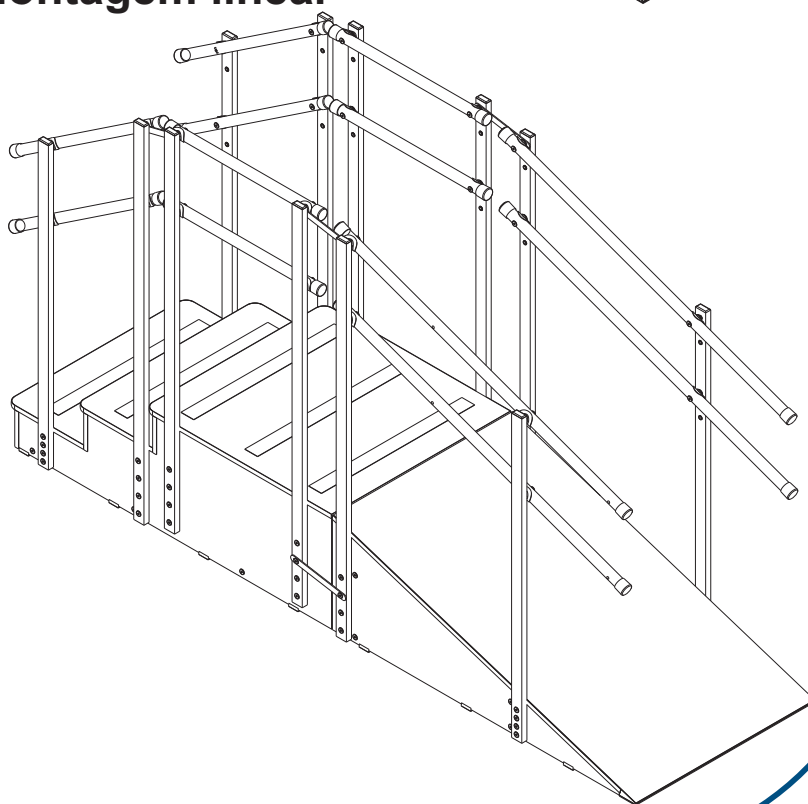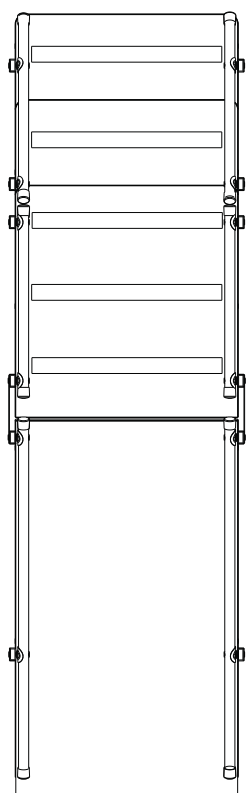


Montagem do produto

Montagem - Escada

PASSO A PASSO DA MONTAGEM - ETAPA 1


Nesta etapa vamos realizar a montagem do conjunto de degraus da escada. Logo abaixo temos uma imagem ilustrada do conjunto já montando para um melhor esclarecimento.

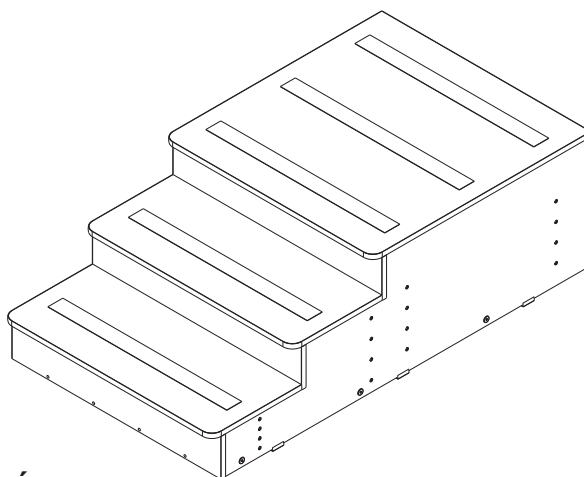


COMPONENTES NECESSÁRIOS

Este conjunto é composto por 9 componentes diferentes sendo eles:


PEÇA 1 - Lateral ESQUERDA da escada (Quantidade 01)

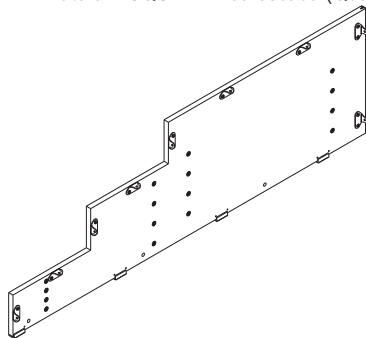


PEÇA 4 - Degrau Menor (Quantidade 02)

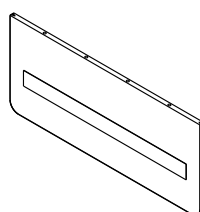


PEÇA 3 - Degrau Maior (Quantidade 01)

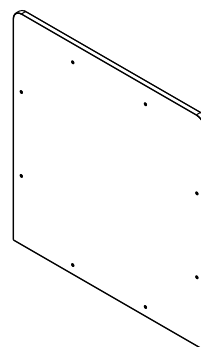


PEÇA 2 - Lateral DIREITA da escada (Quantidade 01)

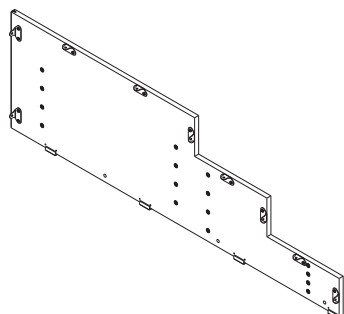


PEÇA 5 - Fundo da Escada (Quantidade 01)

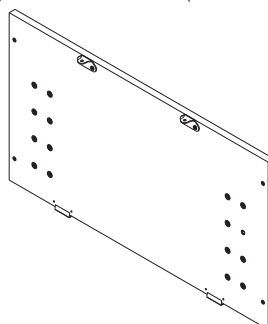


PEÇA 6 - Espelho da Escada (Quantidade 03)

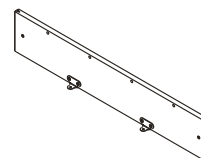


PEÇA 19 - Cavilha Øx40mm (Quantidade 08)

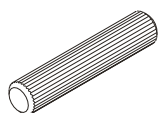


PEÇA 20 - Parafuso Allen M4 (Quantidade 26)

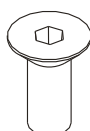

PEÇA 21 - Porca cilíndrica (Quantidade 06).

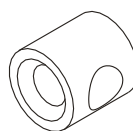


PEÇA 23 - Parafuso Allen 1/4x50mm (Quantidade 06).

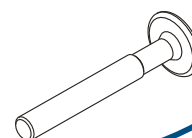


Montagem do produto

Montagem - Escada

1º Passo: Alinhe as laterais esquerda e direita da escada conforme mostrado na figura, e fixe as laterais no fundo da escada usando a CHAVE ALLEN 2,5 mm e o PÁRAFUSO ALLEN M4

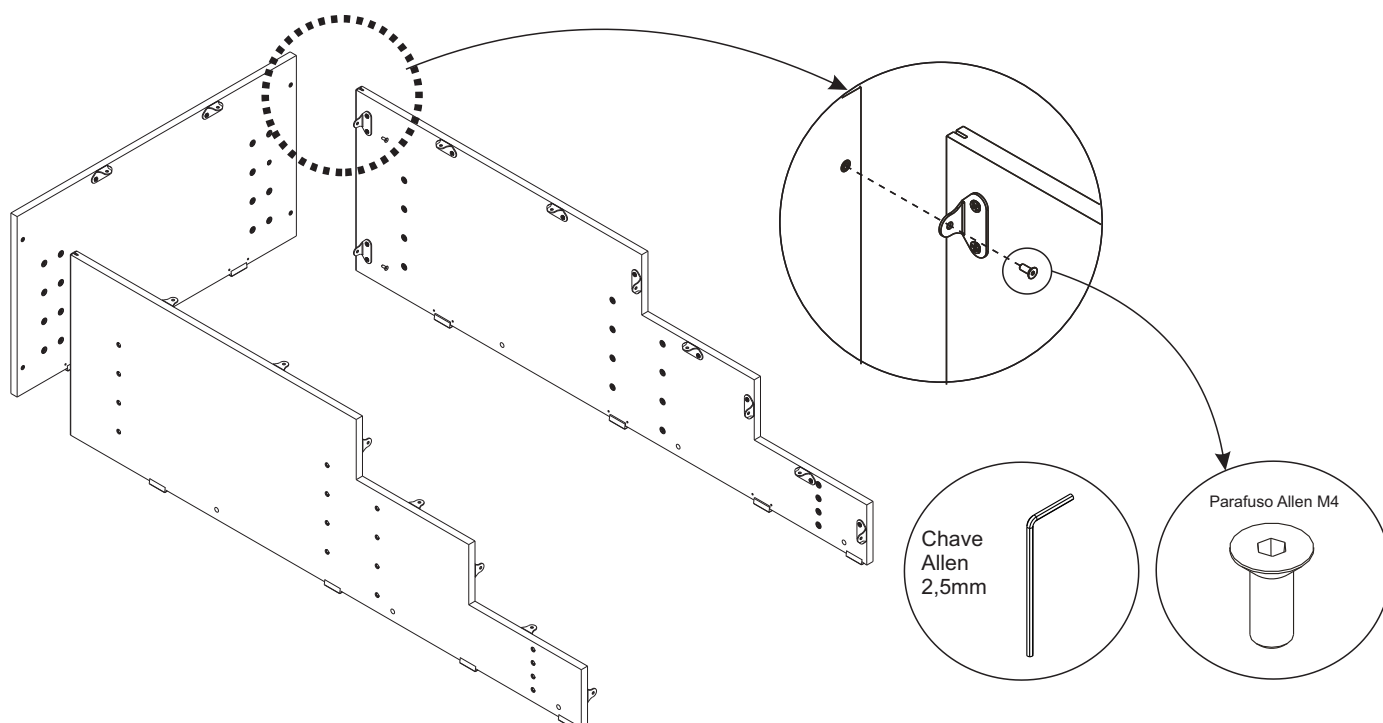


Perceba na imagem abaixo como deve ficar o conjunto todo montado.

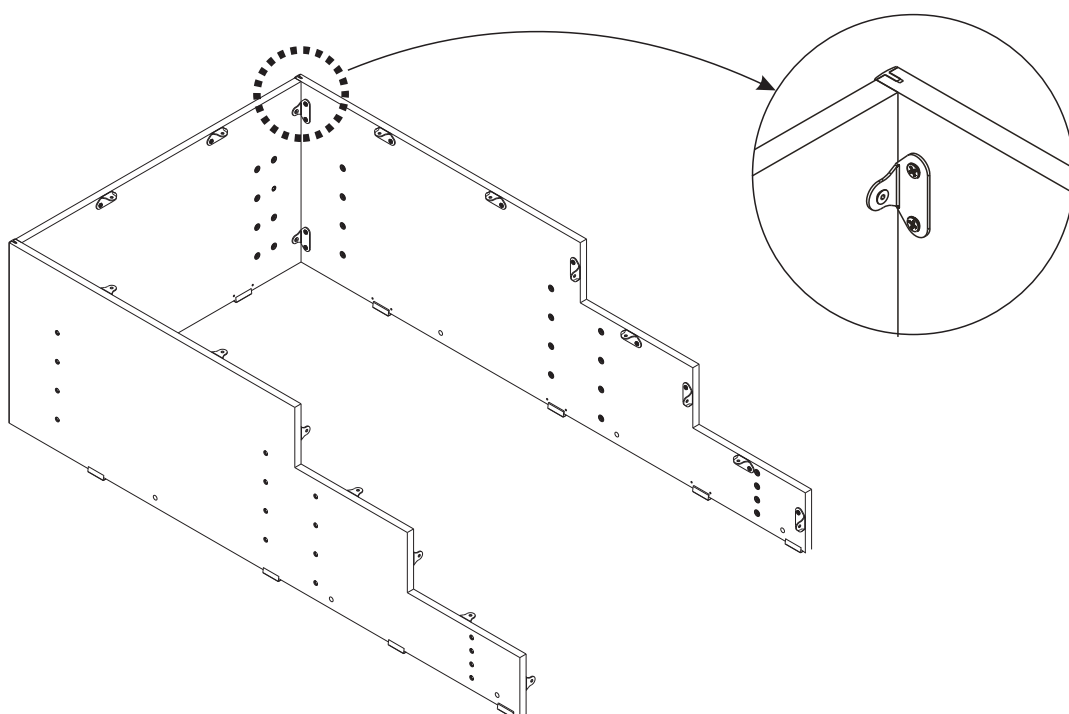


Montagem do produto

Montagem - Escada

2º Passo: Alinha a furação da estrutura montada no primeiro passo com os três espelhos da escada, atenção, as cantoneiras dos espelhos devem ficar voltados para cima, conforme mostra a imagem

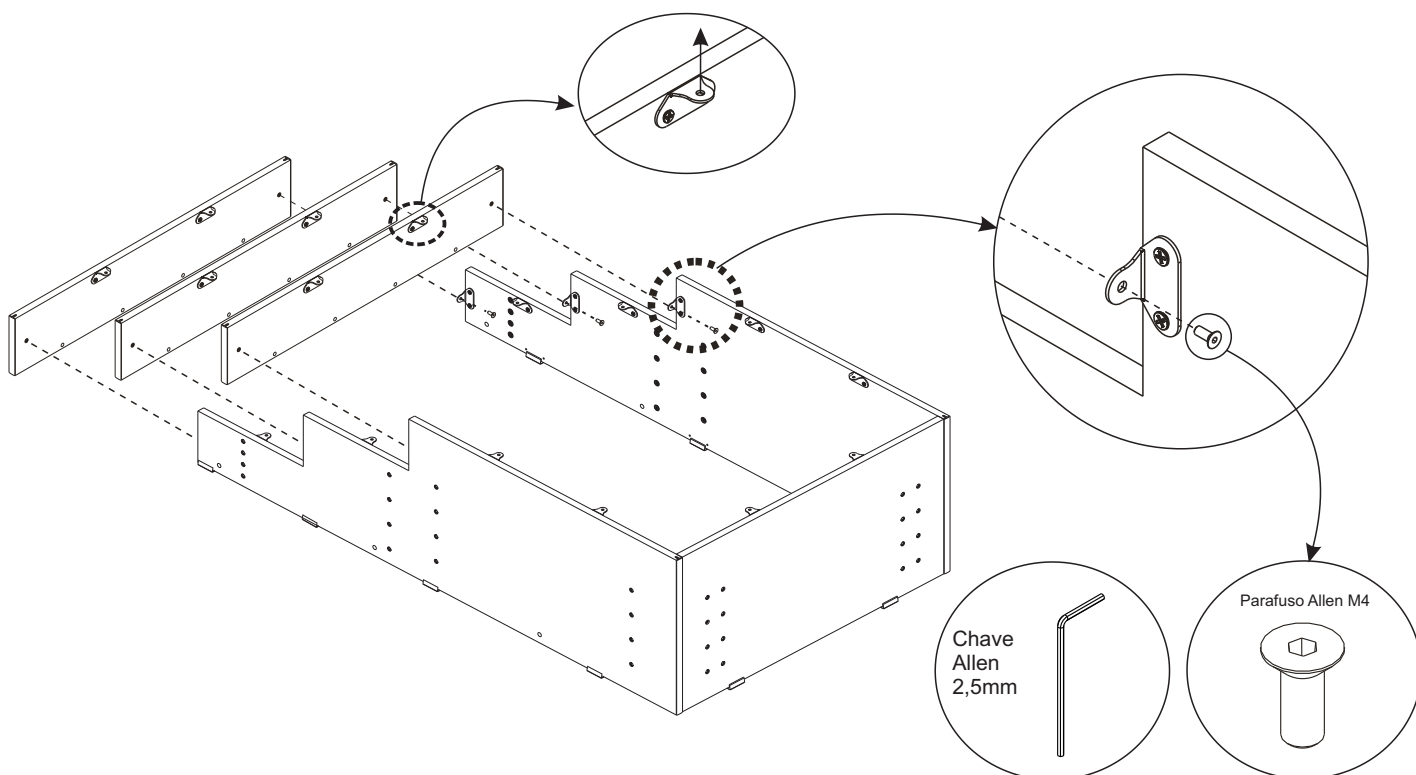


Perceba na imagem abaixo como deve ficar o conjunto do 1º e 2º passos montados.

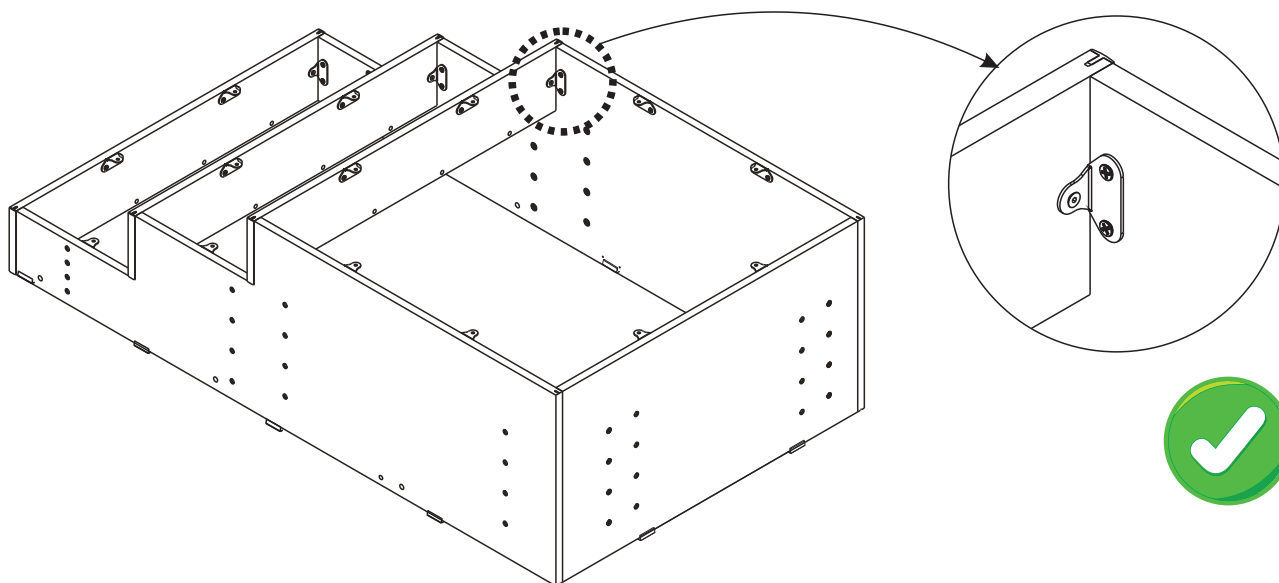


Montagem do produto

Montagem - Escada

3º Passo: Com a parte formada no primeiro e segundo passos, deve-se alinhar os furos dos degraus com as cantoneiras dos espelhos, estruturas esquerda e direita e fundo da escada, após alinhar primeiramente aperte os parafusos. Com os parafusos apertados, as cavilhas de madeira devem ser inseridas nos orifícios presentes nos espelhos, como demonstra a figura.

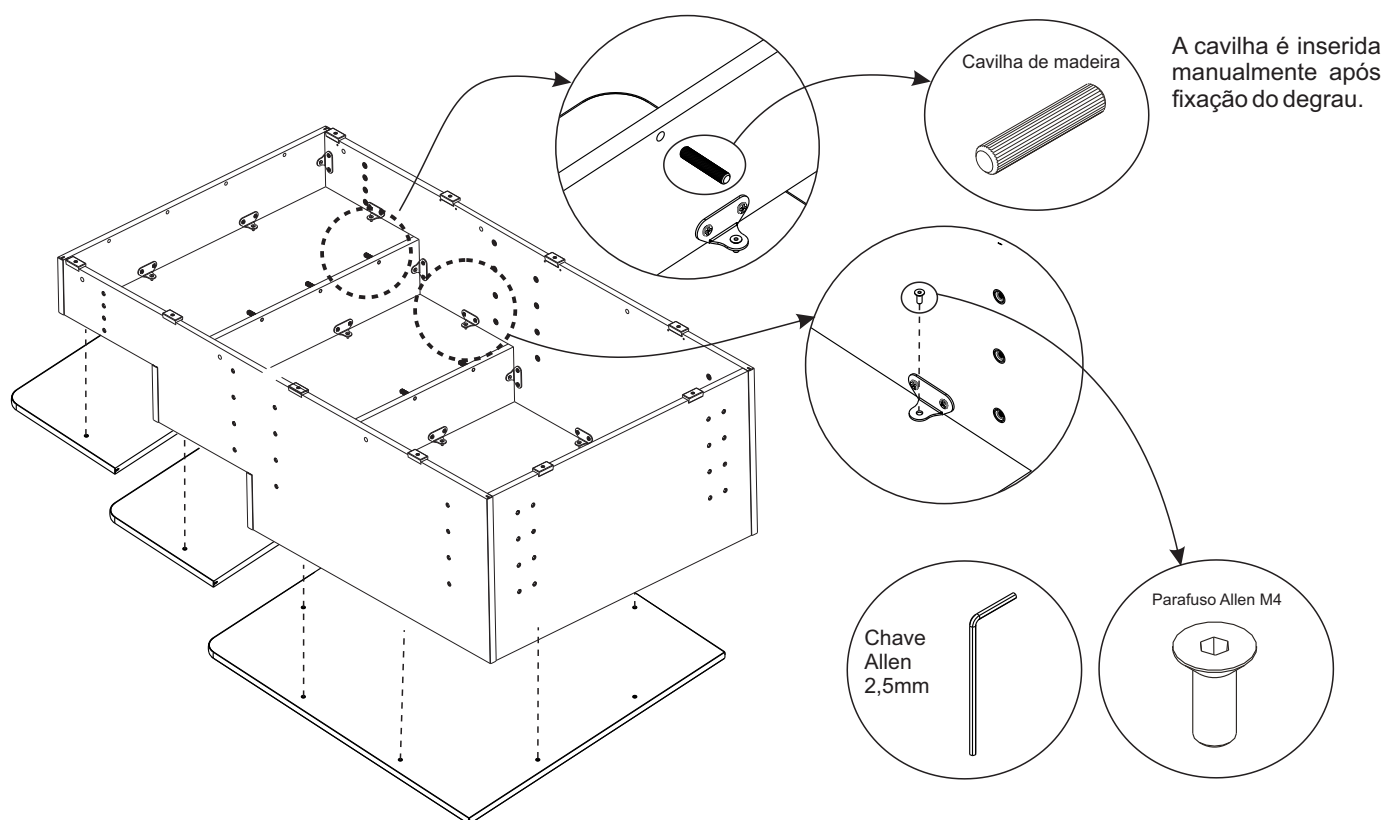


* Perceba na imagem abaixo como deve ficar o conjunto do 1º, 2º e 3º passos montado.

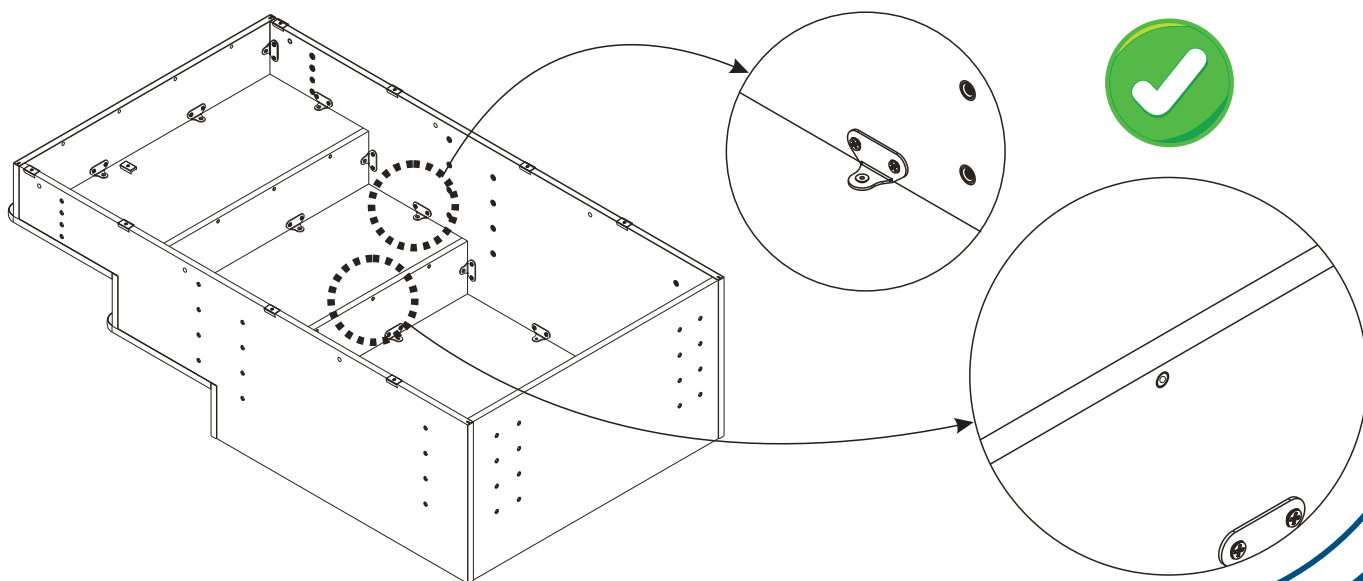


Montagem do produto

Montagem - Escada

4º Passo: Para instalar o reforço, basta alinhar a furação presente nas laterais da escada, como mostrado na imagem menor a esquerda. Para fixação deve-se usar uma porca cilíndrica e o Parafuso 1/4X50mm, como na imagem

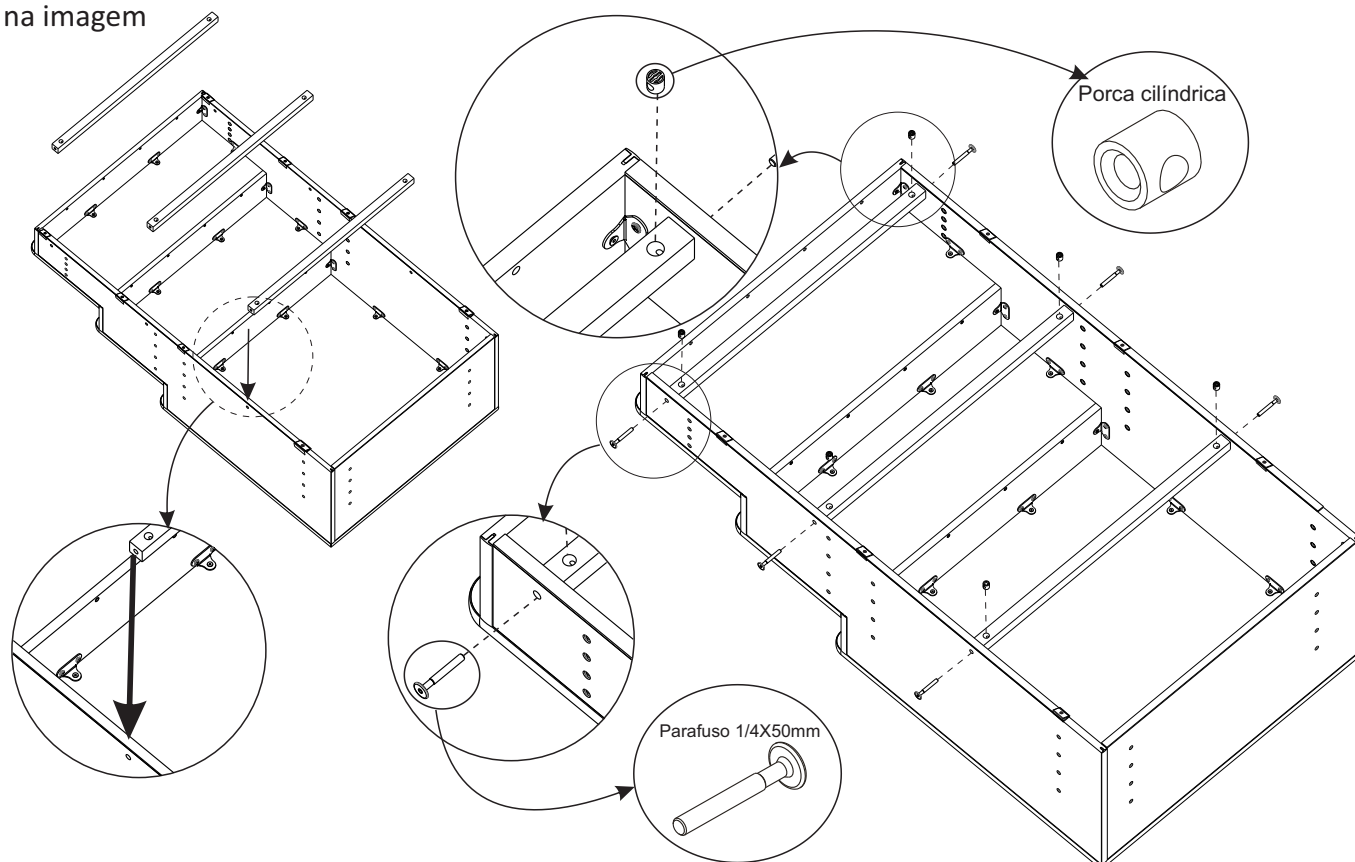

* Perceba na imagem abaixo como deve ficar o conjunto todo montado.

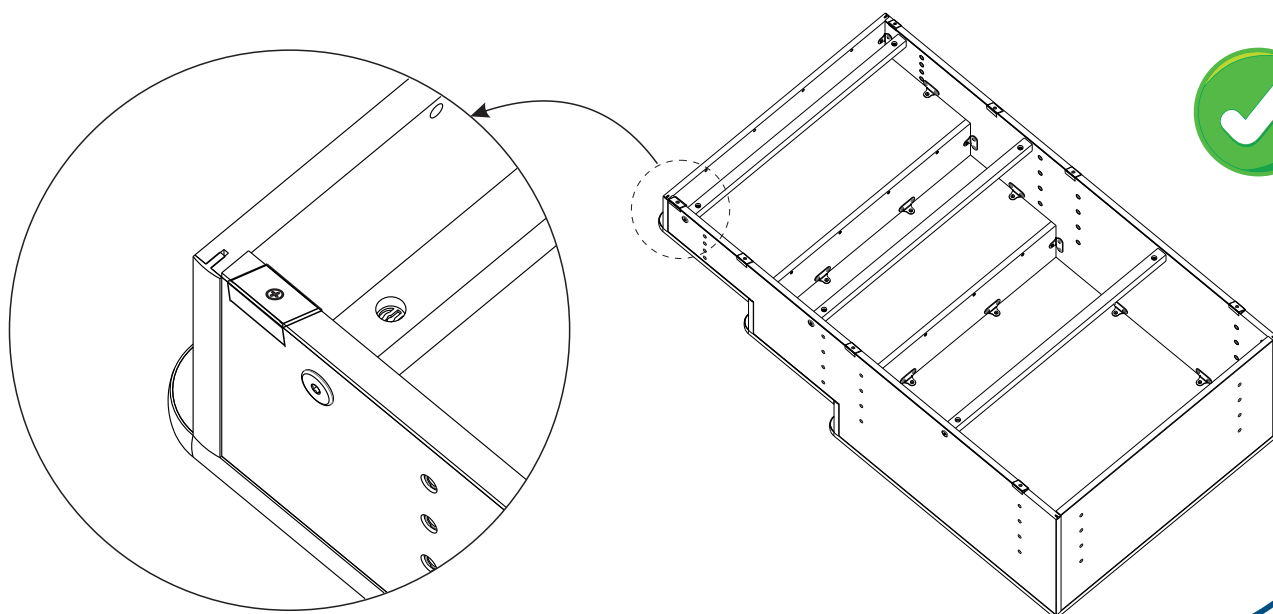


Montagem do produto

Montagem - Rampa

PASSO A PASSO DA MONTAGEM - ETAPA 2


Nessa etapa vamos realizar a montagem da rampa da escada. Logo a baixo temos uma imagem ilustrada da rampa já montada para um melhor esclarecimento.

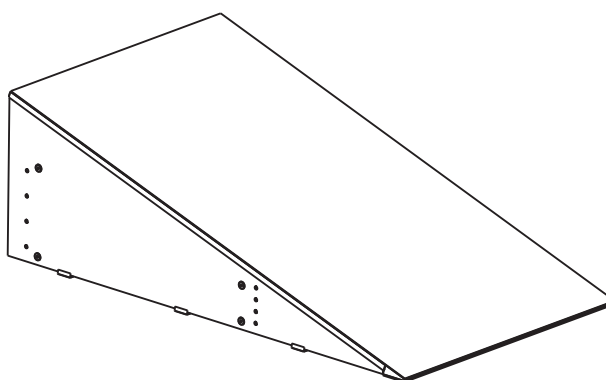


COMPONENTES NECESSÁRIOS

Este conjunto é composto por 8 componentes diferentes sendo eles:


PEÇA 9 - Lateral esquerda para rampa (Quantidade 01)

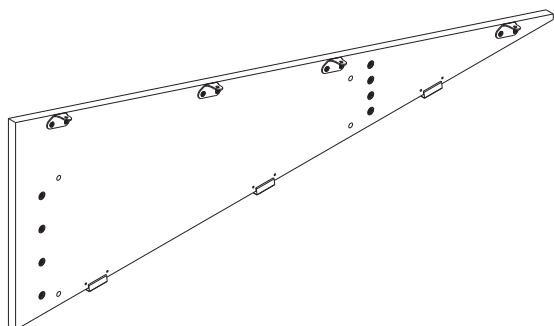


PEÇA 8 - Lateral direita para rampa (Quantidade 01)

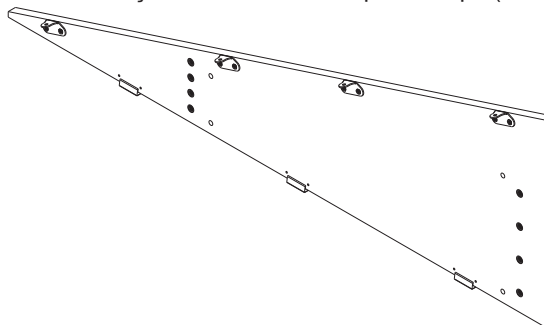


PEÇA 10 - Apoio maior interno da rampa (Quantidade 01)

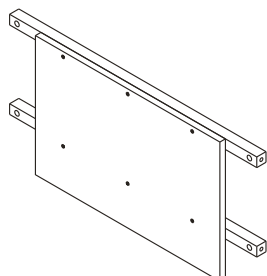


PEÇA 14 - Piso de rampa com ravena (Quantidade 01)

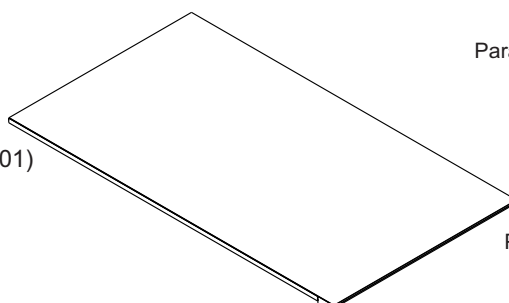


PEÇA 11 - Apoio menor interno da rampa (Quantidade 01)

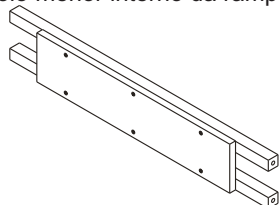


Parafuso Allen M4 (Quantidade 06)

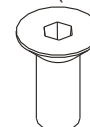

Parafuso Allen 1/4X50mm (Quantidade 08)

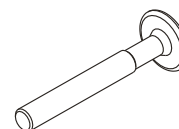


Porca cilíndrica M4 (Quantidade 08)

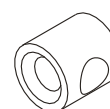


Montagem do produto

Montagem - Rampa

1º Passo: Alinhe as cantoneiras das laterais da rampa com os furos presentes na mesma, depois fixe a rampa nas laterais utilizando os parafusos M4

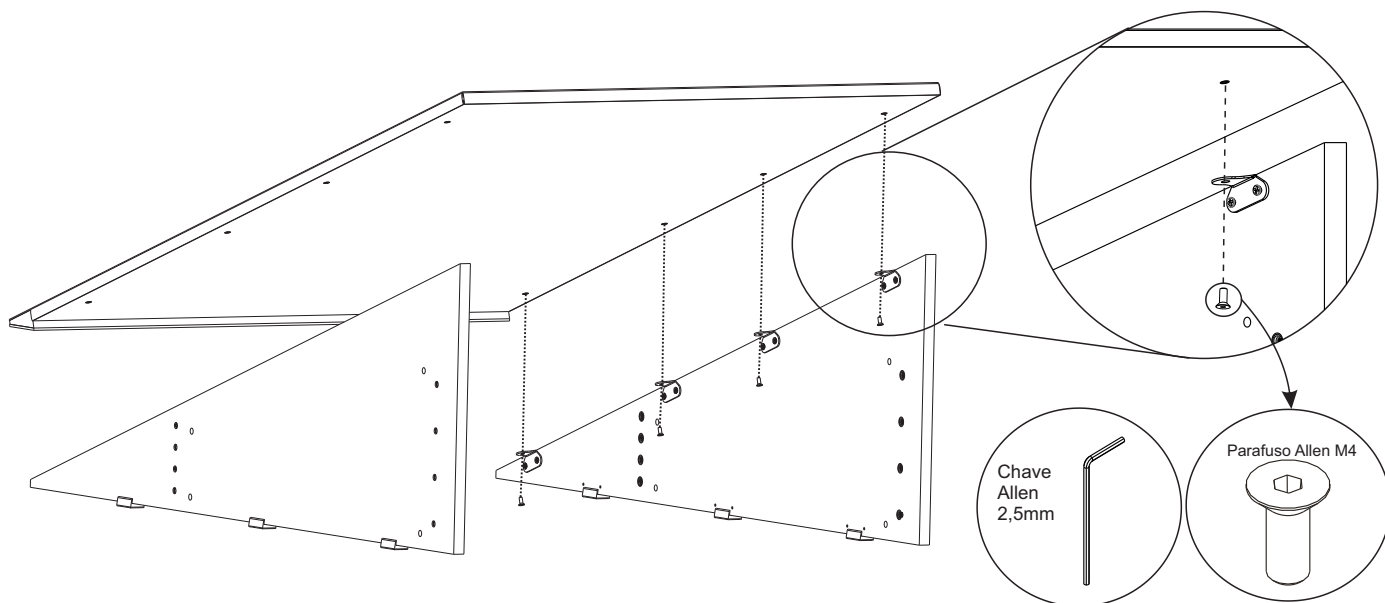


Perceba na imagem abaixo como deve ficar o conjunto do PASSO 1 montado.

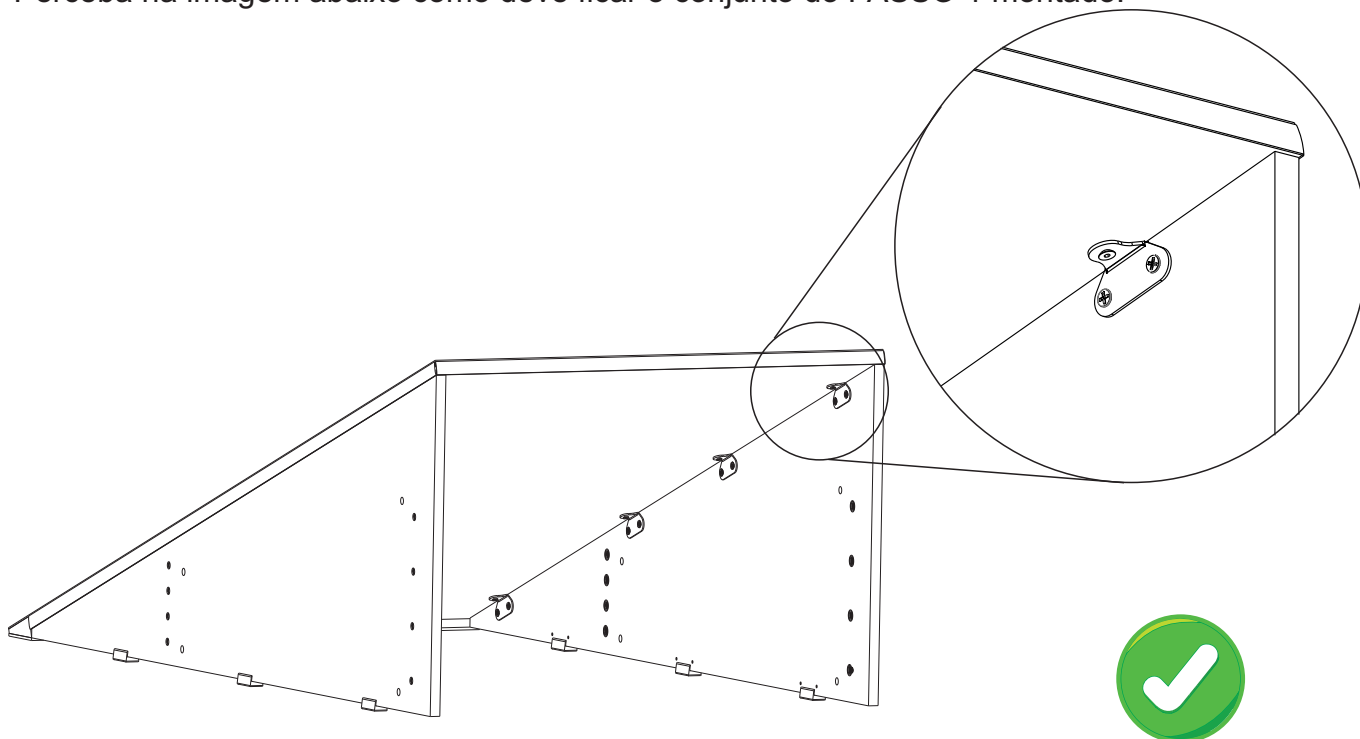


Montagem do produto

Montagem - Rampa

2º Passo: Alinhe os apoios da rampa como mostrado na imagem a esquerda. **A montagem deve ser feita exatamente como mostrado na figura, as chapas dos apoios devem estar com suas faces viradas para ponta da rampa.** A seguir prenda os apoios usando o Parafuso 1/4X50mm e a porca cilíndrica 1/4", apertar usando a Chave Allen 4mm

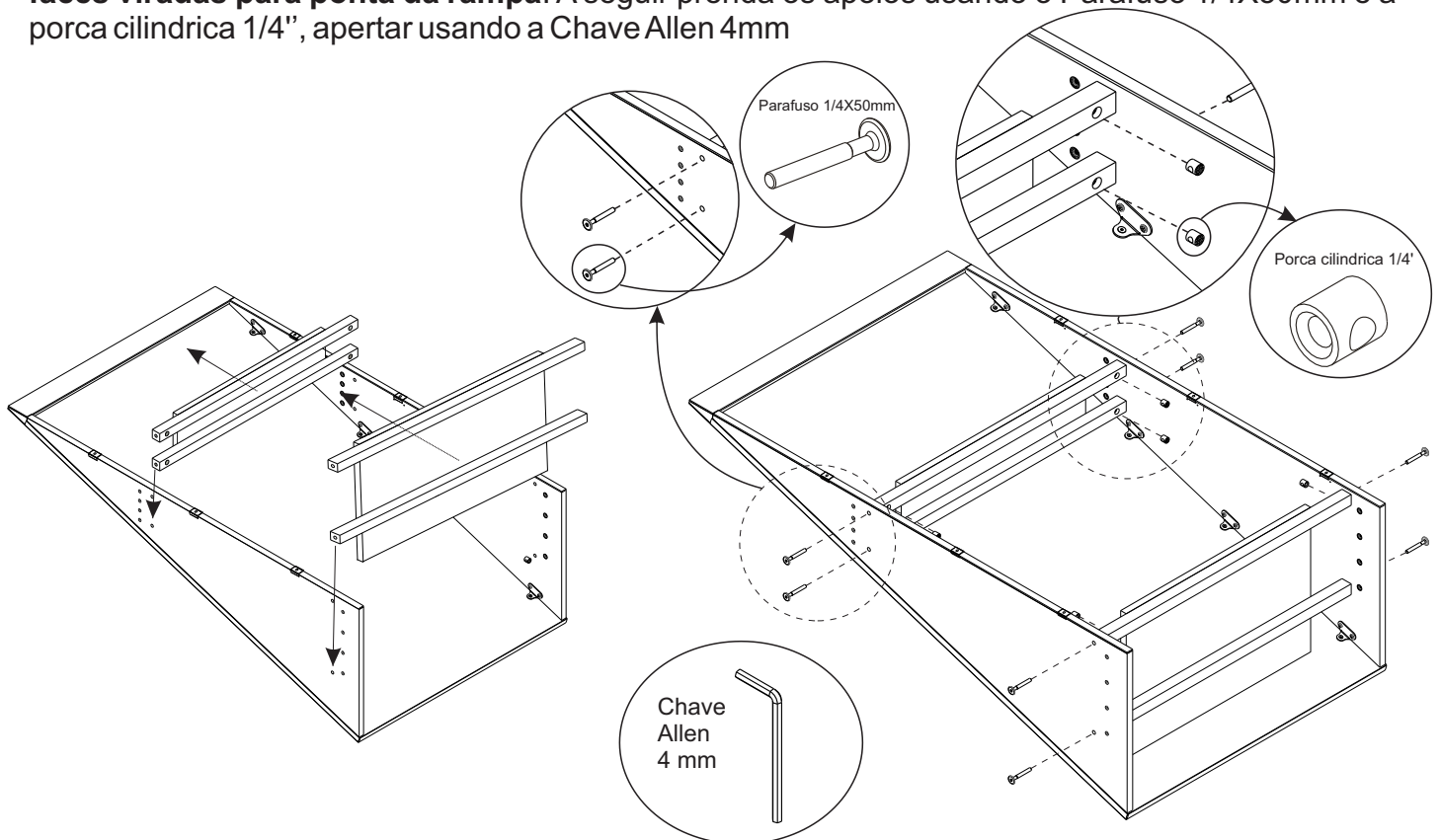

Perceba na imagem abaixo como deve ficar o conjunto montado.

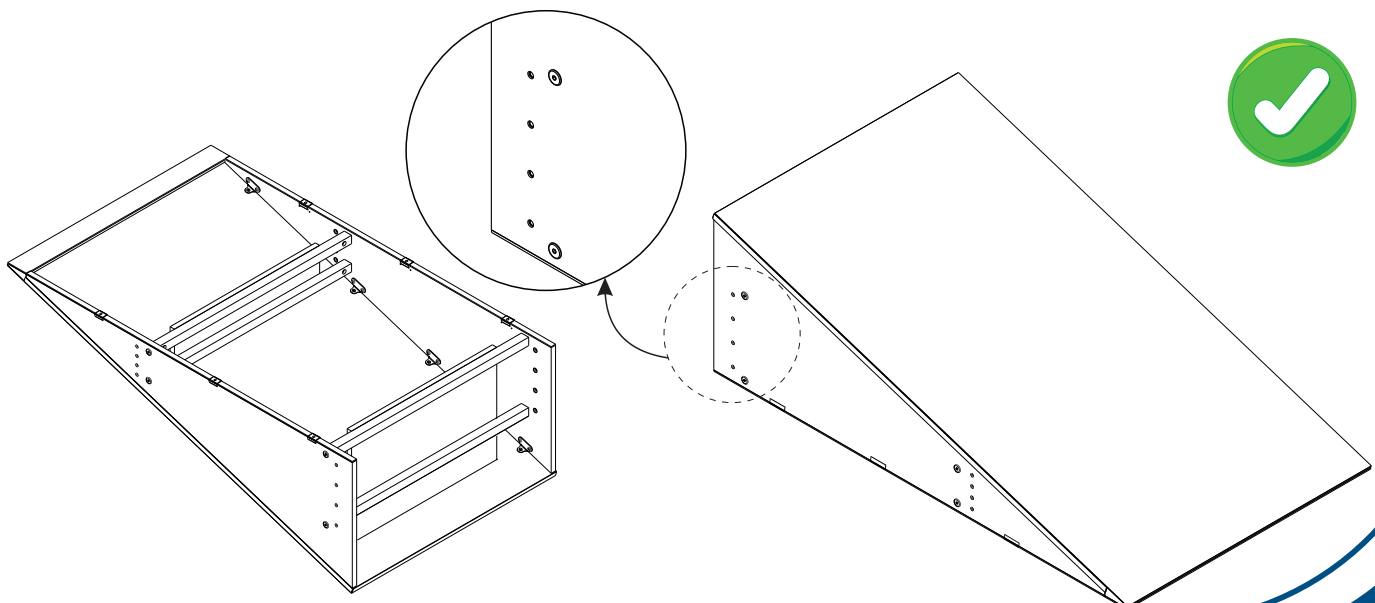


Montagem do produto

Montagem 90° - Corrimões da Rampa

PASSO A PASSO PARA MONTAGEM - ETAPA 3


Nessa etapa vamos realizar a montagem dos corrimões da rampa, essa parte é igual tanto para uso da escada linear, quanto em 90°. Logo a baixo temos uma imagem ilustrada do conjunto já montado para melhor esclarecimento.

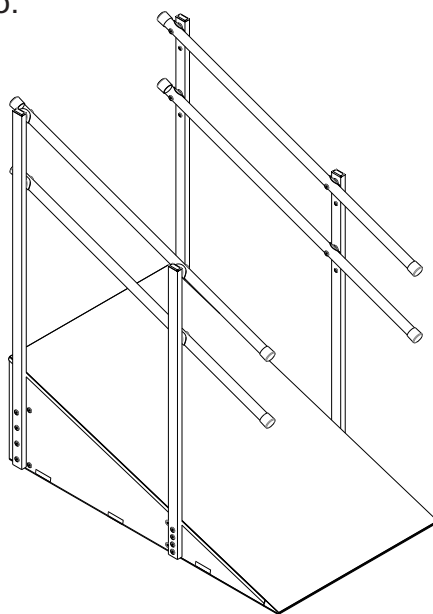


COMPONENTES NECESSÁRIOS

Este conjunto é composto por 6 componentes diferentes sendo eles:


PEÇA 12 - Apoio maior para corrimão (Quantidade 2)

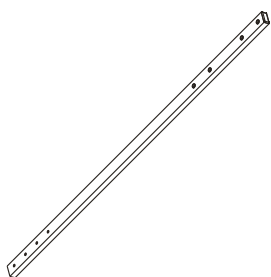

PEÇA 16 - Bastão maior 32x1200mm (Quantidade 4)

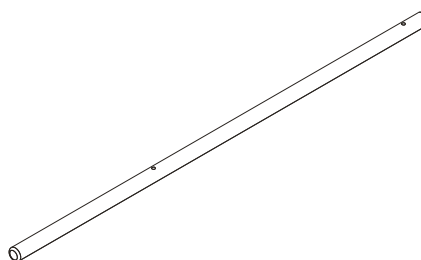


PEÇA 30 - Parafuso Allen 1/4x60mm (Quantidade 8)

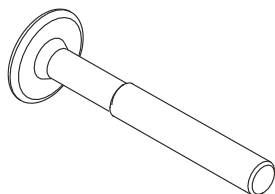


PEÇA 22 - Arruela estampada 1 1/4" (Quantidade 8)



PEÇA 13 - Apoio menor para corrimão (Quantidade 2)

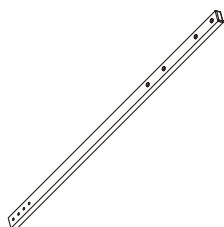


PEÇA 23 - Parafuso Allen 1/4x50mm (Quantidade 16)

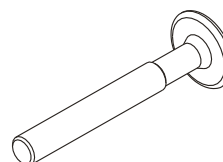


Montagem do produto

Montagem 90° - Corrimões da rampa

1º Passo: com a rampa montada, use a chave allen 4mm para pender as barras metálicas na rampa usando o Parafuso Allen 1/4x50mm na parte inferior das barras, depois prenda as barras do corrimões utilizando os Parafusos Allen 1/4x60mm na ordem descrita abaixo: arruela estampada encostada no suporte metálico, bastão encostado na arruela e parafuso 1/4x60mm, para fixar as peças juntas. Imagem detalhada para melhor entendimento.

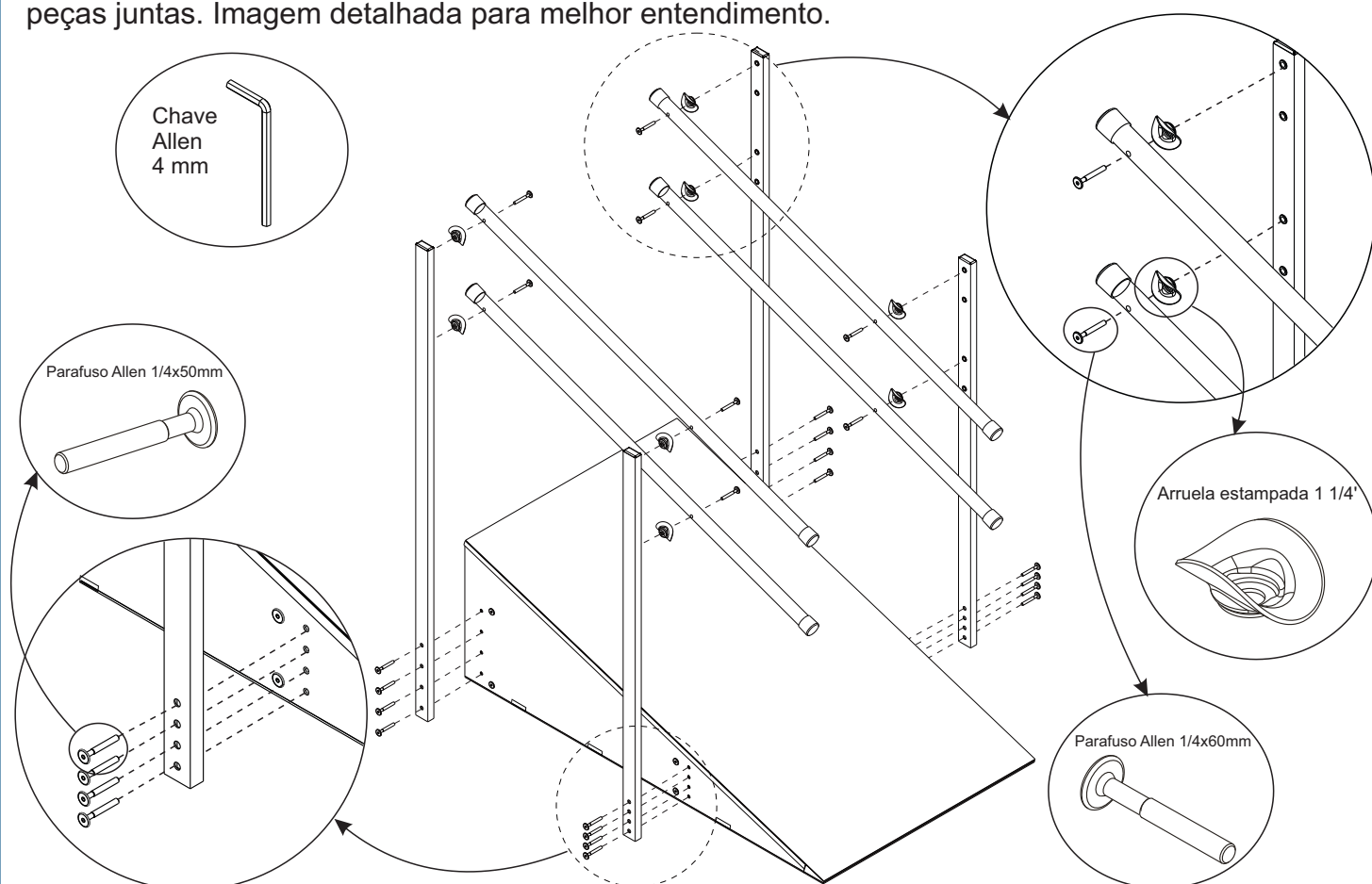

Perceba na imagem abaixo como deve ficar o conjunto da ETAPA 4 montado.

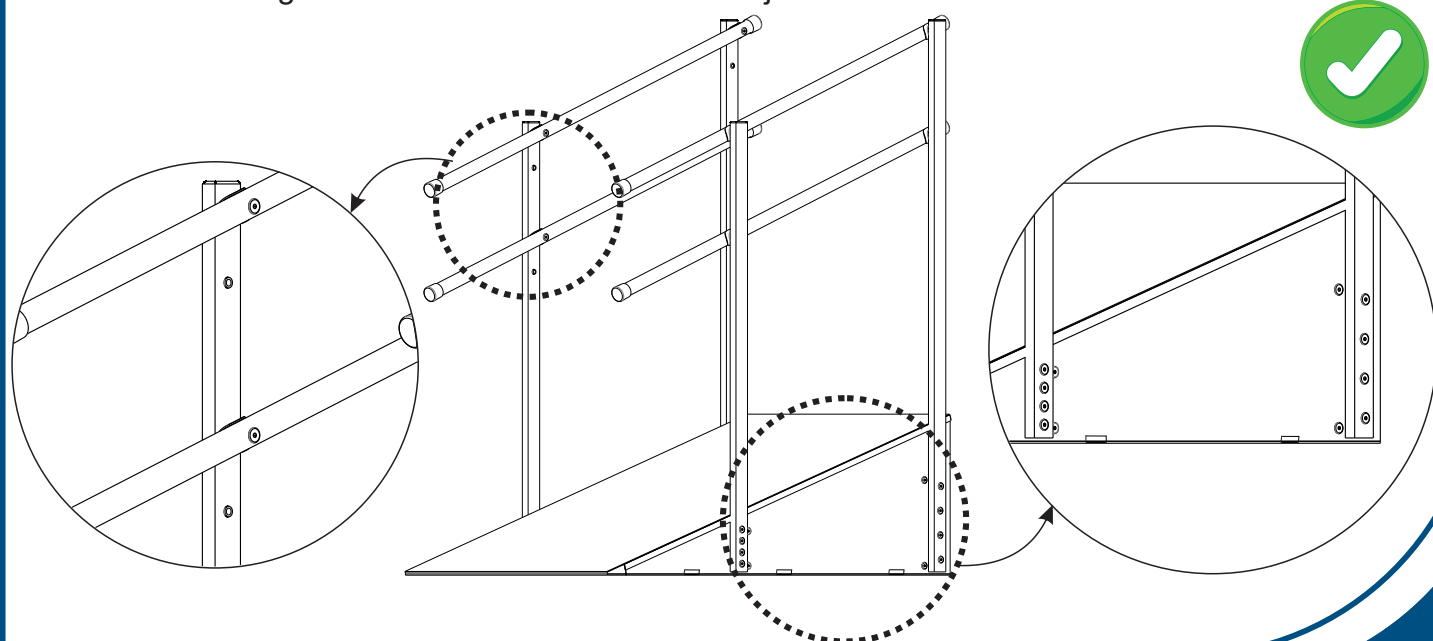


Montagem do produto

Montagem 90° - Escada com Corrimão

PASSO A PASSO DA MONTAGEM - ETAPA 4 A


Nessa etapa vamos realizar a montagem do conjunto de bastões dos degraus do produto. Logo abaixo temos uma imagem ilustrada do conjunto já montado para um melhor esclarecimento.

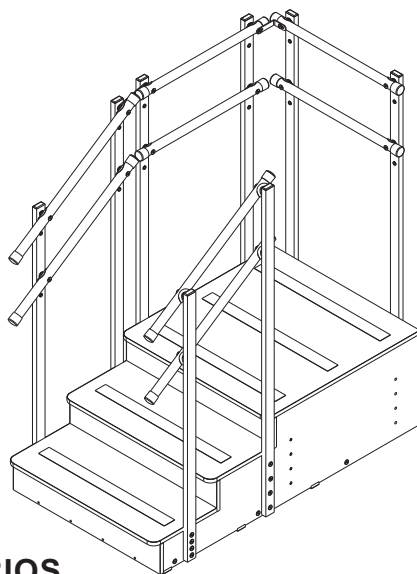


COMPONENTES NECESSÁRIOS

Este conjunto é composto por 7 componentes diferentes sendo eles:


PEÇA 12 - Apoio maior para corrimão (Quantidade 6)

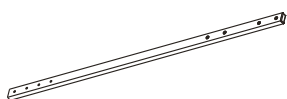


PEÇA 13 - Apoio menor para corrimão (Quantidade 2)

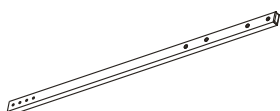


PEÇA 17 - Bastão meio 32x600mm (Quantidade 04)

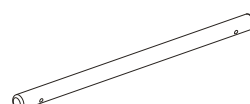

PEÇA 29
Trava 04

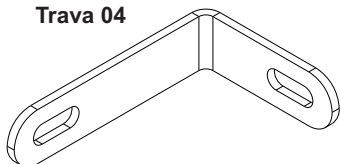


PEÇA 15 - Bastão de degraus 32x700mm (Quantidade 04)

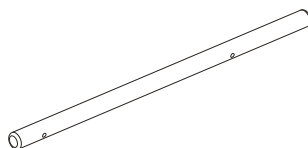


PEÇA 22 - Arruela estampada 1 1/4" (Quantidade 16)




PEÇA 30 - Parafuso Allen 1/4x60mm (Quantidade 16)

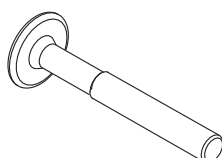

PEÇA 28
Trava 03

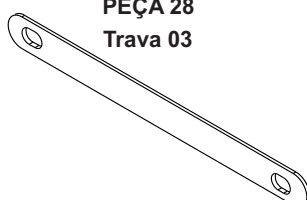

PEÇA 23 - Parafuso Allen 1/4x50mm (Quantidade 32)

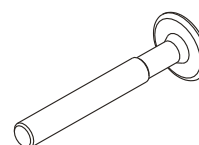

Montagem do produto







Montagem 90° - Escada com corrimão

1º Passo: A montagem do Apoio maior (Peça 12) e o Apoio menor Peça 13 do corrimão dos degraus é muito similar a da rampa. Nos furos da primeira escada se encaixa o suporte metálico menor utilizando o Parafuso 1/4x50mm com o auxílio da chave Allen 4mm realize o aperto dos itens.



ATENÇÃO


Como a escada pode ser usada tanto para esquerda quanto para a direita deve-se atentar na fixação das barras metálicas. Utilize a orientação a baixo para montagem

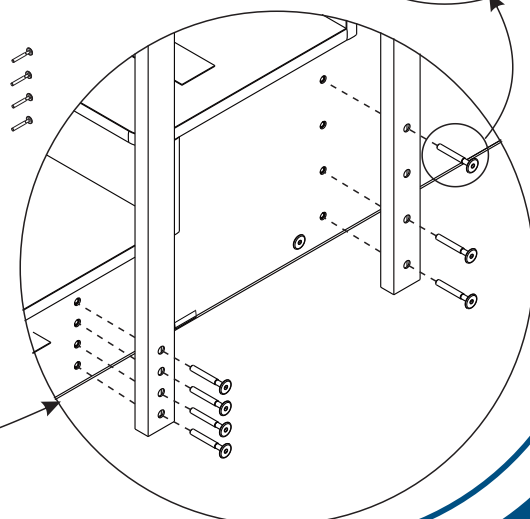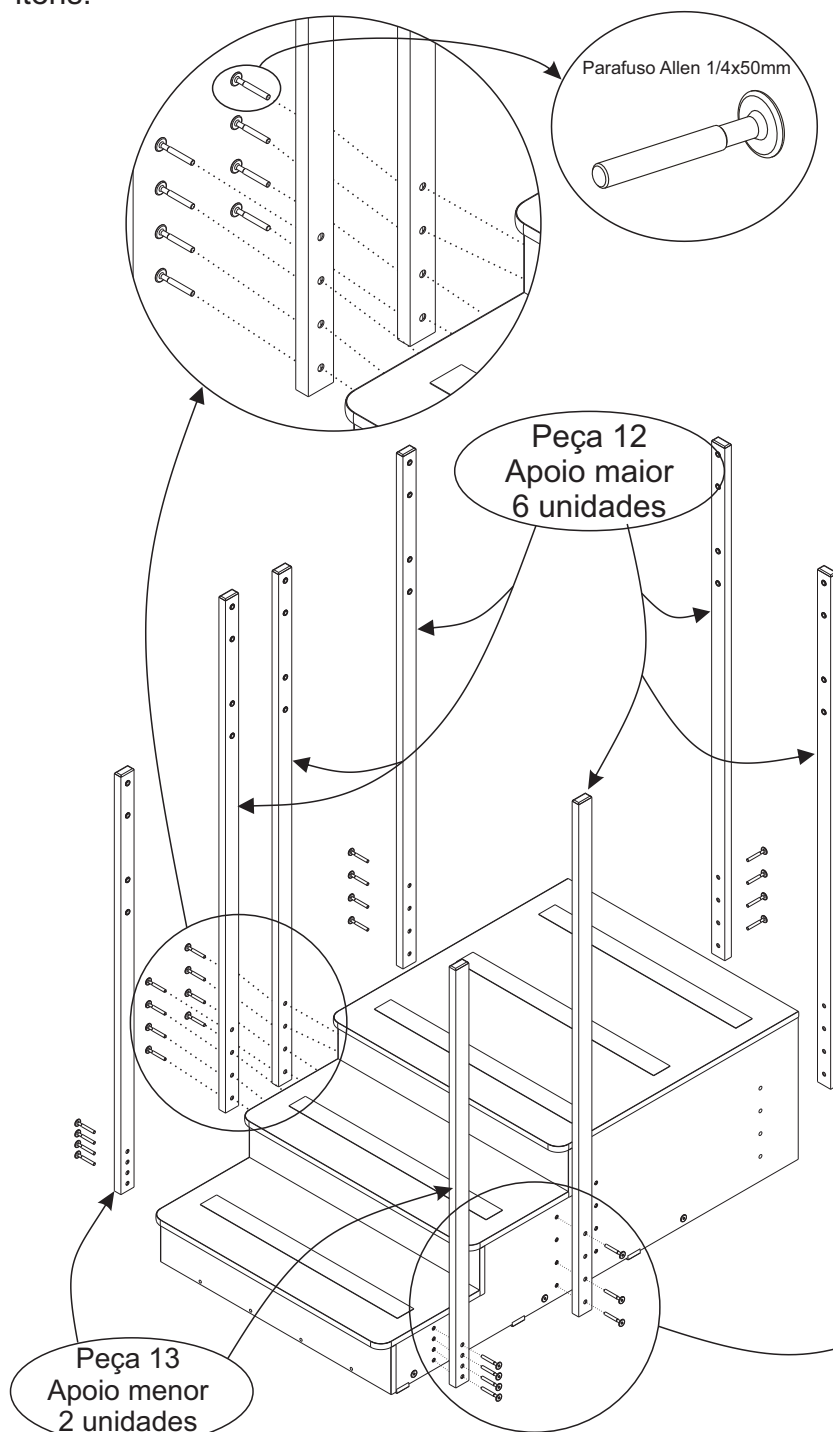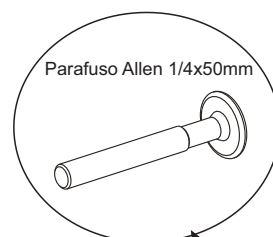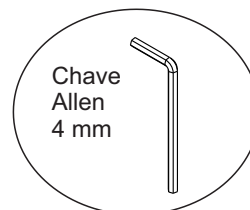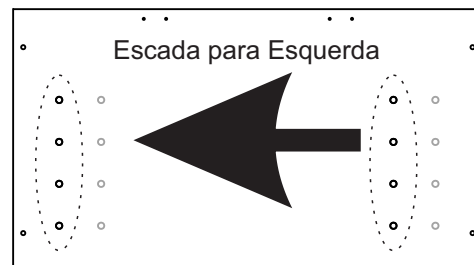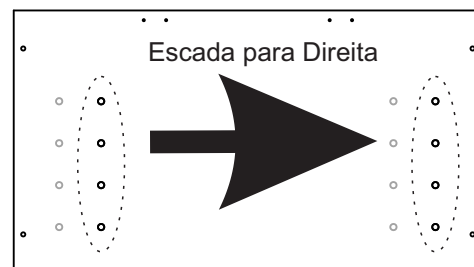

Montagem do produto

Montagem 90° - Bastão do Corrimão


2º Passo: A montagem do Barra do corrimão dos degraus é muito similar a da rampa. A ordem de montagem é barra metálica já fixada no produto utilize a arruela estampada com o bastão do corrimão e os parafuso 1/4x60mm e utilize a chave 4mm para realizar o aperto.

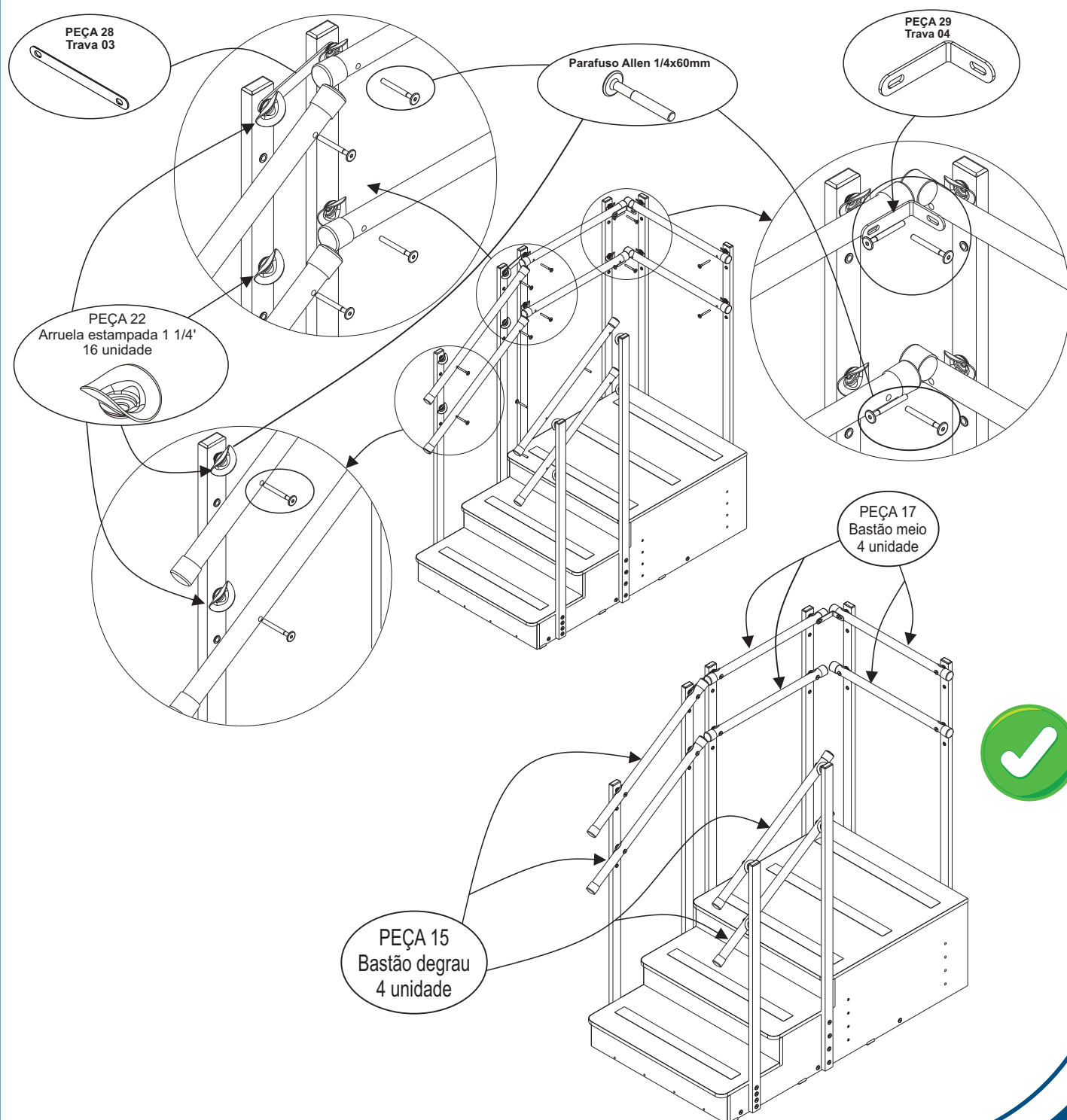

Montagem do produto

Montagem 90° - chapas de fixação


3º Passo: Para acoplar a rampa com as escadas, use as chapas de fixação como mostrado nas imagens a baixo, as mesmas são fixadas junto com os Parafusos Allen 1/4x60mm.

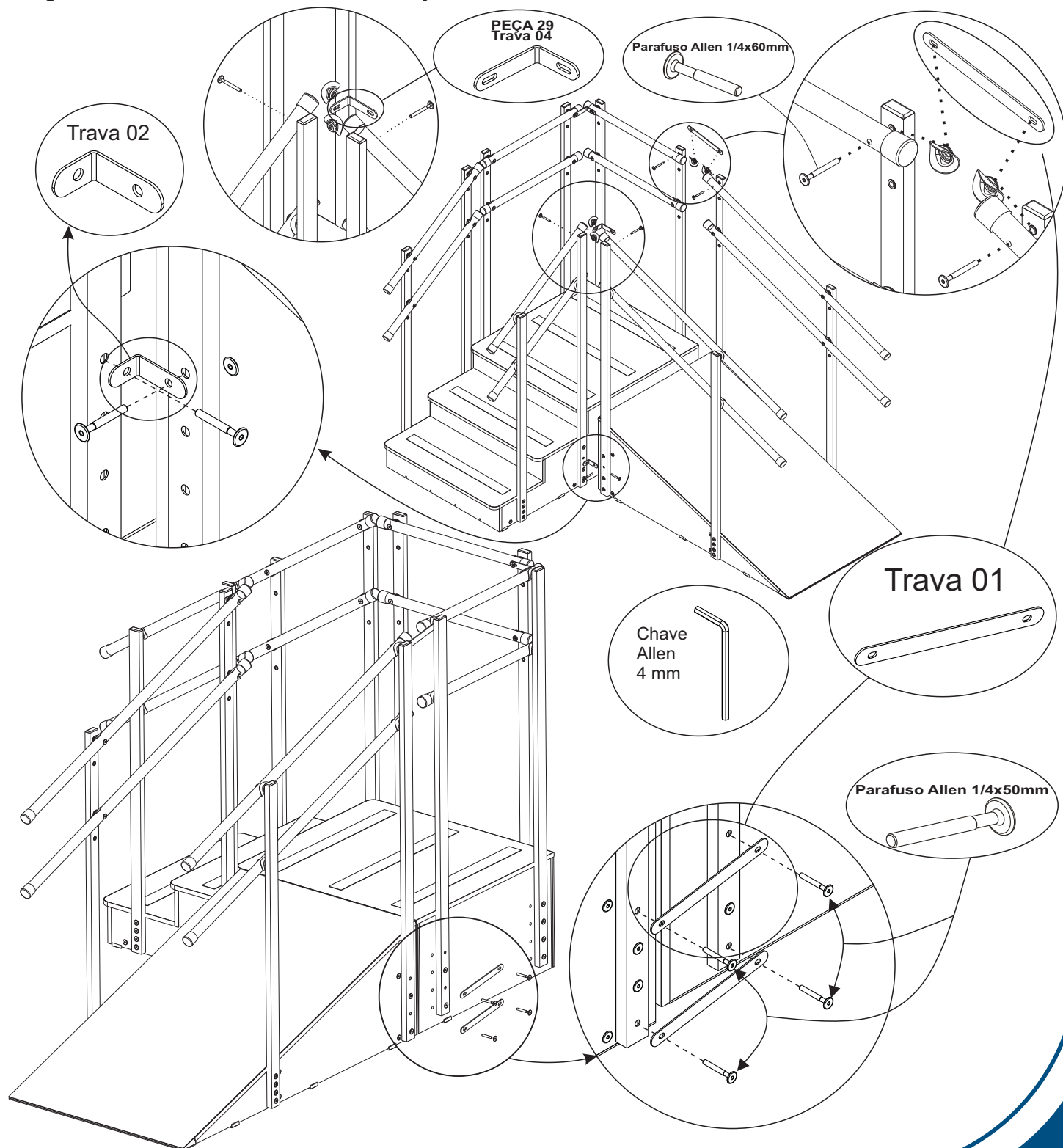

Montagem do produto

Montagem 90° - chapas de fixação

4º Passo: Em seguida revise todos os procedimento de montagem e observando os reforços estejam devidamente montado e com todos os parafuso allen 1/4 x 60mm apertados devidamente.

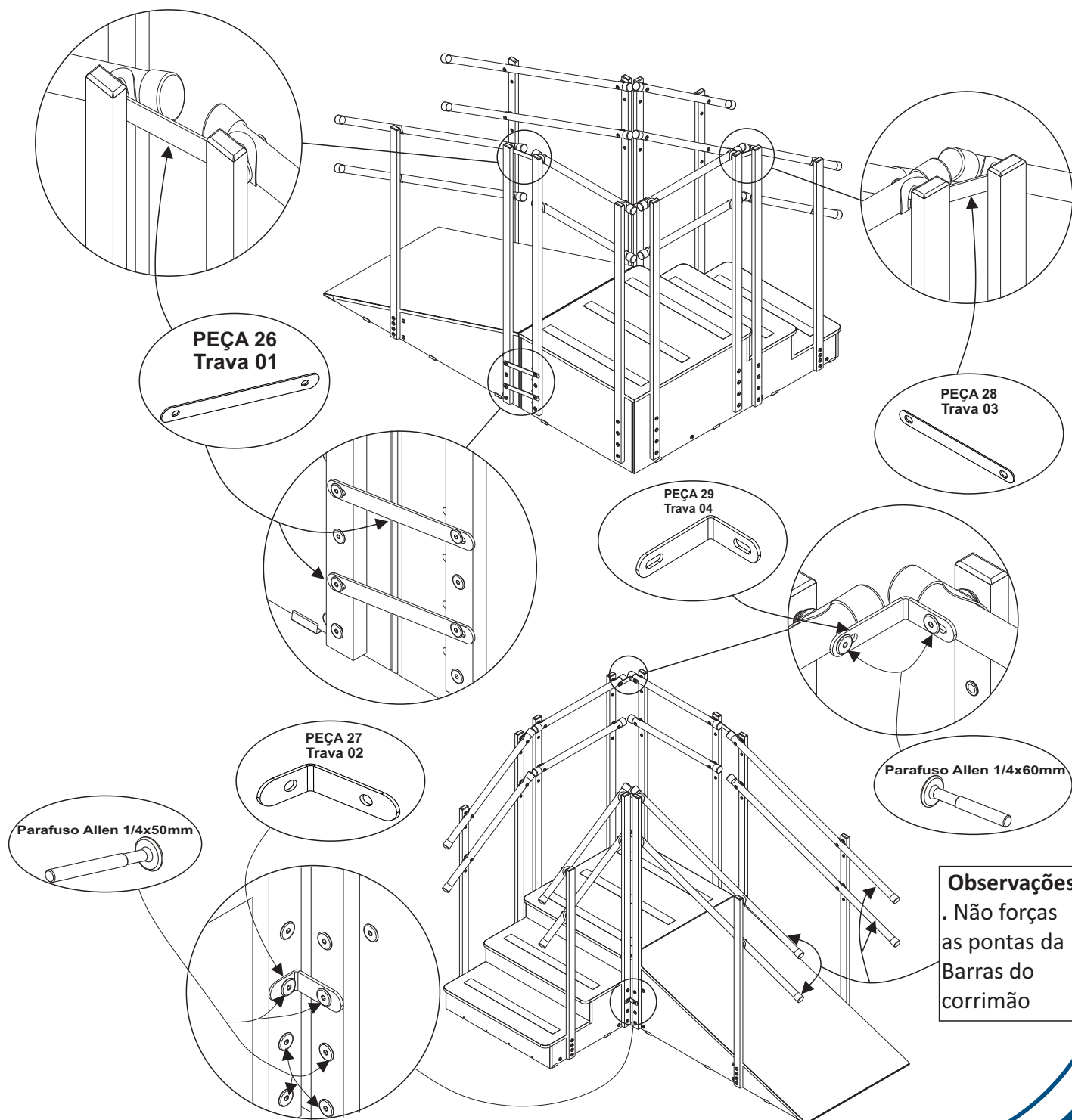


Montagem do produto


Opções de montagem

Como mencionado anteriormente o produto possui muita versatilidade, e pode ser montado de formas diferentes. A seguir se encontram as páginas que contêm instruções para execução da montagem nas duas configurações possíveis.

Montagem 90° - Páginas 18 a 24.

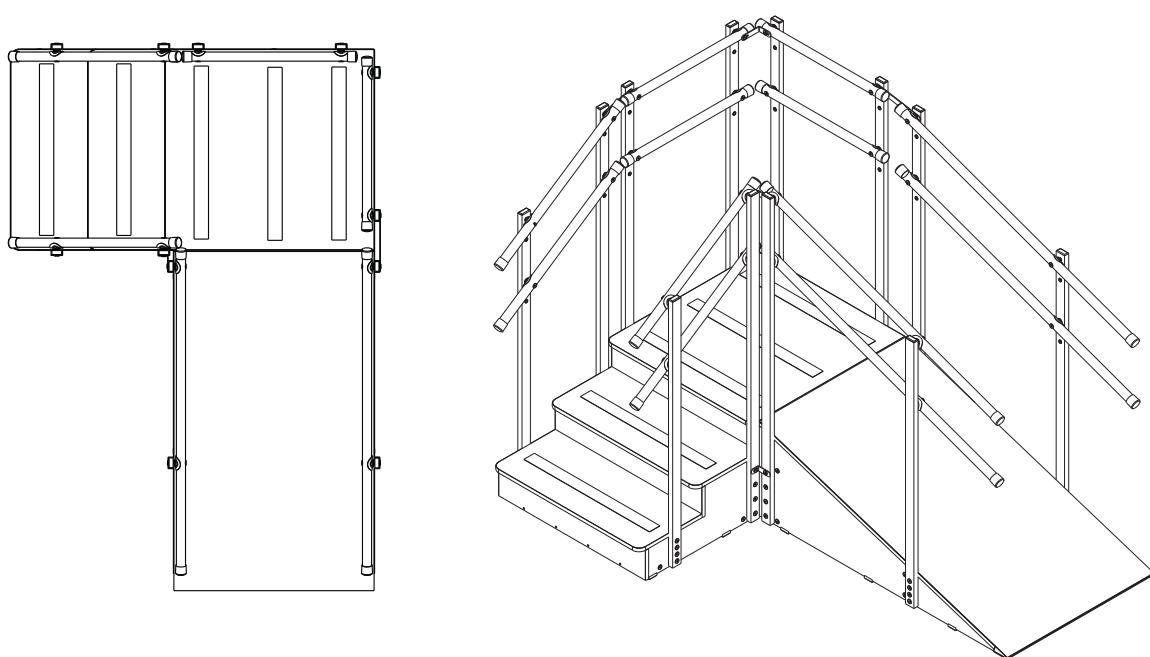

Montagem linear - Páginas 26 a 32.

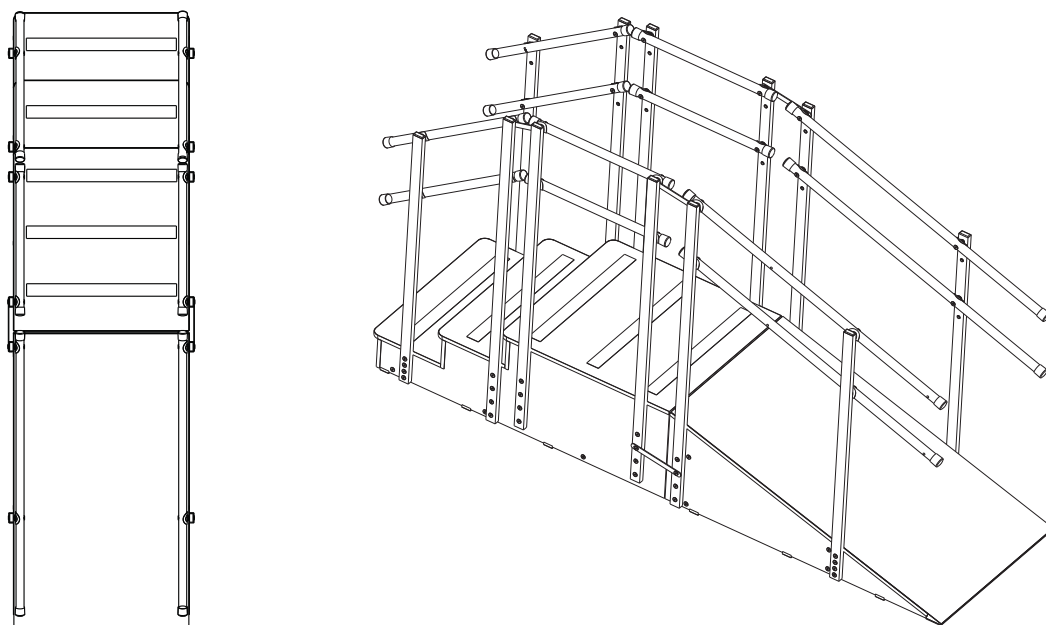


Montagem do produto

Montagem Linear - Corrimão

PASSO A PASSO DA MONTAGEM - ETAPA 4 A

Nessa etapa vamos realizar a montagem do conjunto de bastões dos degraus do produto. Logo abaixo temos uma imagem ilustrada do conjunto já montado para um melhor esclarecimento.

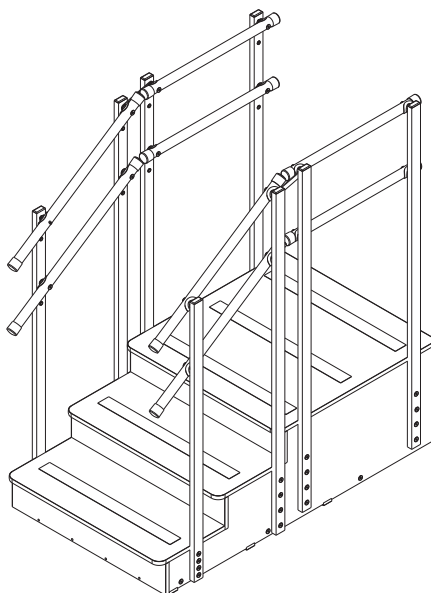




COMPONENTES NECESSÁRIOS

Este conjunto é composto por 7 componentes diferentes sendo eles:

PEÇA 12 - Apoio maior para corrimão (Quantidade 6)



PEÇA 13 - Apoio menor para corrimão (Quantidade 2)

PEÇA 17 - Bastão meio 32x600mm (Quantidade 04)

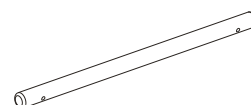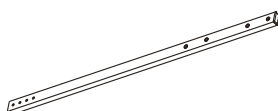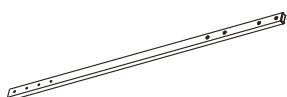

PEÇA 30 - Parafuso Allen 1/4x60mm (Quantidade 16)



PEÇA 23 - Parafuso Allen 1/4x50mm (Quantidade 32)

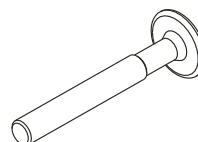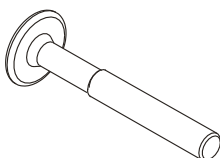

PEÇA 15 - Bastão degraus 32x700mm (Quantidade 04)

PEÇA 28 Trava 03
Quantidade 02


PEÇA 22 - Arruela estampada 1 1/4" (Quantidade 16)

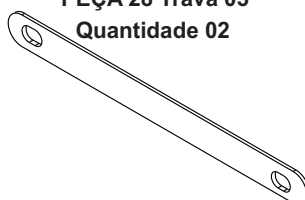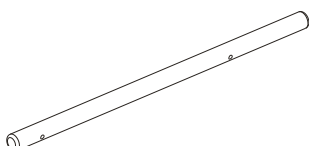

Montagem do produto

Montagem Linear


1º Passo: A montagem do Apoio maior (Peça 12) e o Apoio menor Peça 13 do corrimão dos degraus é muito similar a da rampa. Nos furos da primeira escada se encaixa o suporte metálico menor utilizando o Parafuso 1/4x50mm com o auxilio da chave Allen 4mm realize o aperto dos itens.

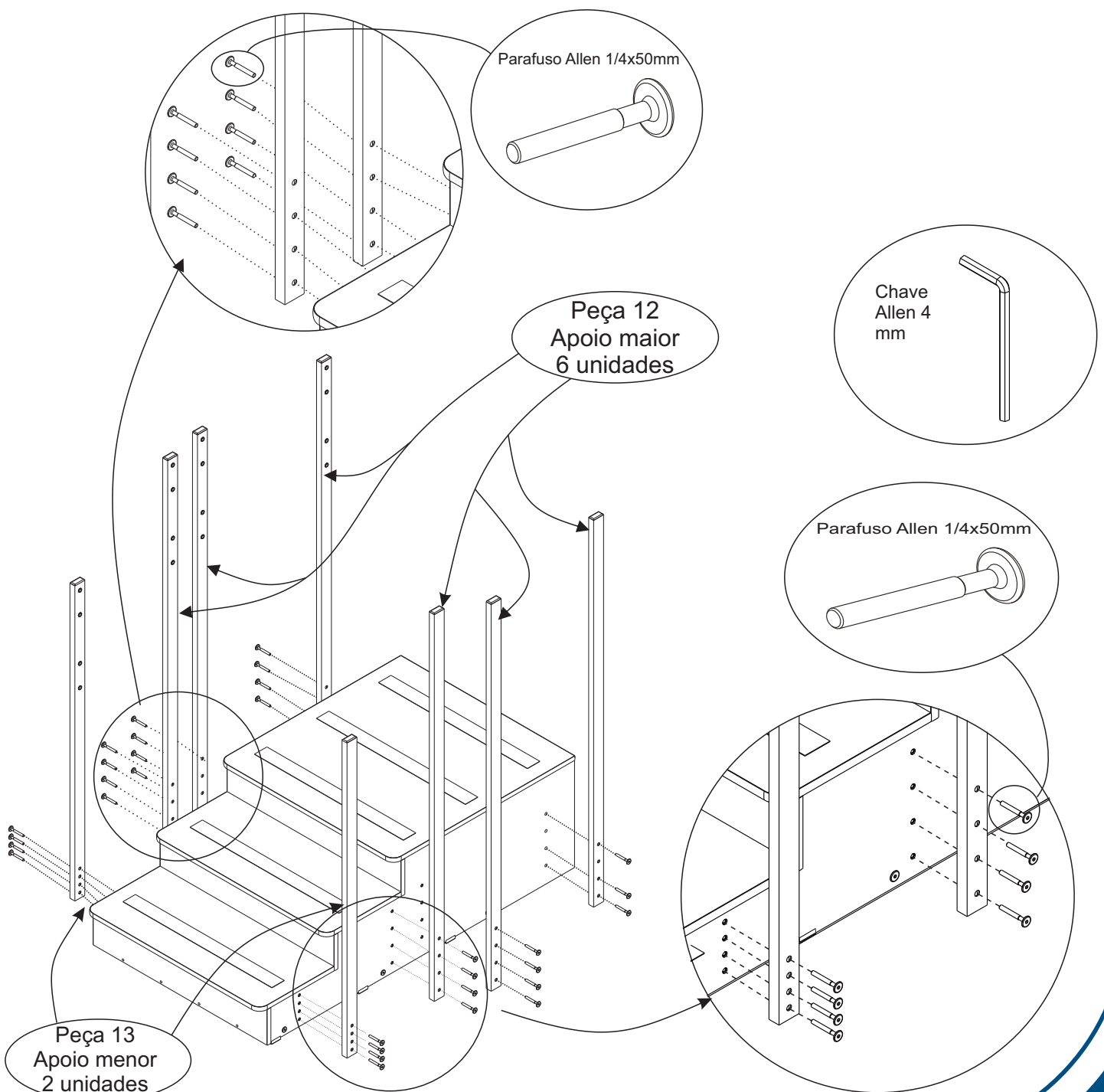

Montagem do produto

Montagem Linear - Bastão do Corrimão

2º Passo: A montagem do Barra do corrimão dos degraus é muito similar a da rampa. A ordem de montagem é barra metálica já fixada no produto utilize a arruela estampada com o bastão do corrimão e os parafuso 1/4x60mm e utilize a chave 4mm para realizar o aperto.

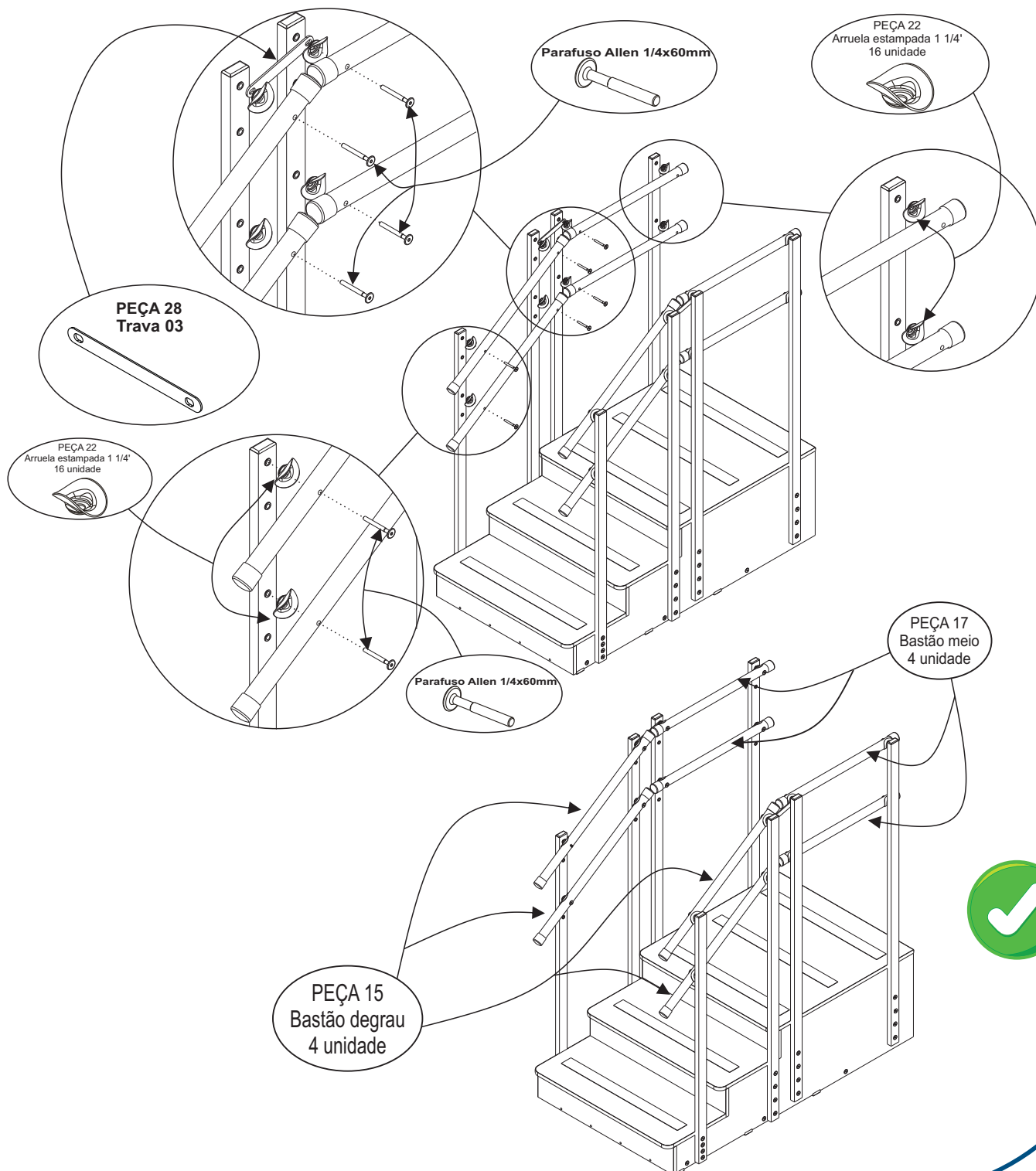


Montagem do produto

Montagem - Corrimões da Rampa

PASSO A PASSO PARA MONTAGEM - ETAPA 3


Nessa etapa vamos realizar a montagem dos corrimões da rampa, essa parte é igual tanto para uso da escada linear, quanto em 90°. Logo a baixo temos uma imagem ilustrada do conjunto já montado para melhor esclarecimento.

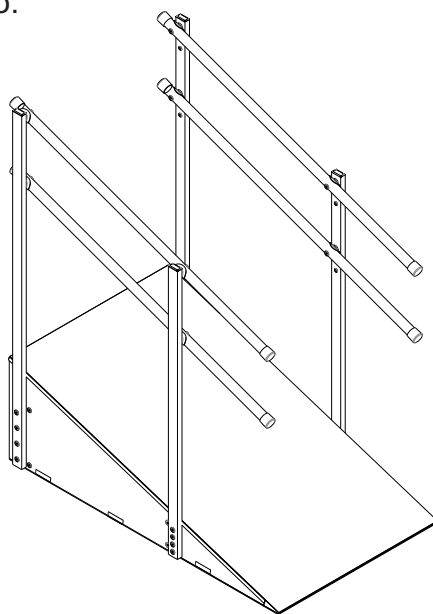


COMPONENTES NECESSÁRIOS

Este conjunto é composto por 6 componentes diferentes sendo eles:


PEÇA 12 - Apoio maior para corrimão (Quantidade 2)

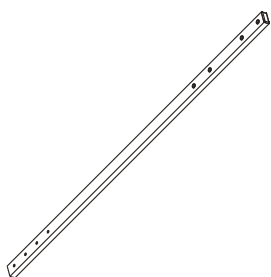

PEÇA 16 - Bastão maior 32x1200mm (Quantidade 4)

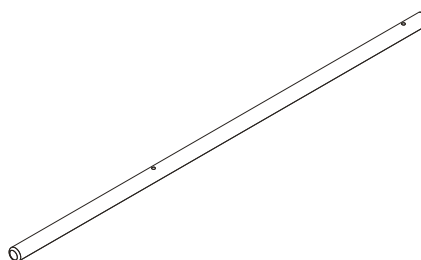


PEÇA 30 - Parafuso Allen 1/4x60mm (Quantidade 8)

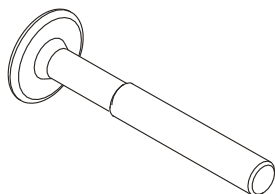


PEÇA 22 - Arruela estampada 1 1/4" (Quantidade 8)



PEÇA 13 - Apoio menor para corrimão (Quantidade 2)

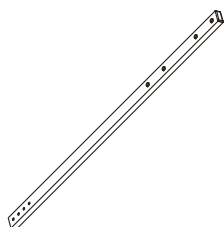


PEÇA 23 - Parafuso Allen 1/4x50mm (Quantidade 16)

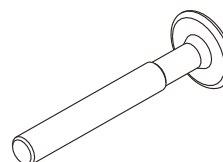

Montagem do produto


Montagem - Corrimões da rampa

1º Passo: com a rampa montada, use a chave allen 4mm para pender as barras metálicas na rampa usando o Parafuso Allen 1/4x50mm na parte inferior das barras, depois prenda as barras do corrimões utilizando os Parafusos Allen 1/4x60mm na ordem descrita abaixo: arruela estampada encostada no suporte metálico, bastão encostado na arruela e parafuso 1/4x60mm, para fixar as peças juntas. Imagem detalhada para melhor entendimento.

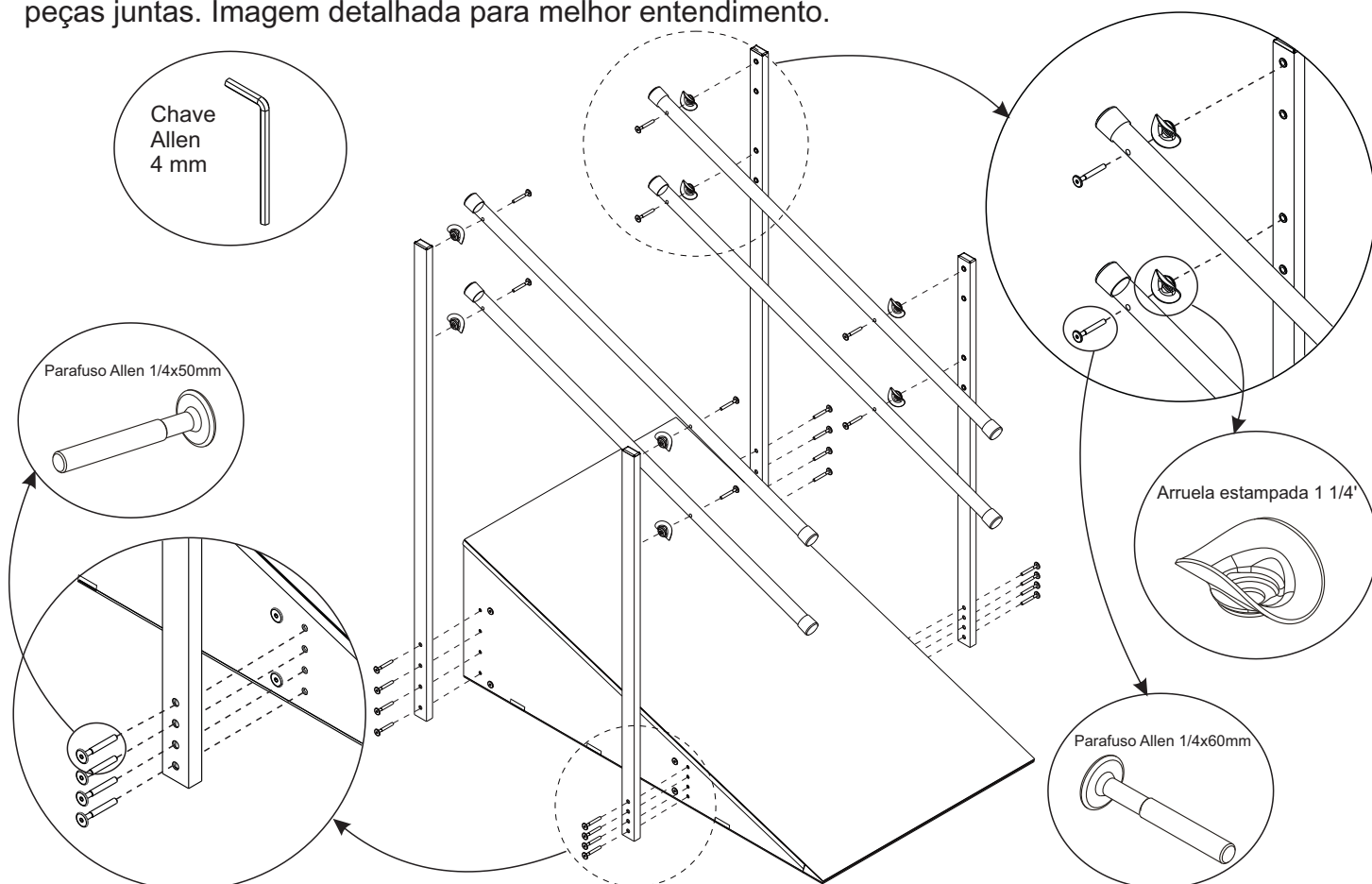

Perceba na imagem abaixo como deve ficar o conjunto da ETAPA 4 montado.


Observações. Não
forças as pontas da
Barras do corrimão

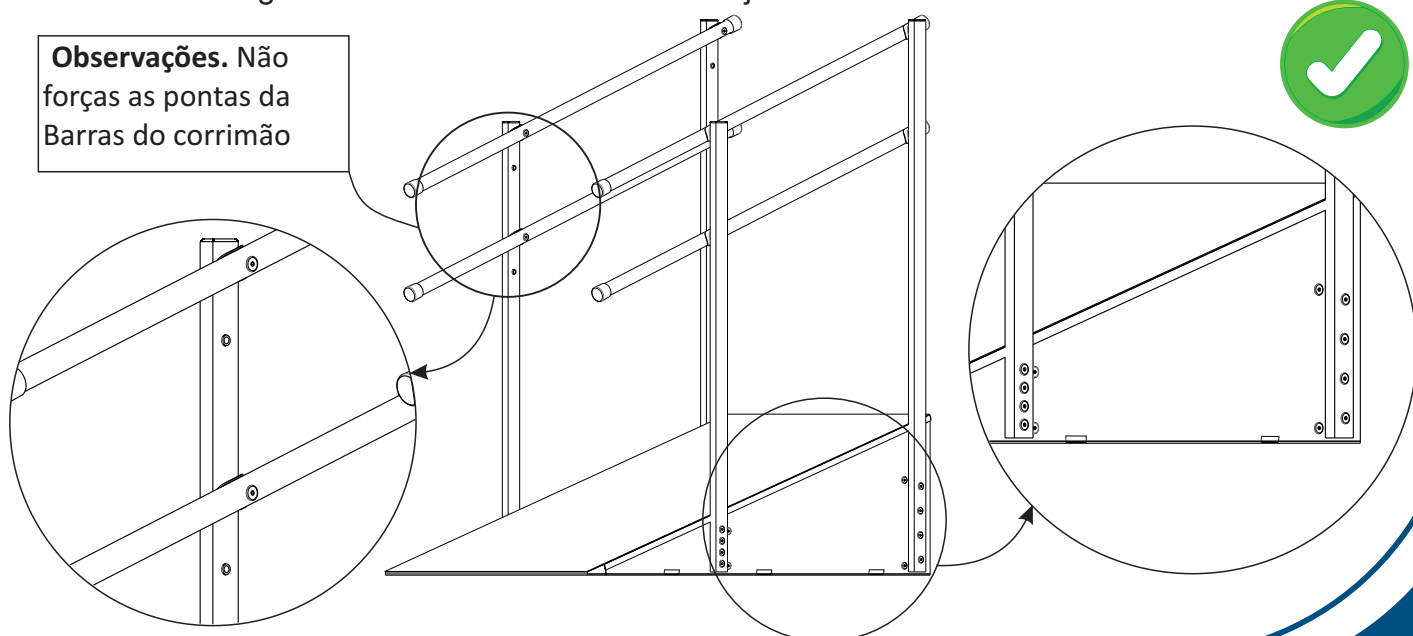

Montagem do produto

Montagem Linear - Chapas de fixação


2º Passo: Após as partes estarem todas montadas iremos realizar o encaixe juntamente com as Travas 01 com os parafusos 1/4x60mm conforme as imagens ilustrada abaixo.

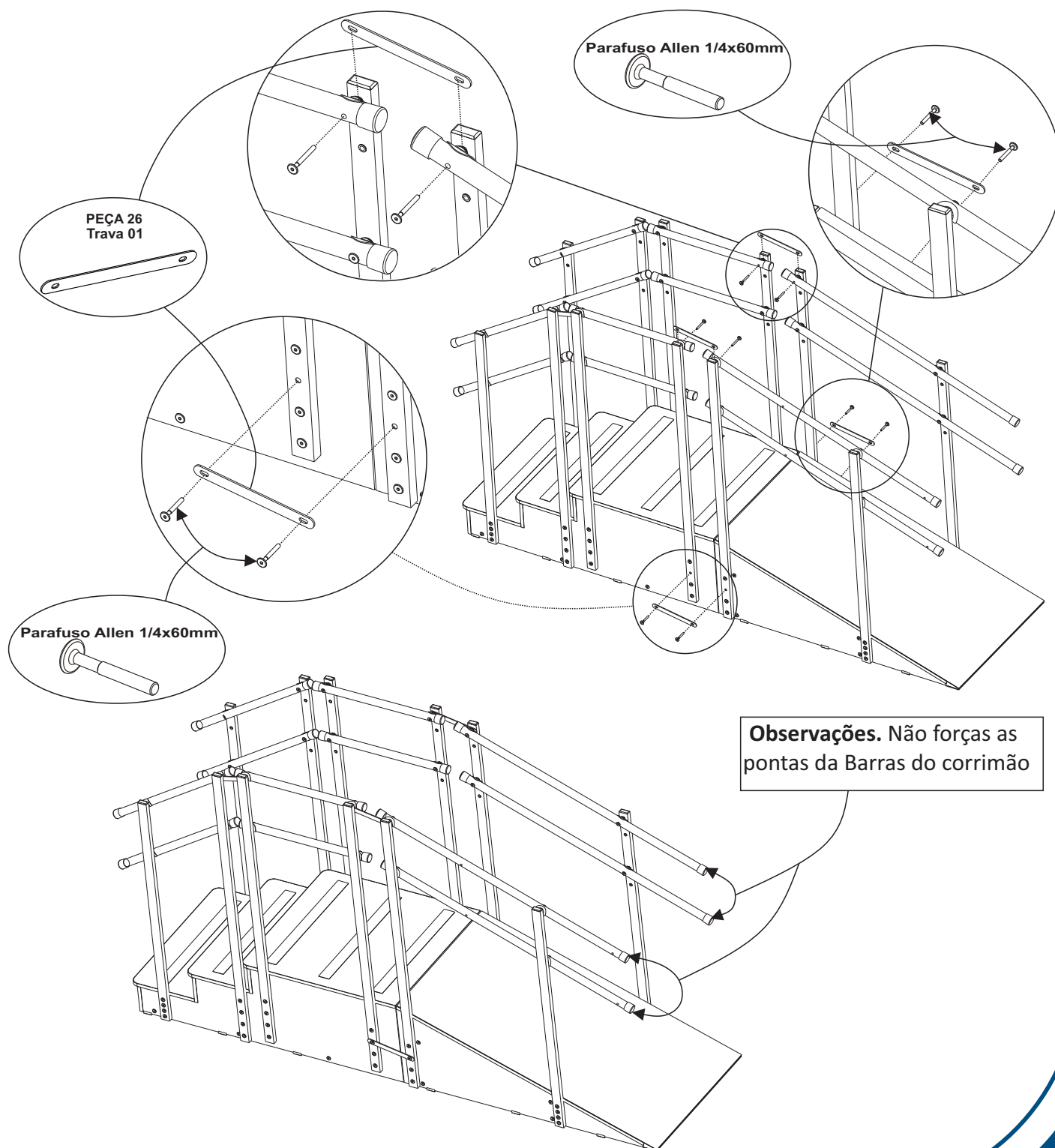

Montagem do produto

Montagem Linear - Final

3º Passo: Após todas as peças e travas estarem montadas revise o aperto de todos os parafusos antes de utilizar o produto.

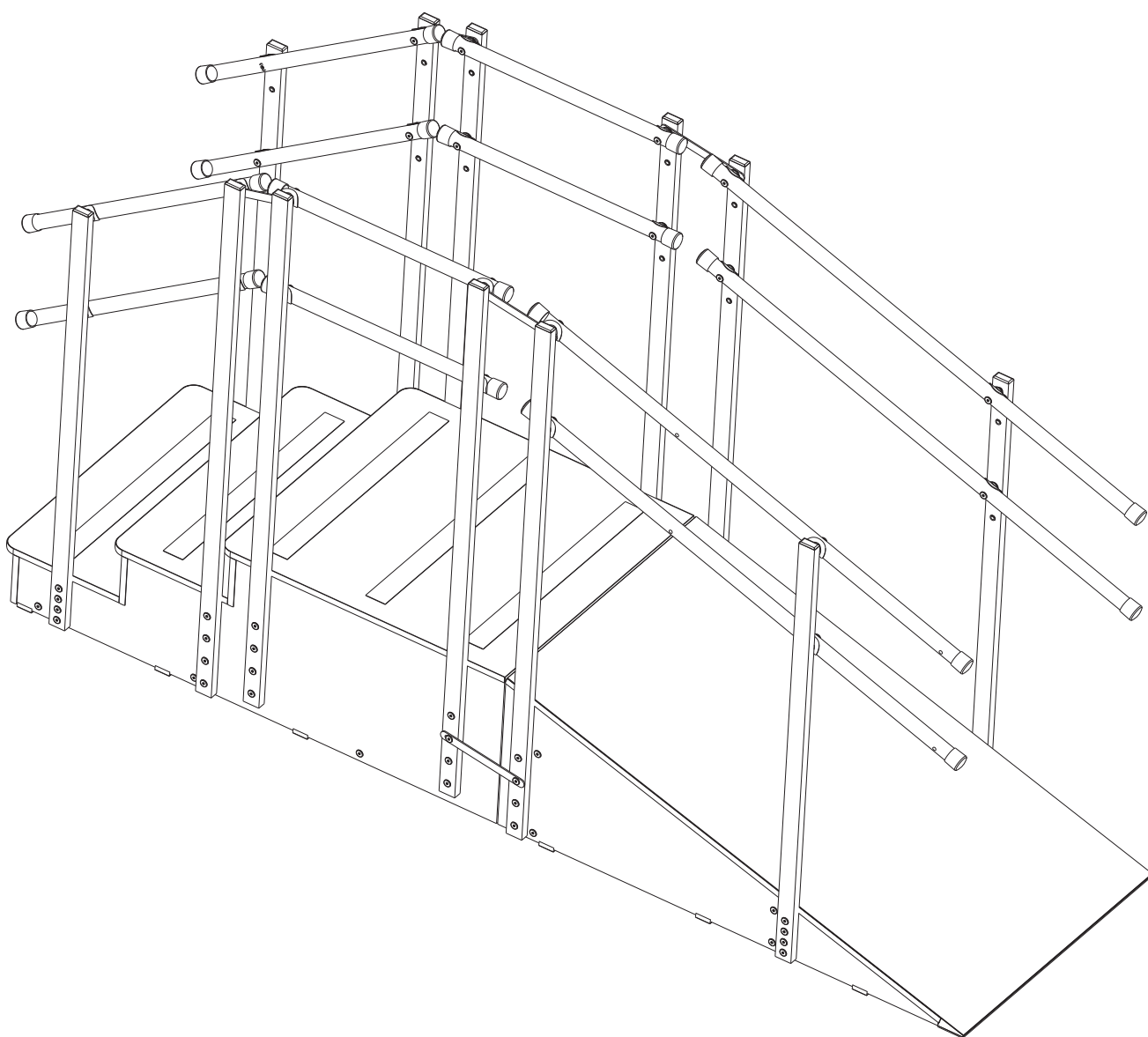

Termo de Garantia

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação, pelos prazos constantes no Quadro “PRAZOS DE GARANTIA”, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda e limita-se à realização de serviços de reposição de partes e componentes do produto, nos termos discriminados nas condições abaixo e cujo exame realizado por profissionais da empresa constate, satisfatoriamente, a existência do alegado defeito de material ou manufatura.

PRAZO DE GARANTIA		
03 (três) MESES	06 (seis) MESES	12 (doze) MESES
Ravena Feijão Lixa antiderrapante Parafusos	Colagens sintéticas Peças e partes plásticas	Estruturas metálicas Estruturas em madeira Pintura Epoxi

A garantia é válida somente para defeitos de fabricação e não contempla:

- ☒ Mau uso, esforços indevidos, ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto através do Manual do produto, ou seja, uso inadequado do equipamento que não seja a prática de exercícios por pessoas habilitadas.
- ☒ Desgaste no acabamento, partes e/ou peças, ocorrido por uso intenso, lubrificação inadequada, uso de substâncias (lubrificantes, produtos de limpeza, etc.) não indicadas no Manual, oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza e/ou a exposição a condições adversas como intempéries, umidade, maresia, frio e calor intensos.
- ☒ Danos causados durante o transporte e montagem em desacordo com o Manual ou relacionados a adaptações e/ou alterações realizadas no produto ou uso de peças e ferramentas não especificadas no Manual.
- ☒ Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como pisos desnivelados, presença de umidade excessiva, etc.
- ☒ Danos causados por serviços de conserto realizados por terceiros não autorizado pela *Arktus*.
- ☒ Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza.
- ☒ Caso não seja seguida as orientações, recomendações, cuidados e especificações apresentadas no Manual quanto à sua utilização, inspeções antes de cada uso e manutenções preventivas do produto, não sendo estes custos cobertos pela *Arktus*.
- ☒ Despesas com a instalação do equipamento, peças e/ou acessórios por pessoas ou empresas não autorizadas pela *Arktus*. Despesas e/ou serviços de limpeza e manutenção do equipamento não autorizadas pela *Arktus*.
- ☒ Taxa de visita técnica (inspeção e diagnóstico) determinando que a falha tenha sido causada por motivo não coberto por esta garantia.

Ocasiona a perda da garantia:

- ☒ Utilização do produto em ambiente úmido e/ou expostos à maresia;
- ☒ Montagem e utilização do produto sem seguir as orientações contidas no Manual;
- ☒ Utilização de acessórios que não sejam originais do equipamento;
- ☒ Uso de peças por outras não originais ou não autorizadas pela *Arktus*;
- ☒ Adulteração e/ou remoção do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

ATENÇÃO:

- ☒ O conserto e/ou substituição do produto com defeito não prorroga o prazo de garantia.
- ☒ A recepção dos produtos mediante a transportadora deve ser acompanhada com seriedade pelo cliente, pois produtos danificados durante o transporte deverão ser questionados ao transportador no ato da entrega.
- ☒ Em caso de dúvidas, para esclarecimentos adicionais e/ou reclamações de defeitos observados durante o prazo de garantia referente ao equipamento deverão ser efetivadas diretamente ao Núcleo de Atendimento e Qualidade (NAQ), através do telefone 0800 200 8022 ou e-mail qualidade@arktus.com.br e serão atendidas mediante:
 - ✓ Identificação do cliente (CPF) e/ou empresa (CNPJ);
 - ✓ Número de identificação do respectivo documento fiscal de venda caso seja referente algum defeito reclamado.(Sugerimos o envio de fotos e/ou vídeos relativos ao defeito reclamado para facilitar a emissão do laudo, o que tornará o seu atendimento ainda mais rápido.)
- ☒ As despesas de frete são de responsabilidade do fabricante somente nos primeiros 90 (noventa) dias, após este prazo serão de responsabilidade do solicitante.
- ☒ A *Arktus* reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.
- ☒ Este Termo de Garantia é válido para produtos vendidos e instalados em território brasileiro, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra. Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao documento fiscal e Manual em local de fácil acesso.

Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome do Cliente: _____

Endereço: _____

Complemento: _____

Bairro: _____

Cidade: _____

UF: _____ CEP: _____

Data da Compra: ____/____/____ Nota Fiscal (n°): _____

N° de Série: _____ N° Lote: _____

Equipamento: _____

Obs.: _____

