

aquece[®]



PRODUTOS PARA
SAÚDE E ESTÉTICA



Aquecedor
Digital
Inteligente



*O único fabricante nacional de
gel clínico com 2 certificações ISO.*



RMC IND BRAS DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI


CNPJ: 04.716.276/0001-21 - IE: 168.124.531.114

Rua Ramira Moreira Siqueira, 239 - Jd. Moreirinha

Amparo - São Paulo - Brasil - **SAC: 19 3808.5224** - sac@rmc.ind.br

Produzido por: CNPJ 14.491.588/0001-38

www.rmc.ind.br

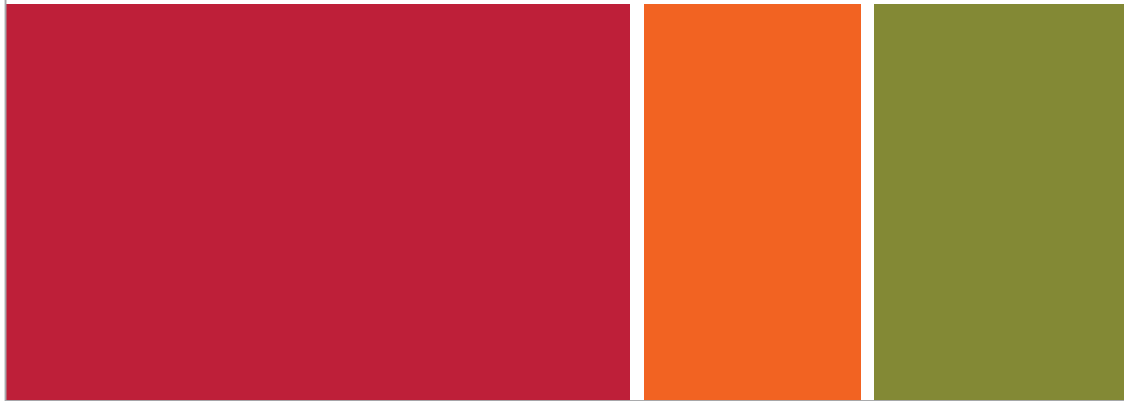

AQUECEDOR AQUECE DIGITAL – 3 CAVIDADES

Os Aquecedores Aquece RMC DIGITAL tem a finalidade de aquecer gel, óleos de massagem, cremes ou água, proporcionando assim um maior conforto aos seus pacientes, utilizado em clínicas médicas, fisioterapia, estética e etc.

INSTALAÇÃO

- Ligue o equipamento à tensão da rede elétrica.
- O mesmo é BIVOLT AUTOMÁTICO. (110V ou 220V)

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Ao ligar o aparelho é mostrado no display a sequência: teste de display, valor atual gravado na memória, valor da temperatura lido pelo circuito.
- 2 - Se o valor atual gravado na memória for maior que 5 graus em relação ao valor de temperatura lido pelo circuito é acionado a rotina de Pré Aquecimento (PA), permanecendo assim por aproximadamente 50 minutos, para um rápido aquecimento, retornando ao controle automático normal após esta rotina.
- 3- Para sair da rotina de Pré-aquecimento(PA), devemos desligar e religar observando o valor de temperatura lido e depois ajustar o valor atual gravado na memória para uma diferença de no máximo 5 graus, novamente desligar e religar.
- 4- Para o ajuste do valor atual gravado na memória, aperte simultaneamente os dois botões após o display começar a piscar use os botões individuais para aumentar ou reduzir o valor, após o ajuste aguarde o display parar de piscar, aproximadamente 10 segundos, e a leitura voltará ao controle automático normal.
- 5- O aparelho aceita para o valor atual gravado na memória programação de 20°C a 60°C.
- 6- O aparelho faz leitura de temperatura de 5°C a 65°C.
- 7- Se no display aparecer a mensagem "EE", significa que existe problemas com o aparelho ou que o valor de temperatura lido pelo circuito está abaixo de 5°C ou acima de 65°C.
- 8- Coloque o produto a ser aquecido em frascos cheios na cavidade de aquecimento do equipamento.

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

CUIDADOS E ADVERTÊNCIAS


SEMPRE OBSERVE A TEMPERATURA DO GEL, ÓLEOS DE MASSAGEM, CREAMES OU ÁGUA ANTES DE APLICAR NO PACIENTE.

- Após o uso desligue o aquecedor Aquece Digital.
- Mantenha as cavidades do aquecedor sempre limpo. Para realizar a limpeza do aquecedor verifique se o mesmo está desconectado da rede elétrica.
- Utiliza um pano levemente umedecido com água.
- Não molhe ou mergulhe o equipamento em água ou qualquer outro tipo de solução. Isso pode causar danos ao equipamento ou choques elétricos.
- Nunca coloque água nas cavidades destinadas a aquecimento.
- Para evitar superaquecimento do produto, utilize os frascos sempre cheios.
- Utilize somente recipientes de material de alta densidade. Dê preferência aos frascos da RMC Gel Clínico.

ESPECIFICAÇÕES

- **Capacidade:** 3 frascos de 250g para equipamento de 3 cavidades.
- **Tensão:** BIVOLT AUTOMÁTICO.
- **Termostato de segurança:** Evitar super aquecimento.
- **Potência:** 25 W.
- **Controle de temperatura:** Através de placa eletrônica proporcionando ajuste fino de aquecimento.
- **Garantia:** 1(um) ano contra defeitos de fabricação.

Aparelho nº:

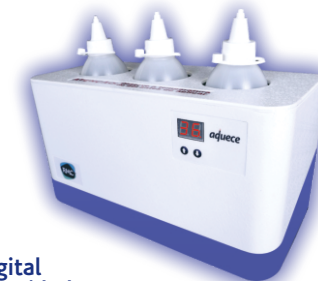

Digital
3 cavidades.