

MEMBRANA ANTICONGELANTE PARA CRIOLIPÓLISE CRIOCARE

Uso único.

APRESENTAÇÕES

Modelo M - Embalagem com 1 unidade, tamanho 27x30cm e peso 70g;

Modelo G - Embalagem com 1 unidade, tamanho 34x42cm e peso 110g;

INDICAÇÃO DE USO/FINALIDADE

A membrana anticongelante CrioCare é um produto destinado para uso em procedimentos de criolipólise e também nos tratamentos com fins terapêuticos de crioterapia. Sua finalidade é proteger a pele das baixas temperaturas do processo térmico destes procedimentos, ou seja, evitar intercorrências como queimaduras por excesso de gelo emitido pelo aplicador do equipamento na região tratada.

O produto é de uso único e individual, sendo locais de utilização: a papada, flancos, culotes, abdômen, infra-escapular, interno de coxas, coxas, glúteos, panturrilha, ou qualquer outra região de tratamento definida pelo profissional. A membrana possui alta resistência, e proteção rigorosa com segurança e eficiência comprovada, compatível com todos os equipamentos de criolipólise. Produto não invasivo.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO

A criolipólise, realiza o resfriamento por meio do processo de troca de temperatura, onde ocorre a extração da temperatura do tecido (adiposo) tratado para que alcance a temperatura desejada, de maneira não invasiva. Dessa forma, a membrana CrioCare atua formando uma barreira que evita o contato direto do equipamento com a pele da região a ser tratada, e assim, prevenir queimaduras pela baixa temperatura do procedimento. Além disso, sua formulação possui agentes emolientes e umectantes que previnem o ressecamento da pele, protegendo e hidratando o local.

MODO DE USO/CUIDADOS

1. Higienize as mãos e a região a ser tratada;
2. Abra a embalagem somente no momento de uso, com a pele da região seca e limpa;
3. Retire a membrana e desdobre-a por completo e coloque-a na região a ser tratada;
4. Certifique-se de que toda a área corporal a ser tratada esteja coberta pela membrana e que o manípulo do equipamento de criolipólise esteja centralizado na membrana, desta forma evitando riscos de queimaduras;
5. Após a verificação, inicie o procedimento;
6. Ao final do tratamento, remova o excesso de gel conforme preferência;
7. Finalizado o uso, descarte a membrana em local adequado.

CrioCare

CONDIÇÕES PARA MANIPULAÇÃO

- A embalagem do produto deve ser aberta somente no momento da utilização;
- Retirar a membrana CrioCare da embalagem primária e desfazer as dobraduras;
- Utilizar a quantidade total de líquido presente na embalagem para proteção completa da pele;
- Manipular em ambiente adequado, considerando padrões de higiene e biossegurança;
- Temperatura de utilização: suporta até -40°C;
- Utilizar em conjunto com o aparelho de criolipólise de acordo com o protocolo de uso do fabricante do equipamento;
- O descarte do produto e embalagem após o uso deve ser realizado em local adequado, conforme legislação local.

ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- Leia atentamente as instruções de uso;
- Utilizar imediatamente após a abertura da embalagem;
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Uso profissional;
- Evite o contato com os olhos ou mucosas. Caso ocorra, lavar abundantemente com água e procurar assistência médica;
- O produto não deve ser utilizado sobre a pele lesionada e/ou irritada, sendo apenas aplicável em pele íntegra;
- Não corte a membrana, verifique se o tamanho é adequado ao procedimento;
- Não utilize se o produto estiver danificado, ressecado, vencido ou com a embalagem violada;
- Utilização individual a cada aplicação, a reutilização pode ocasionar lesões cutâneas graves;
- Caso ocorra irritação na pele, suspenda o uso imediatamente e procure orientação médica.

CONTRAINDICAÇÕES/EFEITOS ADVERSOS

O produto passou por teste de hipersensibilidade pelo fabricante, não foram observadas reações de irritação, alergia, eritema e nem edema na pele. Entretanto, não recomenda-se o uso caso o indivíduo seja sensível a qualquer componente da formulação.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

- O produto deve ser armazenado em local seco e arejado, não sendo exposto diretamente à luz solar;
- O produto é resistente a baixas temperaturas;
- Recomenda-se o acondicionamento em temperatura ambiente até 25±5 °C e umidade de 25-70±5%;
- Não transportar com outros produtos que possam gerar contaminação e/ou que possam danificar a embalagem e o produto.

CrioCare

COMPOSIÇÃO

Membrana: Fibra de tecido.

Gel anticongelante: etilenoglicol, água deionizada, glicerina, açúcar, fosfato dissódico dodecahidratado, pentaeritritol e benzotriazol.

FABRICANTE

Hebei Newangie Technology Co., Ltd.

805, Block A, Xinke International Building, Yuhua District, Shijiazhuang, Hebei Province, China.

DETENTOR DO REGISTRO

Dsz Comercio De Produtos Para Saude Ltda

Rua Pernambuco, 3299, Coqueiral, Cascavel/Pr, 85807-050

ANVISA nº 80345610016

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

0800 200 8022